



SOFTWARE-HANDBUCH

V1.4

**BEDIENUNGSANLEITUNG**



# Hinweise

NovaChat ist ein Warenzeichen der Saltillo Corporation.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation

Android ist ein Warenzeichen der Google Inc.

Samsung und Galaxy Tab sind eingetragene Warenzeichen Samsung Electronics, Inc.

Android Market ist ein Warenzeichen der Google Inc.

Ivona Copyright © 2001-2010, IVO Software Sp.z o.o.

Acapela ist ein Warenzeichen der Acapela Group.

Picture Communication Symbols ist ein Warenzeichen der Dynavox Mayer-Johnson Inc.

METACOM ist ein Warenzeichen von Annette Kitzinger.

SymbolStix ©News2You. „Die mitgelieferte Bibliothek mit Buchstaben- und Logo-Symbolen darf nur zu Zwecken der Unterstützten Kommunikation verwendet und nicht veräußert, kopiert oder für kommerzielle Zwecke verwertet werden.“

Weitere hier verwendete Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

## NovaChat-Editor-CD

NovaChat-Editor ist Eigentum der Saltillo Corporation.

„Microsoft Voices“ sind Eigentum der Microsoft Corporation.

Saltillo erteilt die Berechtigung zur Nutzung des NovaChat-Editors auf jedem Computer, der zur Synchronisation / zum Datenaustausch mit dem NovaChat-Gerät verwendet wird.

NovaChat-Bedienungsanleitung geschrieben von Jürgen Babst

Version 1.00 • Oktober 2012

© Prentke Romich GmbH 2012

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich Company oder der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Handbuchs sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.

Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung des NovaChats oder der hierin gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung des NovaChats oder der hierin gemachten Angaben ergeben.

Änderungen und Modifikationen, die ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Prentke Romich Company vorgenommen wurden, können zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

## CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht laut Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG den Grenzwerten für Medizinprodukte der Klasse 1.

## FCC-Bestimmungen

Dieses Gerät wurde typengeprüft und entspricht laut Abschnitt 15 der Bestimmungen der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC) den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B. Diese Bestimmungen dienen dazu, in Wohnräumen einen angemessenen Schutz gegen Funkstörungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet HF-Energie und strahlt diese u. U. auch ab. Bei unsachgemäßer Installation und unsachgemäßem Betrieb, die von den Anweisungen des Herstellers abweichen, kann eine Funkstörung auftreten. In bestimmten Installationen ist das Auftreten von Störungen jedoch nicht auszuschließen. Sollte dieses Gerät den Empfang von Funk- und Fernsehsendungen stören (feststellbar durch das Ein- und Ausschalten dieses Gerätes), können die folgenden Behebungsmaßnahmen einzeln oder im Verbund eingesetzt werden:

- Verlegung oder Neuausrichtung der Empfangsantenne.
- Aufstellung des Gerätes in einer größeren Entfernung vom Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an eine andere Steckdose, so dass dieses Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Gegebenenfalls kann der Fachhändler oder ein erfahrener Funk- und Fernstechniker weitere Ratschläge geben.

## Umgebungsbedingungen

Temperatur der Betriebsumgebung während der Benutzung: 0°C - 45°C, Temperatur bei Lagerung: -20°C - 50°C, relative Luftfeuchtigkeit max. 90% bei Umgebungstemperaturen unter 40°C.



# PRD

Prentke Romich Deutschland  
*Kommunikation ohne Grenzen*

## Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31

D - 34119 Kassel

Tel. (05 61) 7 85 59-0

Fax (05 61) 7 85 59-29

E-Mail [info@prentke-romich.de](mailto:info@prentke-romich.de)

Web [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de)

# Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Hinweise sorgfältig durch.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



Den NovaChat niemals in Wasser eintauchen oder in feuchten Räumen betreiben. Vor Feuchtigkeit schützen!



Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Kabel, einschließlich des Netzkabels des Ladegeräts, evtl. Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen den einzelnen GerätekompONENTEN ordnungsgemäß und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden.



Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie neue oder zusätzliche Komponenten (Netzteil, Tasten, Kabel, Speichermedien etc.) anschließen oder entfernen.



Der NovaChat verfügt über keine vom Benutzer zu wartenden Teile.



Entfernen Sie KEINE fest angebaute Gehäuseteile, da dadurch gefährliche Spannungen freigesetzt werden könnten!



Der im NovaChat eingebaute Lithium-Ionen-Akku darf niemals in der Nähe von offenem Feuer oder in Umgebungen mit Temperaturen oberhalb von 45° C gelagert werden, da der Akku explodieren könnte. Den Akku nicht öffnen. Sollte der Akku ausgetauscht werden müssen, den alten Akku nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern an einer der öffentlichen Sammelstellen für Altbatterien abgeben oder an PRD zur ordnungsgemäßen Entsorgung zurückschicken.



Achten Sie bei Verwendung von Kopfhörern auf eine angemessene und NICHT zu hohe Lautstärke, da andernfalls Ihr Hörvermögen auf Dauer beeinträchtigt werden kann.



Die für das Ladegerät erforderliche Netzspannung beträgt 110-240 V bei 50/60 Hz Wechselstrom. Schließen Sie das Ladegerät niemals an Gleichstrom oder eine andere Stromquelle an.



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. Privathaushalte in den 27 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammelanlagen kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.



Nicht gedacht als Notrufgerät oder alleinige Kommunikationshilfe.



Nicht gedacht zum Anschluss an bzw. zum Verbinden mit Nicht-Medizinprodukte(n).



Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Funkwellen abstrahlenden Geräten, da dabei Interferenzen auftreten können. Entfernen Sie sich wenn möglich von der Quelle der Interferenz.



Halterungs- und Befestigungssysteme dürfen nur von qualifiziertem Personal montiert werden. Fehlerhafte Montage kann zu Verletzungen des Benutzers führen.



Salttilo Corporation übernimmt keine Verantwortung bei einem Datenverlust aufgrund einer Reparatur oder eines Akkuwechsels. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Daten regelmäßig auf einem externen Speichermedium sichern.



Kabel und Gurte bergen eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr. Achten darauf, dass sich keine Schlingen bilden.



## **Implantierbare Medizinprodukte**

Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem tragbaren Gerät wie dem NovaChat und einem implantierten Gerät wie Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator, um potentielle Interferenzen mit dem NovaChat zu vermeiden.

Menschen, denen ein Gerät wie wie ein Schrittmacher ein Kardioverter-Defibrillator implantiert wurde,

- sollten **IMMER** einen Mindestabstand von mindestens 15 cm zwischen NovaChat-Gerät und dem implantierten Gerät einhalten, solange das NovaChat-Gerät eingeschaltet ist;
- sollten das NovaChat-Gerät nicht in einer Brusttasche oder am Gürtel in einem Abstand von weniger als 15 cm vom implantierten Gerät tragen, da das NovaChat-Gerät nach dem Einschalten – auch dann, wenn es nicht verwendet wird – Signale aussenden kann. Das NovaChat-Gerät sollte auf der dem implantierten Gerät angewandten Seite getragen werden;
- sollten das NovaChat-Gerät **SOFORT AUSSCHALTEN**, wenn die Gefahr einer Interferenz besteht.
- sollten alle Anweisungen des Herstellers des implantierten Geräts lesen und befolgen. Haben Sie Fragen zur Verwendung Ihres mobilen NovaChat-Geräts in Verbindung mit einem implantierten Gerät, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst des Herstellers des implantierten Geräts.

# INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise .....	2
Sicherheitshinweise .....	3

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DEN NOVACHAT 9**

Willkommen beim NovaChat .....	10
Der Touchscreen-Bildschirm .....	11
Stylus verwenden .....	11
Über die in dieser Anleitung verwendeten Begriffe .....	12
NovaChat-Editor .....	13
NovaChat-Editor installieren .....	13
NovaChat-Editor starten .....	13
Das Display .....	15
Das Menü öffnen .....	16
NovaChat 5 .....	16
NovaChat 7 .....	16
NovaChat 10 .....	16
NovaChat-Editor .....	17
Editiermodus .....	18

## **VOKABULARE BEARBEITEN 19**

Vorgespeichertes Vokabular laden .....	20
Neues Vokabular erstellen .....	21
Vokabular öffnen/wechseln .....	22
Vokabular duplizieren .....	23
Vokabular umbenennen .....	24
Vokabulare löschen .....	25
Einzelnes Vokabular löschen .....	25
Mehrere Vokabulare auf einmal löschen .....	26

## **SEITEN BEARBEITEN 29**

Seiten erzeugen .....	30
Neue Seite anlegen .....	30
Seite duplizieren .....	32
Seite als Vorlage speichern .....	34
Seite von Vorlage anlegen .....	36
Seiteneigenschaften bearbeiten .....	38
Seiten verknüpfen .....	40
Dauerhaft auf eine andere Seite wechseln .....	40
Für eine Auswahl auf eine andere Seite wechseln .....	41
Seitennavigationsbefehle .....	42
Situationsbilder .....	43
Situationsbild verwenden .....	43
Seite importieren .....	45
Seiten kopieren .....	47
Startseite festlegen .....	48
Seiten löschen .....	50
Einzelne Seite löschen .....	50
Mehrere Seiten löschen .....	51

<b>TASTEN BEARBEITEN</b>	<b>53</b>
Taste bearbeiten.....	54
Tasteneigenschaften – Allgemein .....	55
Tasteneigenschaften – Layout .....	64
Tasteneigenschaften – Funktion .....	68
Übersicht Tastenfunktionen .....	70
Tastenmakro (mehrere Funktionen ausführen) .....	72
Tasten mehrfach verwenden .....	73
Taste aus Bibliothek laden .....	73
Taste kopieren .....	75
Taste verknüpfen .....	77
Tastenlayout übertragen.....	79
Tastengröße ändern .....	81
Taste entfernen .....	83
Multi-Tasten .....	84
Multi-Tasten benutzen.....	84
Eine Multi-Taste erstellen.....	85
Multi-Taste aus Bibliothek laden .....	87
Multi-Taste kopieren.....	89
Multi-Taste verknüpfen.....	91
Eine Multi-Taste bearbeiten .....	93
Sound wiedergeben.....	95
Aufnahme machen .....	96
Aufnahme machen .....	98
Sound aufnehmen .....	99
Aufnahme machen .....	102
Android-Anwendung öffnen .....	103
Endung anhängen .....	105
<b>VORGABEN</b>	<b>107</b>
Vorgaben .....	108
Vokabularvorgaben .....	108
Seitenvorgaben .....	109
Tastenvorgaben.....	110
<b>DATENÜBERTRAGUNG</b>	<b>111</b>
Vokabular zwischen NovaChat und PC übertragen .....	112
Vokabular vom NovaChat-Editor auf den NovaChat übertragen .....	112
Vokabular vom NovaChat-Gerät zum NovaChat-Editor übertragen .....	113
Vokabular vom NovaChat-Editor als Datei exportieren.....	114
Vokabulardatei in den NovaChat-Editor importieren .....	115
<b>TEXTFENSTER</b>	<b>117</b>
Das Textfenster .....	118
Text auf Taste speichern .....	119
Textfenster speichern .....	120
Textfenster laden .....	121
Textfenster – Text kopieren .....	122
Textfenster – Text einfügen .....	122
Textfenster – Text freigeben.....	122
<b>EINSTELLUNGEN</b>	<b>123</b>
Ansteuerung .....	124
Verzögerungszeiten .....	124

Neigen .....	126
Tastenpieton.....	127
Textfensteroptionen.....	127
Tippen = Sprechen.....	127
Tippen = Maximieren.....	127
Menü aktivieren.....	127
Feld Display löschen (X) einblenden.....	128
Scanning.....	129
Tasten konfigurieren.....	129
Ansagen.....	130
Muster.....	131
Scangeschwindigkeit.....	132
weitere.....	132
Sprachausgabe.....	133
Zeichen.....	135
Wort.....	135
Satz.....	135
Textfenster automatisch löschen.....	135
Sprachausgabe aus.....	135
Textbausteine.....	136
Schreibhilfen.....	140
Wortvorhersage.....	140
automatische Großschreibung.....	141
Layout.....	142
Textfenster.....	142
Bilder.....	143
Seitenindikator.....	143
Farbverlauf.....	143
Menüsperre.....	144
Menüsperre einschalten.....	145
Menüsperre ausschalten.....	145
Passwort für Menüsperre ändern.....	145
Profile.....	146
Neues Profil erstellen.....	146
Profil speichern.....	148
Profil laden.....	149
Standardprofil laden.....	150
Profil löschen.....	151
Sprache.....	152
Sprache wechseln.....	152
System.....	154
Bluetooth / Lautsprecher.....	155
Rückmeldungen / Feedback.....	156
Display / Energie.....	157
Zeit und Datum.....	159
Batterie- und Ladezustand.....	160
Kiosk-Modus.....	160
<b>BIBLIOTHEK.....</b>	<b>161</b>
Bibliothek.....	162
Bibliothek sichern.....	162
Bibliothek wiederherstellen.....	164
Seiten drucken.....	166

<b>FEHLERSUCHE &amp; PANNENHILFE</b>	<b>167</b>
Das NovaChat-Gerät spricht nicht mehr .....	168
Benutzervokabular ist verschwunden .....	168
Der NovaChat reagiert nicht.....	168
Das Textfenster wird nicht angezeigt .....	168
Der NovaChat schaltet sich selber aus .....	168
Das Display ist zu dunkel .....	168
Die Displayhelligkeit schwankt ständig .....	168
Die Tastenfelder lassen sich nicht auslösen .....	168
Ein Bild füllt die Taste nicht aus .....	168
Bei x handelt es sich um eine Originaldatei, die nicht verändert werden kann .....	169
NovaChat zeigt englische Menüs an.....	169

<b>INDEX</b>	<b>171</b>
--------------	------------



# **ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DEN NOVACHAT**

## Willkommen beim NovaChat

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb einer NovaChat-Kommunikationshilfe mit dynamischen Display und Sprachausgabe.

Die NovaChat-Geräte verbinden die Leistungsfähigkeit der *ChatPC*-Software von Saltillo mit der Haltbarkeit und Portabilität eines modernen Tablet-Computers. Durch das geringe Gewicht kann das NovaChat-Gerät überall hin mitgenommen werden.

Der NovaChat verfügt sowohl über digitalisierte (natürliche) Sprache als auch synthetische Sprache (computergenerierte Sprache). Optional steht eine Wortvorhersage zur Verfügung. Der NovaChat bietet die Möglichkeit der Ansteuerung über 1 oder 2 Tasten im so genannten Scanningbetrieb.

Der NovaChat wird komplett mit der PC-Software *NovaChat-Editor* geliefert, mit deren Hilfe Sie bequem alle Änderungen am Vokabular vornehmen können, um diese dann zu einem beliebigen Zeitpunkt in den NovaChat zu übertragen. Sie können Änderungen jedoch auch direkt auf dem Gerät durchführen.

Das Übertragen von Vokabulardateien zwischen PC und NovaChat-Gerät erfolgt bequem über das im Lieferumfang enthaltene USB-Sync-Kabel.

Zum Kennenlernen des Geräts lesen Sie bitte ebenfalls das Hardware-Handbuch durch.

Um auch später noch darin nachschlagen zu können, bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf.

## Der Touchscreen-Bildschirm



**Sicherheitshinweis:** Im NovaChat-Gerät ist ein Flüssigkristalldisplay (LCD, Liquid Crystal Display) eingebaut. Sollte das Display jemals zerbrechen und Sie in Kontakt mit den Flüssigkristallen kommen, spülen Sie die Kristalle unter fließendem Wasser ab und waschen Sie die betroffenen Hautstellen gründlich.



**Sicherheitshinweis:** Das Display besteht aus Glas, sollte das Display jemals zerbrechen, schützen Sie sich vor Glassplittern.



**Hinweis:** Benutzen Sie für Eingaben auf dem Touchscreen keine scharfen oder spitzen Gegenstände. Diese könnten die Oberfläche beschädigen. Obwohl Sie Eingaben mit den Fingern machen können, empfehlen wir zur Verwendung der Menüs auf dem NovaChat die Benutzung des mitgelieferten Stylus.

## Stylus verwenden

Der NovaChat wird mit einem Bedienstift (Stylus) geliefert. Falls Sie das NovaChat-Gerät nicht mit den Fingern bedienen wollen oder können, können Sie den Stift verwenden, um Eingabe vorzunehmen.



Der Stift verfügt über eine Öffnung an der Spitze, so dass sie ihn mit einem Band oder Lanyard am NovaChat-Gerät befestigen können.

## Über die in dieser Anleitung verwendeten Begriffe

Eine **Vokabulardatei** besteht aus einer oder mehreren Seiten. Eine **Seite** besteht aus einer oder mehreren Tasten. Eine **Taste** kann Text oder ein Bild enthalten oder beides. Die Anzahl der Tasten einer Seite sowie ihre jeweilige Gestalt sind individuell wählbar. Tasten können so belegt werden, dass sie eine Aussage wiedergeben, zu einer anderen Seite springen oder eine Gerätefunktion wie „Display löschen“ ausführen, wenn sie ausgewählt werden. Um eine Taste auszuwählen, ist sie einfach auf dem Display zu drücken.

**Ressource** und **Bibliothek** sind Begriffe, die die Gesamtheit aller Vokabulare inkl. ihrer Seiten, Felder, Bilder und Audiodateien bezeichnen. Die **Standardbibliothek** ist der von PRD gelieferte Satz von Vokabulardateien, Bildern und Audiodateien, mit dem der NovaChat ausgeliefert wird.

Der Begriff **Editiermodus** bezeichnet die Betriebsart, in der Sie das Vokabular bearbeiten können. Befindet sich das NovaChat-Gerät bzw. der NovaChat-Editor im Editiermodus, so wird dies in großen roten Buchstaben unten links im Display angezeigt. Weiterhin werden der Name des aktuell geladenen Vokabulars sowie der Name der gerade angezeigten Seite eingeblendet.

Auch im Editiermodus lassen sich alle Felder ganz normal benutzen. Um die Belegung einer Taste zu ändern, klicken Sie im NovaChat-Editor mit der rechten Maustaste auf die Taste. Auf dem NovaChat-Gerät tippen Sie ca. für 1 Sekunde auf die zu bearbeitende Taste, bis sich das Kontextmenü öffnet.

Für die Benutzung des NovaChats sollte der Editiermodus deaktiviert werden!

Das **Textfenster** bezeichnet den in der Größe einstellbaren Bereich oberhalb der aktuellen Seite, in dem alle abgerufenen Aussagen gesammelt werden.

## NovaChat-Editor

Zusammen mit dem NovaChat haben Sie die Software NovaChat-Editor für Windows erhalten. Installieren Sie das Programm auf Ihrem Computer, um Benutzer-vokabulare anzulegen, zu bearbeiten und zu speichern.

### NovaChat-Editor in der Übersicht

- Entwerfen und testen Sie Vokabulardateien direkt auf Ihrem PC.
- Fertigen Sie Sicherheitskopien Ihrer Vokabulare an.
- Übertragen Sie Vokabulare zwischen PC und NovaChat-Gerät.
- Importieren Sie Fotos und Bilder in den NovaChat.
- Verwalten und unterstützen Sie mehrere NovaChat-Benutzer.

Wir empfehlen Ihnen, alle Änderungen am Vokabular auf dem PC durchzuführen, da dies schneller und komfortabler als auf dem NovaChat erfolgt. So können Sie sogar am Vokabular arbeiten, wenn das Gerät nicht zur Verfügung steht.

Diese Anleitung wird Sie mit dem Programm NovaChat-Editor vertraut machen. Alle Angaben gelten jedoch ebenfalls für das auf dem NovaChat-Gerät laufende Programm *ChatPC*. Bedingt durch unterschiedliche Betriebssysteme (Windows bzw. Android) ist die Benutzeroberfläche jedoch unterschiedlich.



**Hinweis:** Es wird empfohlen, stets eine Sicherheitskopie des aktuell im NovaChat-Gerät verwendeten Vokabulars anzufertigen. Im Falle eines Datenverlustes auf dem NovaChat-Gerät können Sie damit den vorigen Zustand schnell wieder herstellen (siehe S. 22).

### NovaChat-Editor installieren

- Legen Sie die NovaChat-Editor-CD in das Laufwerk Ihres Computers.
- Der Saltillo-Begrüßungsbildschirm sollte erscheinen. Erfolgt dies nicht, haben Sie die AutoPlay-Funktion für das Laufwerk deaktiviert. In diesem Fall müssen Sie über den Windows-Explorer manuell zu dem Laufwerk wechseln, das die NovaChat-Editor-CD enthält. Doppelklicken Sie auf der Datei *autorun.exe*, um die Installation zu beginnen.
- Wählen Sie die zu installierenden Programme.
- Wählen Sie **Installieren**.
- Folgen Sie den Angaben auf dem Bildschirm.
- Nach Abschluss der Installation entfernen Sie die CD aus dem Laufwerk.


### NovaChat-Editor starten

- Starten Sie das Programm durch Doppelklicken auf der Verknüpfung, die auf Ihrem Desktop angelegt worden ist.
- Wählen Sie *Hilfe – Registrierung* und geben Sie die auf der CD aufgedruckten Registrierungsdaten ein.
- Wählen Sie *Bibliothek – Vorgespeicherte Vokabulare* und wählen Sie ein Vokabular aus.

Der NovaChat-Editor ist nun bereit für die Benutzung.




Der NovaChat-Editor lässt sich in der Größe auf das von Ihnen benutzte Gerät einstellen. Wählen Sie *Einstellungen – Anzeigeformat*, um die unterstützten Geräte angezeigt zu bekommen. Wählen Sie die zu Ihrem Gerät und zur bevorzugten Ausrichtung (Hochformat bzw. Querformat) passende Anzeige. Sie sehen dann das Deckblatt ungefähr in der Größe, wie es auf dem Gerät angezeigt wird.

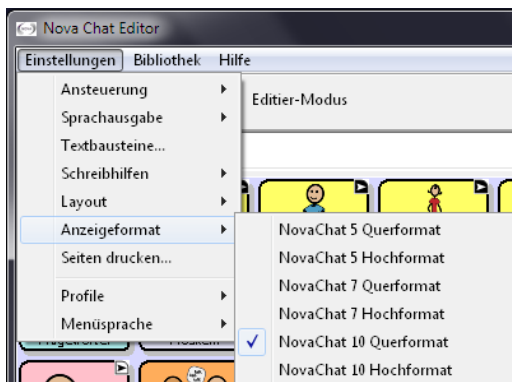


# Das Display

Das NovaChat-Display ist beim NovaChat 5 in zwei, beim NovaChat 7 und Nova-Chat 10 in drei Bereiche unterteilt.

## NovaChat 5:

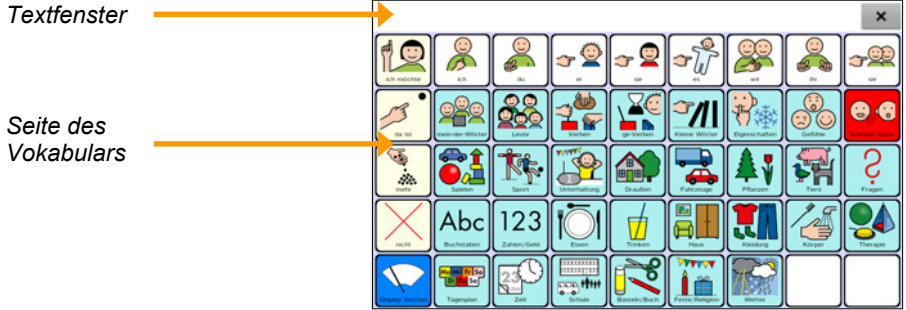

## NovaChat 7 und NovaChat 10:

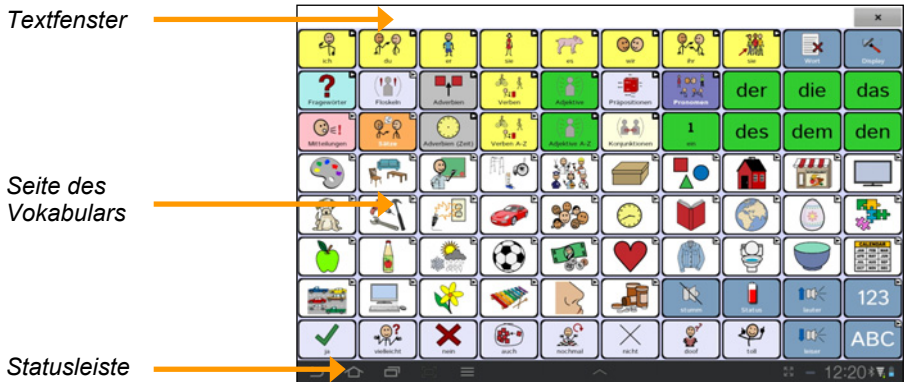

Oben befindet sich das Textfenster. Alle abgerufenen Mitteilungen erscheinen dort in Textform. Größe des Textfensters, Schriftart, -größe und -farbe können individuell eingestellt werden.

In der Mitte sehen Sie die aktuelle Seite des geladenen Vokabulars.

Beim NovaChat 7 und NovaChat 10 wird zusätzlich unten die Statusleiste angezeigt.

# Das Menü öffnen

## NovaChat 5

· Beim NovaChat 5 erreichen Sie die Menüs über die Taste MENÜ auf dem Gerät:



## NovaChat 7

· Beim NovaChat 7 erreichen Sie die Menüs über die Taste MENÜ im Display:



## NovaChat 10

· Beim NovaChat 10 erreichen Sie die Menüs über die Taste MENÜ im Display:



Es öffnet sich jeweils das Hauptmenü mit den Menüpunkten *Editiermodus*, *Einstellungen*, *Bibliothek* und *Hilfe*.



Schalten Sie den **Editiermodus** ein, um das aktuelle Vokabular direkt auf dem Gerät bearbeiten zu können.

Unter **Einstellungen** können Sie Einstellungen vornehmen in den Bereichen: Ansteuerung, Sprachausgabe, Textbausteine, Schreibhilfen, Layout, Menüsperre, Profile, Sprache und System. Die einzelnen Optionen werden hier im Handbuch beschrieben.

Unter **Bibliothek** haben Sie Zugang zu den auf dem Gerät gespeicherten Vokabularen.


Der Menüpunkt **Hilfe** gibt Informationen über die Geräte-ID des NovaChats, die installierte Software, vorhandene Symbolsammlungen und Sprachsynthesen. Weiterhin können Sie hier neue Registrierungsdaten eingeben, um weitere Features freizuschalten.

Tippen Sie auf die Taste **zurück** , um ein Menü wieder zu schließen.



## NovaChat-Editor


Der NovaChat-Editor bietet die Menüpunkte „Einstellungen“, „Bibliothek“, „Hilfe“ sowie „Editiermodus“.

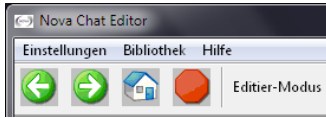

### Optionen des Menüs

*Einstellungen:*

*Bibliothek:*

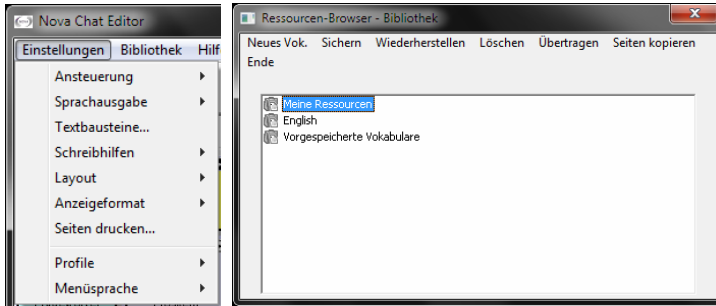


Schalten Sie den **Editiermodus** ein, um das aktuelle Vokabular im Editor bearbeiten zu können.

Unter **Einstellungen** können Sie Einstellungen vornehmen in den Bereichen *Ansteuerung*, *Sprachausgabe*, *Textbausteine*, *Schreibhilfen*, *Layout*, *Anzeigeformat*, *Profile* und *Sprache*. Die einzelnen Optionen werden hier im Handbuch beschrieben. Unter **Bibliothek** haben Sie Zugang zu allen im Editor gespeicherten Vokabularen. Der Menüpunkt **Hilfe** gibt Informationen über die installierte Software sowie vorhandene Symbolsammlungen. Weiterhin können Sie hier neue Registrierungsdaten eingeben, um weitere Features freizuschalten.

### Navigationsstasten

Die Navigationsstasten unterhalb der Menüleiste des NovaChat-Editors ermöglichen schnelles Navigieren zur **vorigen Seite**, zur **nächsten Seite** und zur **Startseite**.

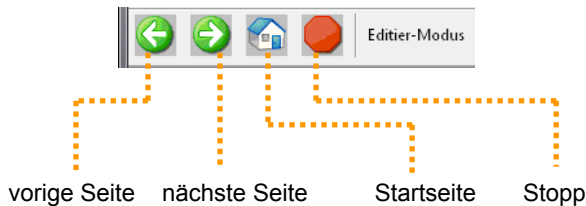


Die **Stopp**-Taste kann benutzt werden, um die Sprachausgabe abubrechen.

# Editiermodus

## NovaChat-Editor

Um ein Vokabular zu bearbeiten, muss der NovaChat-Editor in den Editiermodus umgeschaltet werden.

- Wählen Sie **Editiermodus**:

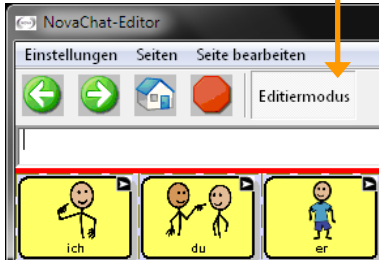

- Unten links wird der Hinweis „Editiermodus“ sowie Name des aktuellen Vokabulars und der angezeigten Seite angezeigt.



## NovaChat-Gerät

Um ein Vokabular zu bearbeiten, muss das NovaChat-Gerät in den Editiermodus umgeschaltet werden.

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie die Option **Editiermodus**



- Unten links wird der Hinweis „Editiermodus“ sowie Name des aktuellen Vokabulars und der angezeigten Seite angezeigt.




# VOKABULARE BEARBEITEN

# Vorgespeichertes Vokabular laden

## NovaChat-Editor

- Wählen Sie Bibliothek – Vorgespeicherte Vokabulare.
- Wählen Sie eine Gruppe aus.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Vokabular.
- Wählen Sie **Duplizieren**, um eine editierbare Kopie des Vokabulars zu erzeugen. Geben Sie einen Namen für das neue Vokabular ein.

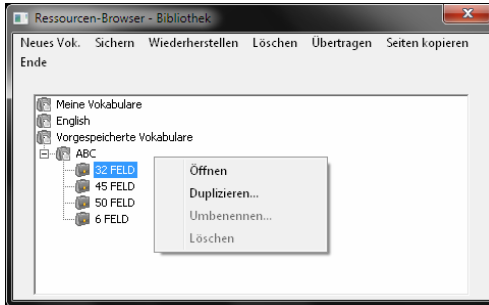


## NovaChat-Gerät

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .



- Wählen Sie die Option **Bibliothek**
- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt.
- Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular.
- Wählen Sie die Option **Duplizieren**, um eine editierbare Kopie des Vokabulars zu erzeugen. Geben Sie einen Namen für das neue Vokabular ein.

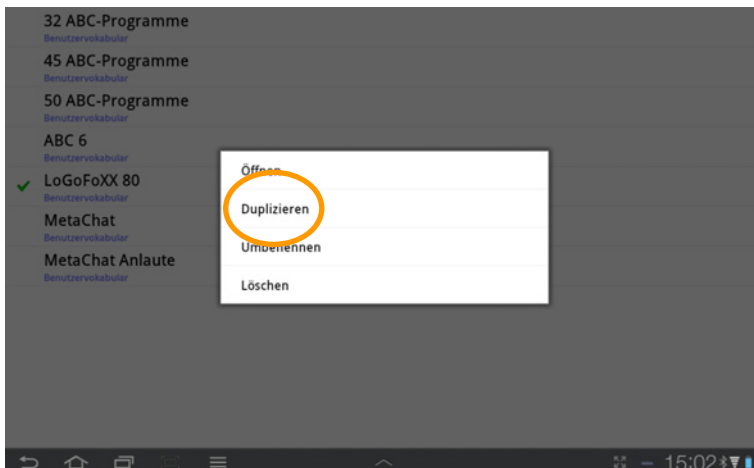


## Neues Vokabular erstellen

Wenn Sie keines der mitgelieferten Vokabulare nutzen wollen, können Sie auch ein eigenes Vokabular erstellen.

### NovaChat-Editor

- Wählen Sie **Bibliothek – Neues Vok.** (Abb. links). Ein Hinweis erscheint (Abb. Mitte). Klicken Sie auf **Weiter**.

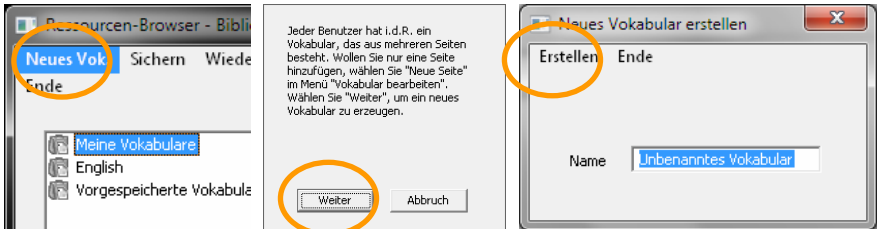

- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **Erstellen**.
- Legen Sie anschließend mind.1 Seite an und machen Sie diese zur Startseite.

### NovaChat-Gerät


- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie die Option **Bibliothek**



- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie die Option **Neu**

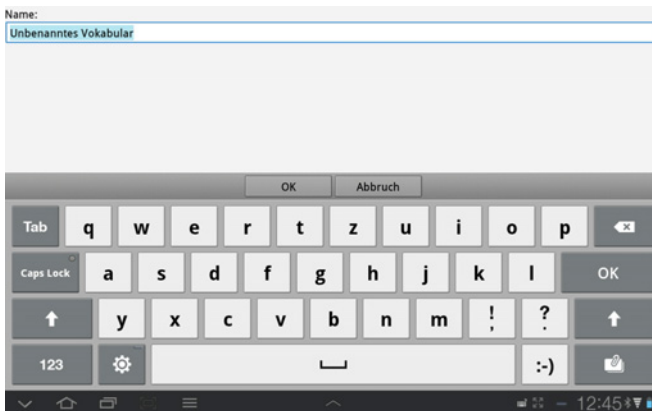


- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **OK**.
- Legen Sie anschließend mind.1 Seite an und machen Sie diese zur Startseite.

# Vokabular öffnen/wechseln


## NovaChat-Editor


- Wählen Sie Bibliothek – Meine Vokabulare.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Vokabular.
- Wählen Sie **Öffnen**.

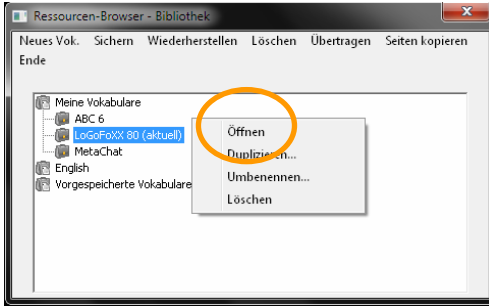

## NovaChat-Gerät

Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie die Option **Bibliothek** .
- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt.
- Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular. Wählen Sie die Option **Öffnen**.


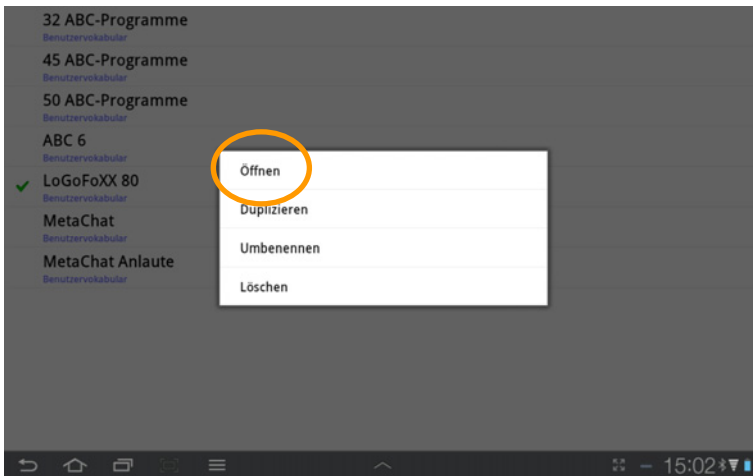


## Vokabular duplizieren

Sie können ein vorhandenes Vokabular duplizieren. Es wird eine Kopie erzeugt.

### NovaChat-Editor

- Wählen Sie **Bibliothek**.
- Klicken Sie auf **Meine Vokabulare** oder auf **Vorgespeicherte Vokabulare**.
- Klicken Sie auf das gewünschte Vokabular und wählen Sie **Duplizieren**.

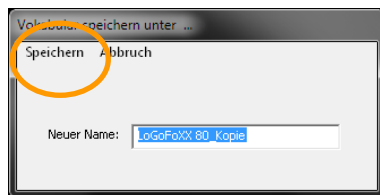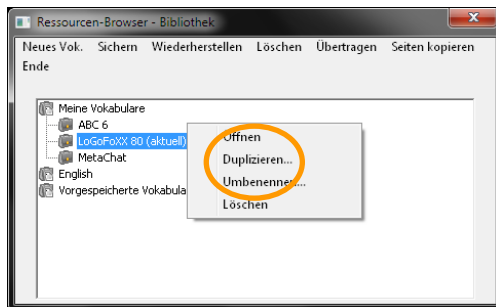

- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **Speichern**.


### NovaChat-Gerät

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie die Option **Bibliothek**



- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular. Wählen Sie die Option **Duplizieren**.

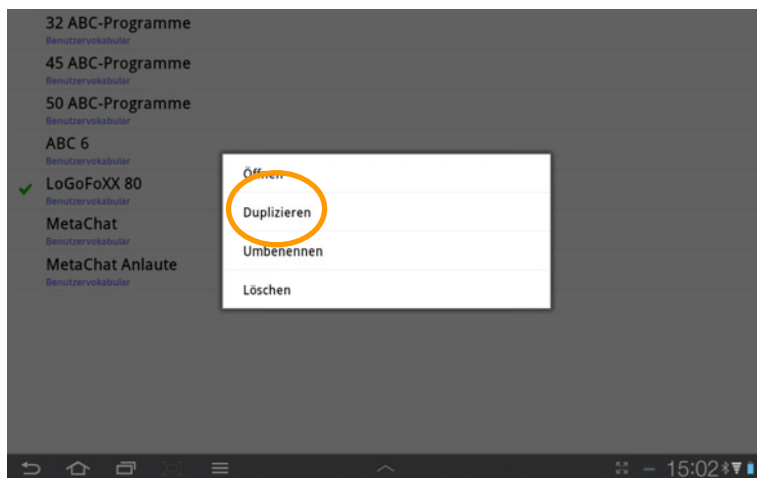


- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **OK**.

# Vokabular umbenennen

Sie können den Namen eines vorhandenen Vokabulars ändern.

## NovaChat-Editor


- Wählen Sie **Bibliothek**.
- Klicken Sie auf **Meine Vokabulare**.
- Klicken Sie auf das gewünschte Vokabular und wählen Sie **Umbenennen**.

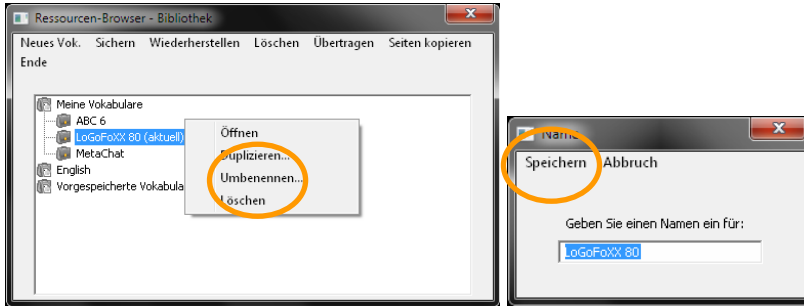


- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **Speichern**.

## NovaChat-Gerät

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie die Option **Bibliothek** .
- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt.
- Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular. Wählen Sie die Option **Umbenennen**.

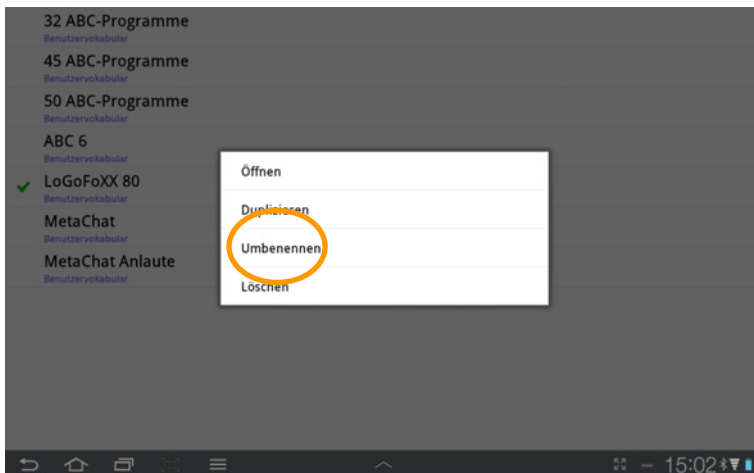

- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **OK**.




# Vokabulare löschen

Sie können selbst erstellte Vokabulare löschen.

## Einzelnes Vokabular löschen

### NovaChat-Editor

- Wählen Sie **Bibliothek**.
- Klicken Sie auf **Meine Vokabulare**.
- Klicken Sie auf das gewünschte Vokabular und wählen Sie **Löschen**.
- Geben Sie im Bestätigungsfenster „ja“ ein und wählen Sie **Weiter**.

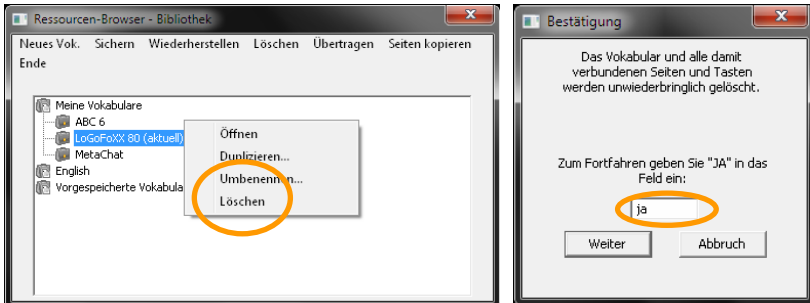



### NovaChat-Gerät

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie die Option **Bibliothek**




- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular. Wählen Sie die Option **Löschen**.
- Bestätigen Sie das löschen durch Tippen auf „Ja“.

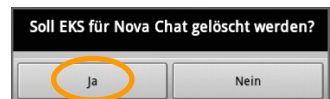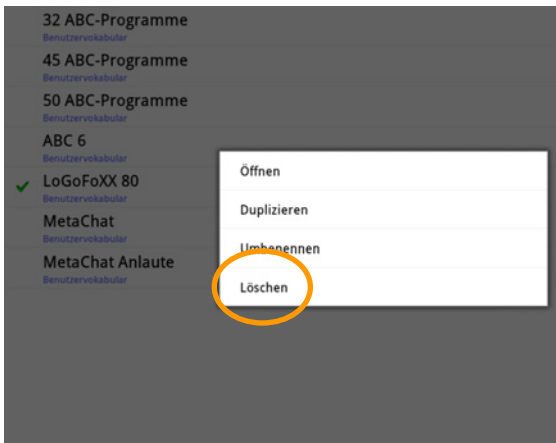


## Mehrere Vokabulare auf einmal löschen

### NovaChat-Editor

- Öffnen Sie das Menü **Bibliothek**.

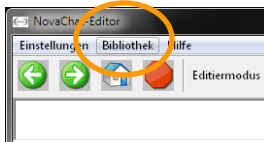

- Wählen Sie die Option **Löschen**. Das Fenster **Mehrere Vokabulare löschen** wird angezeigt.

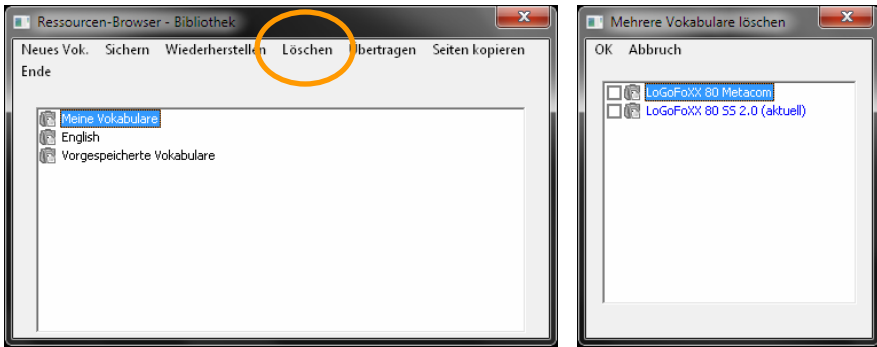

- Markieren Sie alle Vokabulare, die Sie löschen wollen (Sie können nur selbst angelegte Vokabulare löschen). Um ein Vokabular zu markieren, klicken Sie jeweils in das kleine Kästchen links neben dem Namen des Vokabulars.
- Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählten Vokabulare zu löschen.

## NovaChat-Gerät

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie die Option **Bibliothek**




- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie die **Löschen**



- Die auf dem Gerät vorhandenen eigenen Vokabulare werden angezeigt.

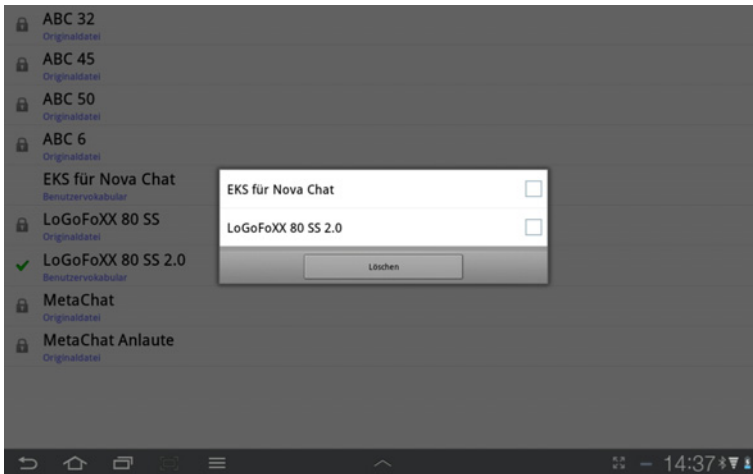

- Markieren Sie alle Vokabulare, die Sie löschen wollen (Sie können nur selbst angelegte Vokabulare löschen). Um ein Vokabular zu markieren, tippen Sie jeweils auf den Namen des Vokabulars in der Liste.
- Klicken Sie auf **Löschen**, um die ausgewählten Vokabulare zu löschen.



# SEITEN BEARBEITEN

## Seiten erzeugen


Es gibt 3 Möglichkeiten, neue Seiten zu erzeugen:

- eine neue leere Seite anlegen
- eine bestehende Seite duplizieren
- eine neue Seite von einer Vorlage anlegen


## Neue Seite anlegen

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wählen Sie **Seiten – Neue Seite**.

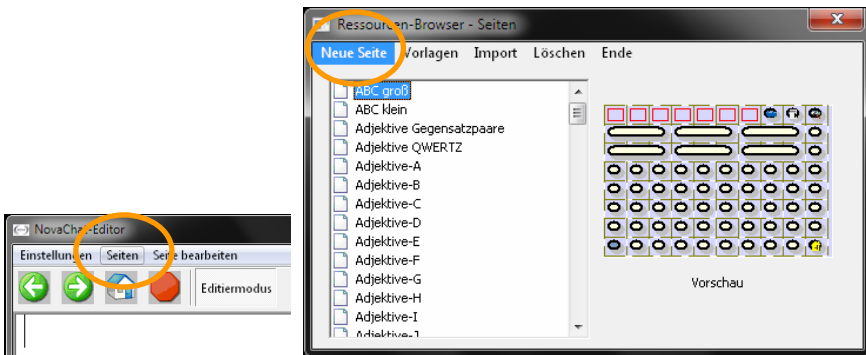

- Im folgenden Dialog können Sie der Seite einen Namen geben sowie die Anzahl der Zeilen und Spalten festlegen. Die Zahl der Tastenfelder ergibt sich aus dem Produkt aus Zeilen mal Spalten. Mögliche Werte sind 1x1 bis 19x19 Tasten.

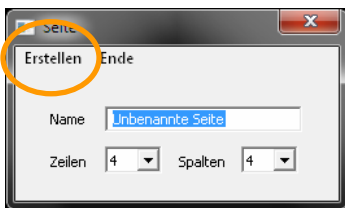

- Klicken Sie anschließend auf **Erstellen**.

## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.


- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet 

- Wählen Sie **Seiten**



- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet 

- Wählen Sie **Neue Seite**

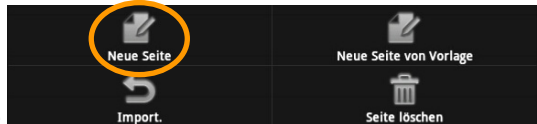


Im folgenden Dialog können Sie der Seite einen Namen geben sowie die Anzahl der Zeilen und Spalten festlegen. Die Zahl der Tastenfelder ergibt sich aus dem Produkt aus Zeilen mal Spalten. Mögliche Werte sind 1x1 bis 19x19 Tasten.

## Seite duplizieren


Mit dem Duplizieren erstellen Sie eine Kopie einer existierenden Seite.

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Linksklicken Sie auf der Seite, die Sie duplizieren wollen.
- Wählen Sie **Duplizieren....**

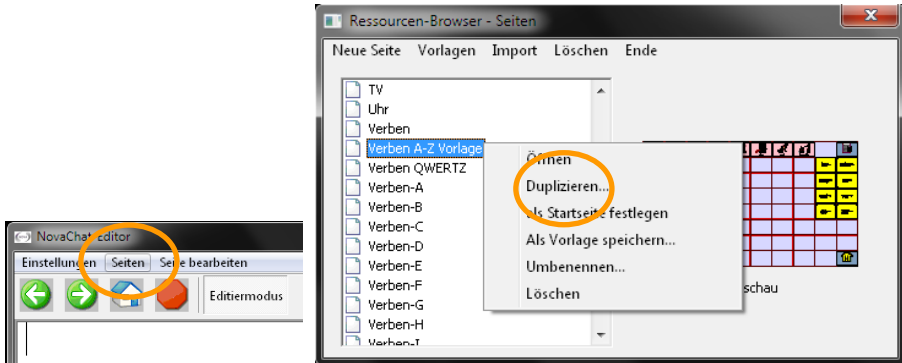

- Geben Sie einen Namen für die Seite ein.

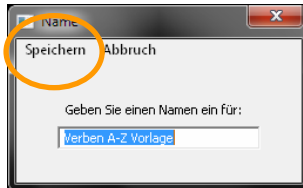

- Klicken Sie auf **Speichern**.



## NovaChat-Gerät


- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie **Seiten**



- Klicken Sie auf die Seite, die Sie duplizieren wollen. Wählen Sie **Duplizieren**.

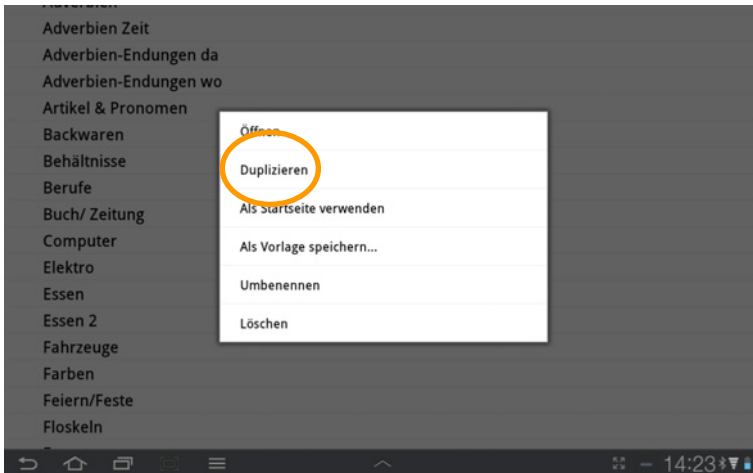


- Geben Sie einen Namen für die neue Seite ein.

## Seite als Vorlage speichern


Verfügen mehrere Seiten Ihres Vokabulars über identische Tastenfelder, so legen Sie für diese Seiten eine Vorlage an. Erstellen Sie dann die neuen Seiten von der Vorlage.

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wählen Sie **Seiten**. Der Ressourcen-Browser zeigt alle vorhandenen Seiten an.
- Linksklicken Sie auf der Seite, die als Vorlage dienen soll.
- Wählen Sie **Als Vorlage speichern**.

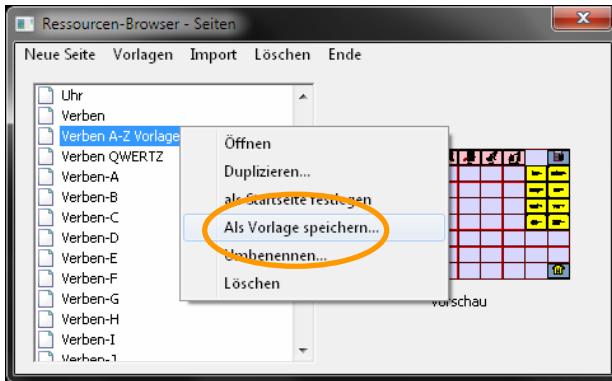

- Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und wählen Sie **Speichern**.

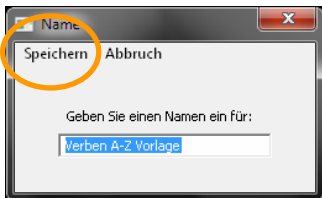

## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.


Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet




Wählen Sie **Seiten**



- Alle vorhandenen Seiten werden angezeigt.
- Tippen und Halten Sie auf der Seite, die als Vorlage dienen soll.
- Wählen Sie **Als Vorlage speichern....**

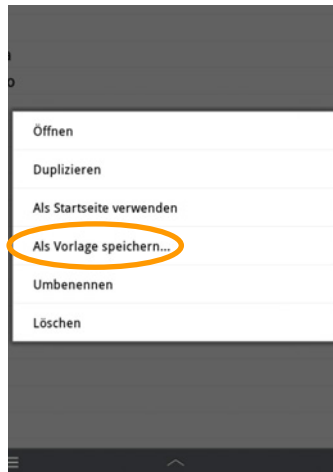

- Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und wählen Sie **OK**.

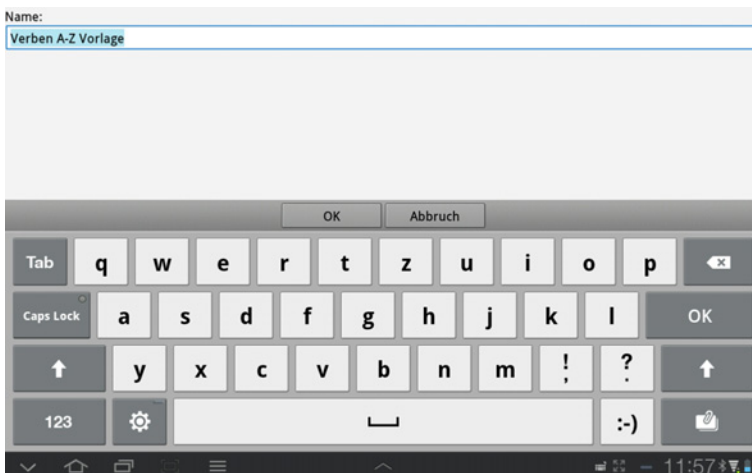


## Seite von Vorlage anlegen


Sie müssen mindestens eine Seitenvorlage angelegt haben, um eine Seite von einer Vorlage anlegen zu können!

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wählen Sie **Seiten – Vorlagen – Neue Seite von Vorlage**.

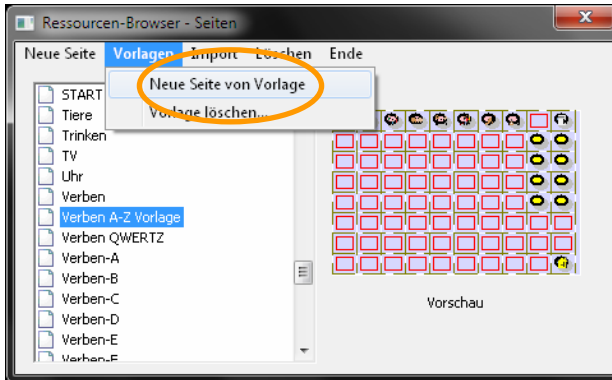

- Klicken Sie auf die Vorlage, von der Sie die neue Seite anlegen wollen

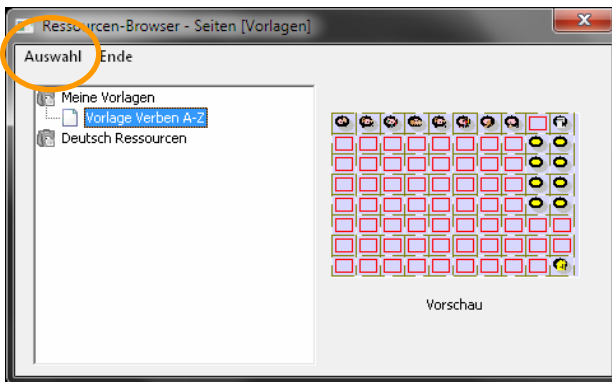

- Wählen Sie **Auswahl**.
- Geben Sie einen Namen für die neue Seite ein.

## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet 

- Wählen Sie **Seiten**




- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet 

- Wählen Sie **Neue Seite von Vorlage**



- Tippen Sie auf die Vorlage, von der Sie die neue Seite anlegen wollen.
- Geben Sie einen Namen für die neue Seite ein.

Name:

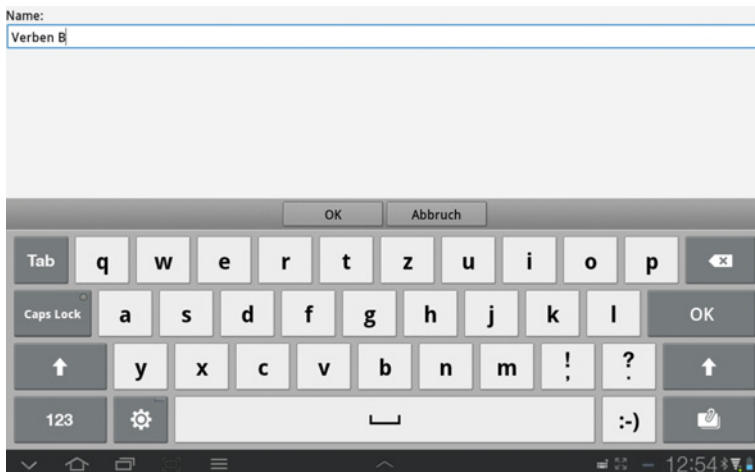
  


# Seiteneigenschaften bearbeiten


Sie können einer Seite eine Hintergrundfarbe oder ein Hintergrundbild zuweisen und die Zahl der Tastenfelder ändern.

## NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Linksklicken Sie auf der Seite, deren Eigenschaften Sie bearbeiten wollen.
- Wählen Sie **Öffnen**.

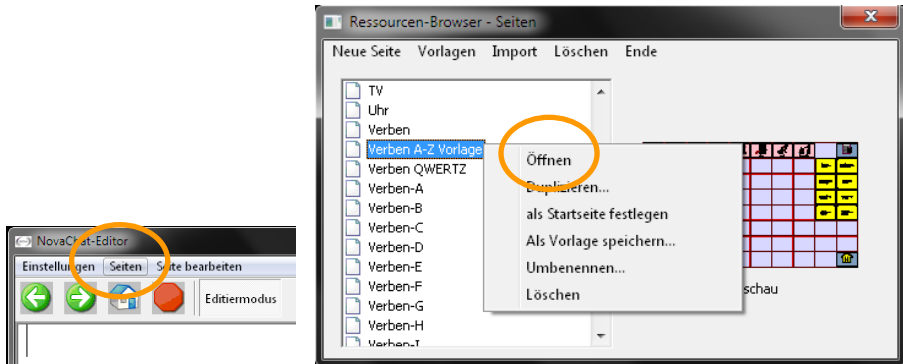

- Wählen Sie **Seite bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Seiteneigenschaften**, wenn Sie die **Hintergrundfarbe** der Seite ändern wollen. Wählen Sie eine Hintergrundfarbe.
- Wählen Sie den Reiter **Seiteneigenschaften**, wenn Sie ein **Hintergrundbild** auswählen oder importieren wollen (siehe S. 43 für Hintergrundbilder).
- Wählen Sie den Reiter **Seitenlayout**, wenn Sie die Zahl der Tastenfelder der Seite verändern wollen. Geben Sie die gewünschte Anzahl von Zeilen und Spalten ein.  
**Warnung:** wenn Sie die Anzahl der Spalten bzw. Zeilen reduzieren, gehen die entsprechenden Tastenfelder rechts bzw. unten unwiederbringlich verloren!

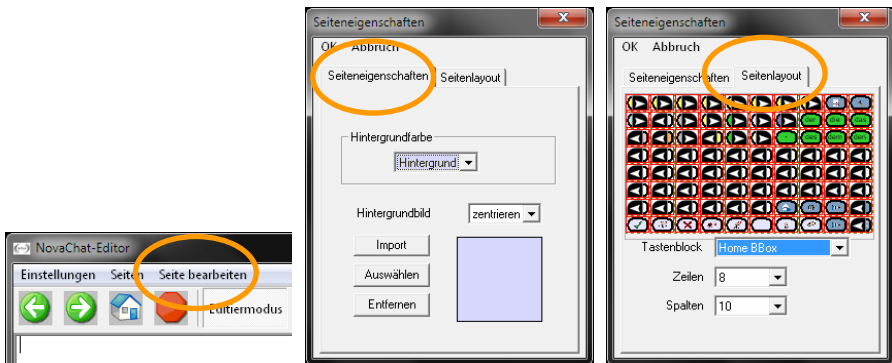

## NovaChat-Gerät


- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet 

- Wählen Sie **Seite bearbeiten**



- Wählen Sie den Reiter **Allgemein**, wenn Sie die **Hintergrundfarbe** der Seite ändern wollen. Wählen Sie eine Hintergrundfarbe.
- Wählen Sie den Reiter **Allgemein**, wenn Sie ein **Hintergrundbild** auswählen oder importieren wollen (siehe S. 43 für Hintergrundbilder).
- Wählen Sie den Reiter **Layout**, wenn Sie die Zahl der Tastenfelder der Seite verändern wollen. Geben Sie die gewünschte Anzahl von Zeilen und Spalten ein.  
**Warnung:** wenn Sie die Anzahl der Spalten bzw. Zeilen reduzieren, gehen die entsprechenden Tastenfelder rechts bzw. unten unwiederbringlich verloren!

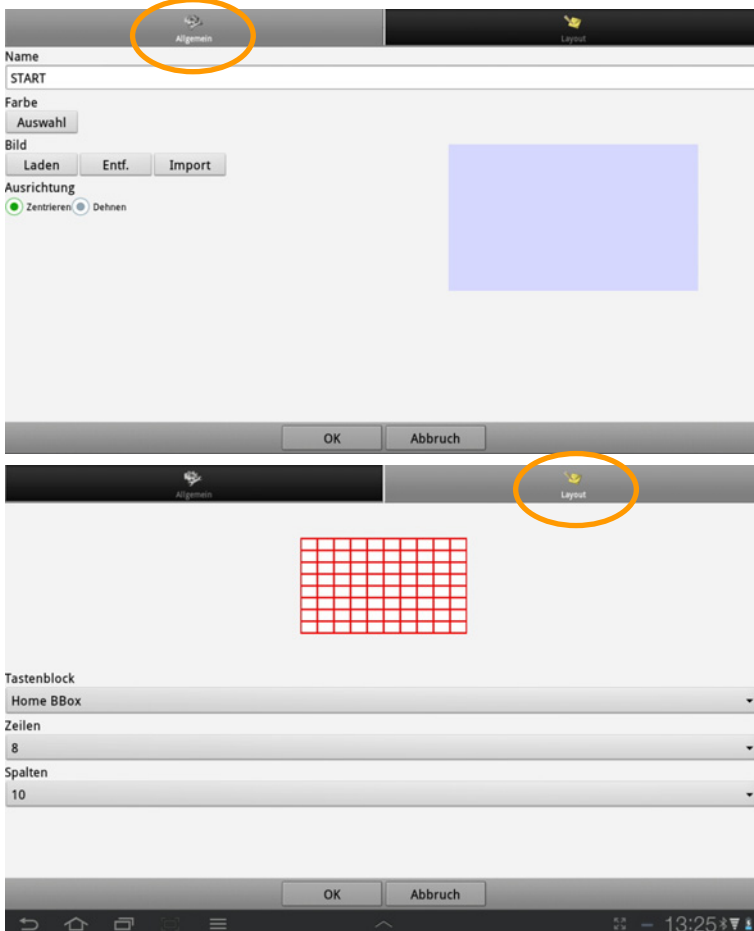


## Seiten verknüpfen

Verfügt das Vokabular über mehr Aussagen, als die Startseite Felder hat, muss das Vokabular über mehrere Seiten verteilt werden. Die ChatPC-Software bietet die Möglichkeit, dauerhaft auf eine andere Seite zu wechseln oder nur für eine Aussage.

### Dauerhaft auf eine andere Seite wechseln

- Belegen Sie eine Taste mit der Funktion **Seite anzeigen** (siehe S. 68). Löschen Sie ggf. die Funktion „Mitteilung ausgeben“.
- Die Liste aller verfügbaren Seiten wird angezeigt.
- Ist die gewünschte Seite bereits vorhanden, wählen Sie sie aus. Anderenfalls wählen Sie **Neue Seite** (NovaChat-Editor) bzw. **Neu** (NovaChat-Gerät), um eine neue Seite anzulegen.
- Wählen Sie **Hinzufügen** (NovaChat-Editor) bzw. **OK** (NovaChat-Gerät).
- Haben Sie **neue Seite** gewählt, so geben Sie einen Namen für die neue Seite ein und gestalten Sie sie.

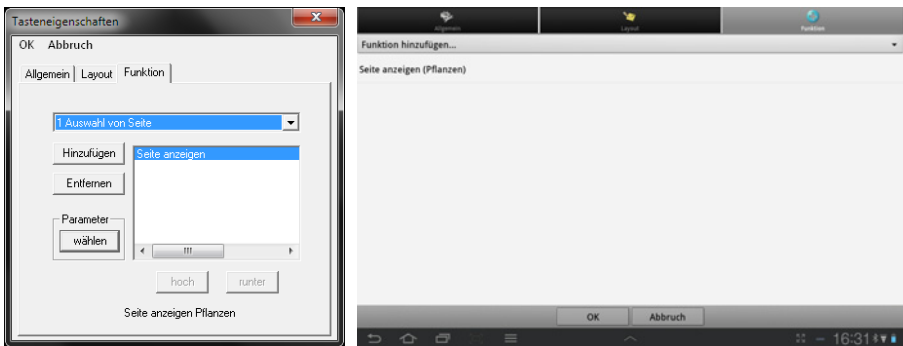

### Seitenindikator


Ein schwarzer Pfeil auf weißem Grund oben auf einer Taste zeigt an, dass durch das Feld dauerhaft auf eine andere Seite gesprungen wird. Die Größe des Pfeils ist einstellbar (S. 143). Sie benötigen ein mit „Startseite anzeigen“, „Seite anzeigen“ oder „vorige Seite anzeigen“ belegtes Feld auf dieser Seite, um sie wieder verlassen zu können.






## Für eine Auswahl auf eine andere Seite wechseln

- Belegen Sie eine Taste mit der Funktion **1 Auswahl von Seite** (siehe S. 68). Löschen Sie ggf. die Funktion „Mitteilung ausgeben“.
- Die Liste aller verfügbaren Seiten wird angezeigt.
- Ist die gewünschte Seite bereits vorhanden, wählen Sie sie aus. Anderenfalls wählen Sie **Neue Seite** (NovaChat-Editor) bzw. **Neu** (NovaChat-Gerät), um eine neue Seite anzulegen.
- Wählen Sie **Hinzufügen** (NovaChat-Editor) bzw. **OK** (NovaChat-Gerät).
- Haben Sie **neue Seite** gewählt, so geben Sie einen Namen für die neue Seite ein und gestalten Sie sie.

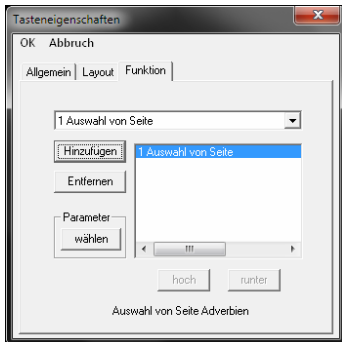

## Seitenindikator

Ein weißer Pfeil auf schwarzen Grund oben auf einer Taste zeigt an, dass durch das Feld für eine Auswahl auf eine andere Seite gesprungen wird. Die Größe des Pfeils ist einstellbar (S. 143). Durch Auswahl einer beliebigen Taste auf dieser Seite erfolgt automatisch der Rücksprung zur aufrufenden Seite.

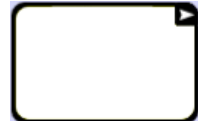

## Seitennavigationsbefehle

1 Auswahl von Seite	Die Seite wird nur für die Auswahl eines Feldes angezeigt, danach erfolgt automatisch der Rücksprung zur aufrufenden Seite.
alle Auswahlseiten schließen	Alle per „1 Auswahl von Seite“ geöffneten Seiten werden geschlossen.
auf Seite bleiben für 1 Auswahl	Die per „1 Auswahl von Seite“ geöffnete Seite wird trotz Auswahl eines Feldes nicht geschlossen, es kann ein weiteres Feld ausgewählt werden. Erst dann erfolgt der Rücksprung zur vorigen Seite.
Seite anzeigen	Eine Seite dauerhaft anzeigen.
Startseite anzeigen	Die als Startseite definierte Seite des Vokabulars dauerhaft anzeigen.
vorige Seite anzeigen	Die vorige Seite anzeigen.


# Situationsbilder

Situationsbilder werden häufig in der Therapie eingesetzt. Sie nehmen i. d. R. den gesamten Bildschirm ein. Einzelnen Bereichen des Bildes können individuelle Mitteilungen zugewiesen werden.



## Situationsbild verwenden

### NovaChat-Editor



- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.

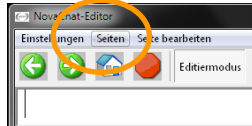

- Wenn Sie für das Situationsbild eine neue Seite anlegen wollen, wählen Sie **Neue Seite**. Wählen Sie eine große Zahl an Feldern (z.B. 16x18), um auch kleinen Details ein Feld zuweisen zu können.
- Haben Sie bereits eine Seite für das Situationsbild angelegt, linksklicken Sie auf der Seite und wählen Sie **öffnen**.

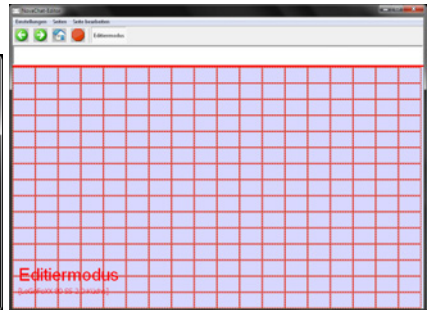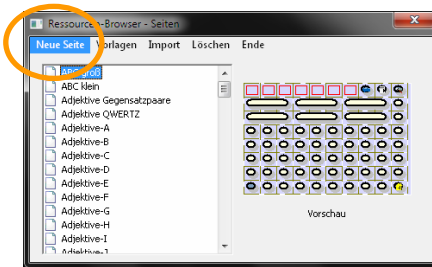


- Wählen Sie das Menü **Seite bearbeiten**. Das Fenster **Seiteneigenschaften** wird angezeigt.

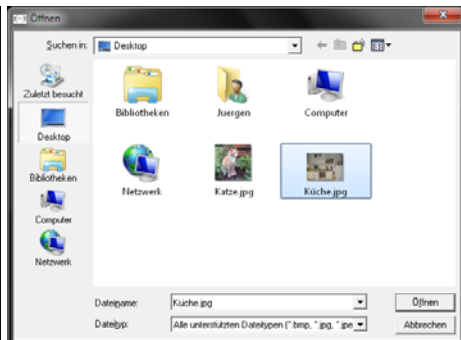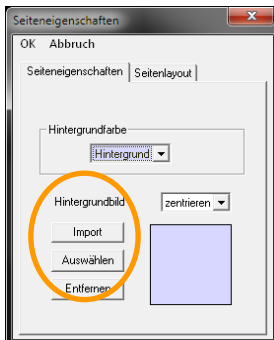

- Um ein Situationsbild zu importieren, wählen Sie **Hintergrundbild: Import**.

- Um ein Situationsbild zu nutzen, das bereits in den Ressourcen vorhanden ist, wählen Sie **Hintergrundbild: Auswählen**.
- Wählen Sie das Bild aus.
- Wählen Sie, ob das Bild in Originalgröße **zentriert** oder auf Displaygröße **gedehnt** werden soll. Je nach Proportion des Bildes kann es sein, dass das Bild nicht das gesamte Display ausfüllt.
- Gestalten Sie die Tastenfelder mit zum Situationsbild geeigneten Aussagen. Achten Sie darauf, bei den Tasteneigenschaften im Bereich Layout die Option **Transparenz** auszuwählen. Soll dem Benutzer ein Hinweis in Textform auf die gespeicherten Mitteilungen gegeben werden, so verwenden Sie dafür **Tastenlabel**.

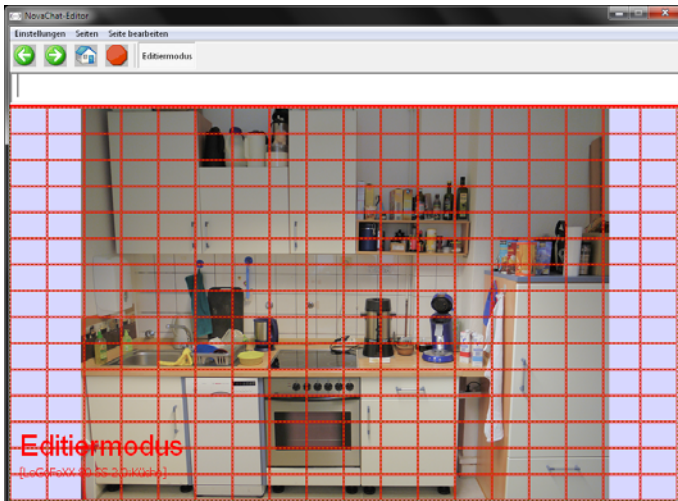

- Legen Sie Felder mit identischer Belegung mit Hilfe der Funktion **Tastengröße ändern** zusammen oder verwenden Sie die Funktion **Taste kopieren** in Verbindung mit **Taste verknüpfen**, um identische Bereiche zu füllen.




## Seite importieren


Existiert eine oder mehrere Seiten, die Sie gerne im aktiven Vokabular hätten, bereits in einem anderen Vokabular des NovaChats, so brauchen Sie sie nicht erneut zu erstellen. Importieren Sie einfach die entsprechenden Seiten.

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.

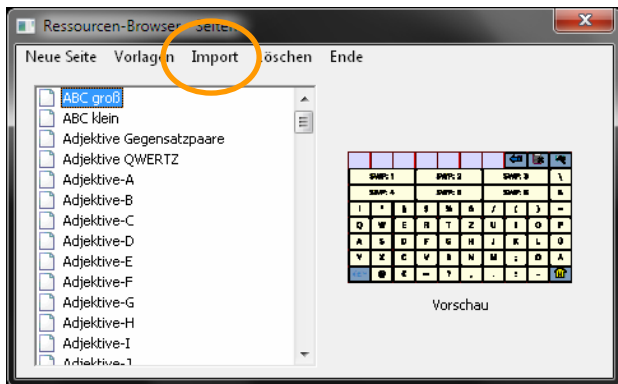

- Wählen Sie die Option **Import**.
- Der Ressourcen-Browser zeigt die Vokabulare und die darin vorhandenen Seiten an.
- Wählen Sie das Vokabular, das die gewünschten Seiten enthält.
- Markieren Sie die zu kopierenden Seiten, indem Sie in das kleine Kästchen links vom Seitennamen klicken.

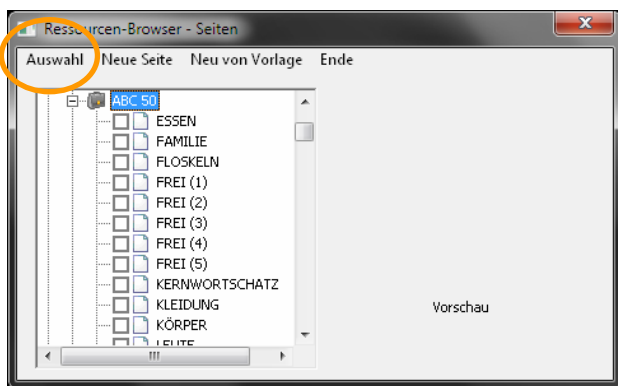

- Wählen Sie **Auswahl**.

## NovaChat-Gerät

· Wechseln Sie in den **Editiermodus**.

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet 

· Wählen Sie **Seiten**



· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet 

· Wählen Sie **Import.**



· Wählen Sie das Vokabular, das die gewünschten Seiten enthält.

· Markieren Sie die zu importierenden Seiten, indem Sie jeweils auf den Namen der Seite tippen.

Vokabulare	Seiten	
ABC 32 <small>Originaldatei</small>	MEDIZIN	<input type="checkbox"/>
ABC 45 <small>Originaldatei</small>	NAMEN	<input type="checkbox"/>
ABC 50 <small>Originaldatei</small>	ORTE	<input type="checkbox"/>
ABC 6 <small>Originaldatei</small>	PFLEGE	<input type="checkbox"/>
EKS für Nova Chat <small>Benutzervokabular</small>	QWERTZ GROSS	<input checked="" type="checkbox"/>
LoGoFoXX 80 SS <small>Originaldatei</small>	QWERTZ GROSS+	<input checked="" type="checkbox"/>
MetaChat <small>Originaldatei</small>	START (WP)	<input type="checkbox"/>
MetaChat Anlaute <small>Originaldatei</small>	START (WP)+	<input type="checkbox"/>
	SÄTZE	<input type="checkbox"/>
	TELEFON	<input type="checkbox"/>

Import   Löschen   Abbruch

2 Einträge ausgewählt.


14:00

· Wählen Sie **Import.**


## Seiten kopieren

Sie können einzelne oder mehrere Seiten von einem in ein anderes Vokabular kopieren. Diese Funktion steht nur im NovaChat-Editor zur Verfügung.

- Öffnen Sie das Menü **Bibliothek**.
- Wählen Sie die Option **Seiten kopieren**.

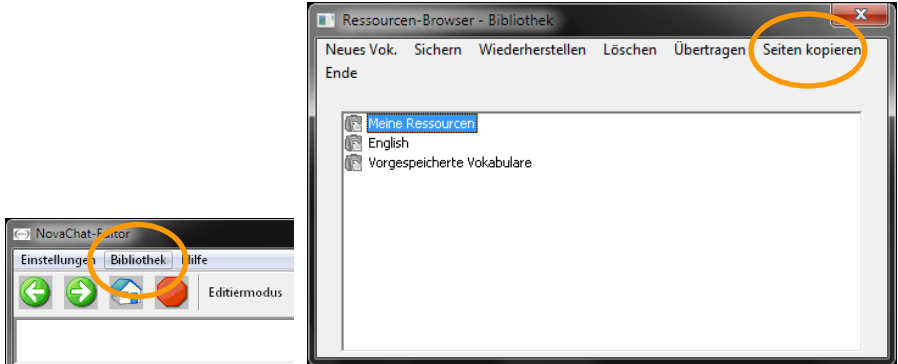

- Das Fenster **Mehrere Seiten kopieren** wird angezeigt.

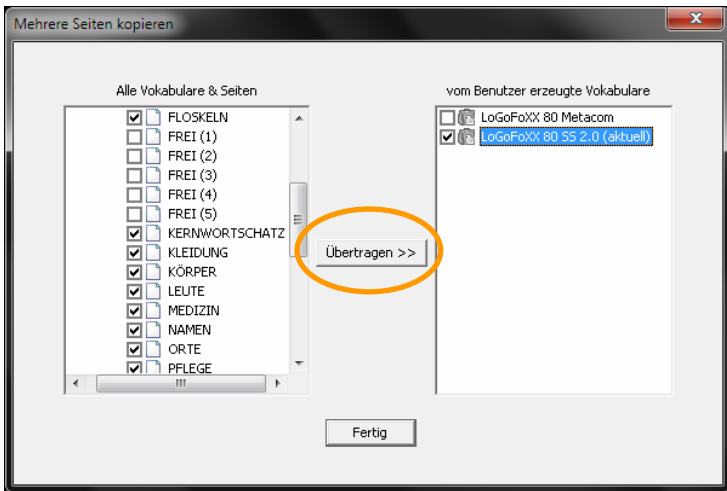

- Wählen Sie im linken Fenster das Vokabular aus, das die Seiten enthält, die Sie kopieren wollen.
- Markieren Sie die zu kopierenden Seiten, indem Sie jeweils in dem Kästchen links neben dem Namen der Seite einen Haken setzen.
- Markieren Sie im rechten Fenster das Vokabular, in das die ausgewählten Seiten kopiert werden sollen.
- Wählen Sie **Übertragen >>**.

## Startseite festlegen

Unter der Startseite versteht man die Seite, die als Ausgangsseite eines jeden Vokabulars dient. Durch Betätigen einer mit der Funktion **Startseite anzeigen** belegten Taste wird die Startseite angezeigt.

Jedes Vokabular muss über eine Startseite verfügen, ansonsten zeigt der NovaChat eine Fehlermeldung an.

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Klicken Sie auf die Seite, die Sie zur Startseite machen wollen.



- Wählen Sie **als Startseite festlegen**.




## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie **Seiten** .

- Tippen Sie auf die Seite, die Sie zur Startseite machen wollen.

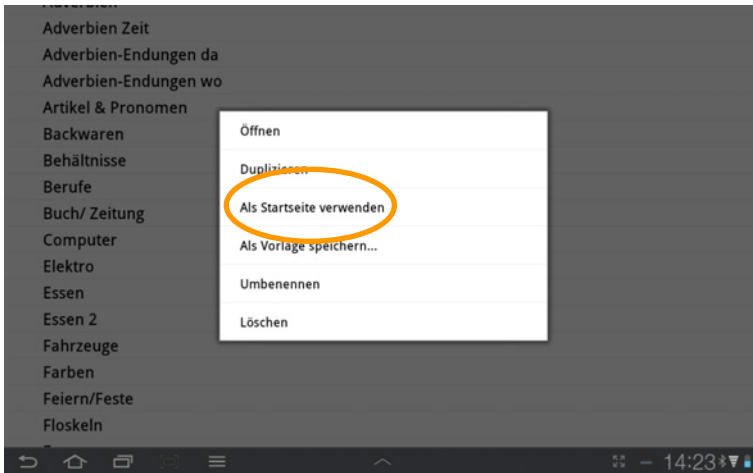


- Wählen Sie **Als Startseite verwenden**.

# Seiten löschen

## Einzelne Seite löschen


### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Linksklicken Sie auf die zu löschende Seite.
- Wählen Sie **Löschen** aus dem Menü.

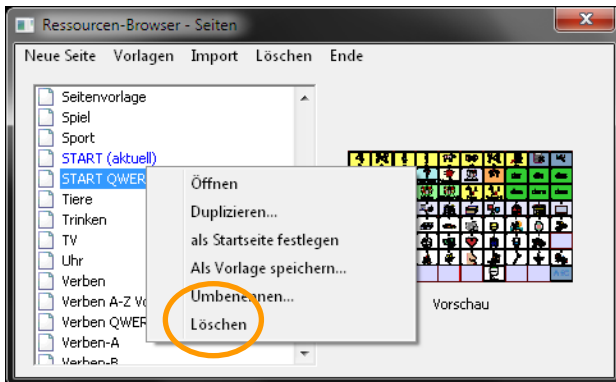

- Bestätigen Sie die **Löschabfrage**.
- Die Seite wird gelöscht.

### NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Tippen Sie auf die zu löschende Seite.
- Wählen Sie **Löschen** aus dem Menü.




- Bestätigen Sie die **Löschabfrage**.
- Die Seite wird gelöscht.


## Mehrere Seiten löschen

### NovaChat-Editor


- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.

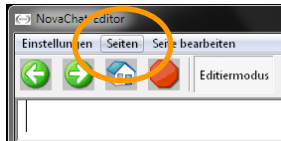

- Wählen Sie die Option **Löschen**.

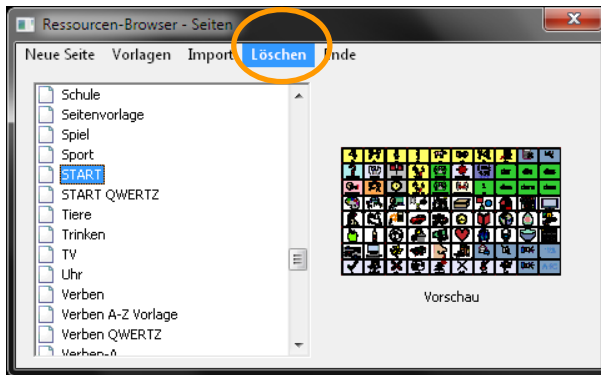

- Das Fenster **Mehrere Seiten löschen** wird angezeigt.
- **Markieren** Sie alle Seiten, die Sie löschen wollen. Klicken Sie dazu jeweils in das kleine Kästchen links neben dem Namen der Seite.

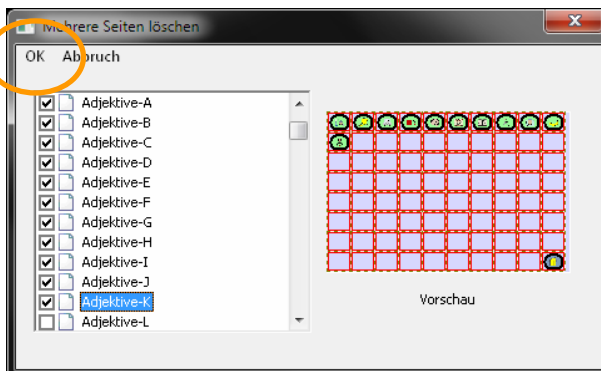


- Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählten Seiten zu löschen.
- Bestätigen Sie die **Löschabfrage**.
- Die Seiten werden gelöscht.

## NovaChat-Gerät


- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet 
- Wählen Sie das Menü **Seiten**.

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet 

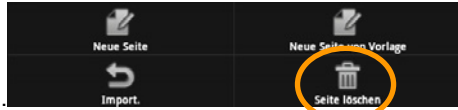

- Wählen Sie das Menü **Seite löschen**.
- Tippen Sie auf die Seiten, die Sie löschen wollen. Die Seiten werden zum Löschen markiert.
- Tippen Sie erneut auf eine Seite, um die Markierung wieder zu entfernen.

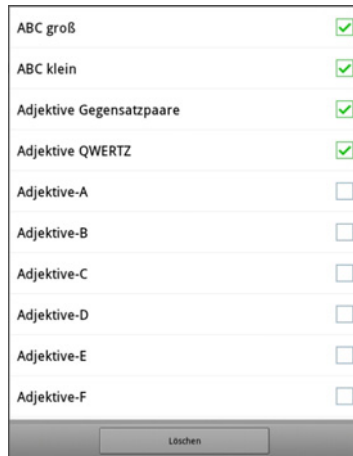

- Tippen Sie auf **Löschen**.
- Bestätigen Sie die **Löschabfrage**.
- Die Seiten werden gelöscht.


# TASTEN BEARBEITEN

## Taste bearbeiten

Die ChatPC-Software bietet zahlreiche Möglichkeiten der Gestaltung der einzelnen Tastenfelder.


### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die Sie bearbeiten wollen.
- Wollen Sie ein leeres Tastenfeld bearbeiten, wählen Sie **Neue Taste erstellen**.
- Wollen Sie ein bestehendes Tastenfeld bearbeiten, wählen Sie **Taste bearbeiten**.

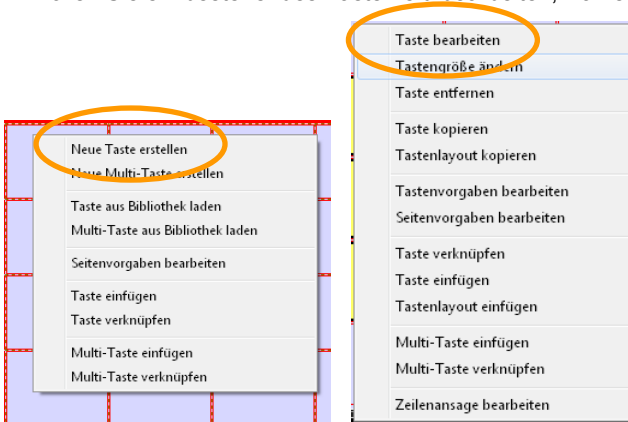

### NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken und halten Sie auf der Taste, die Sie bearbeiten wollen.
- Wollen Sie ein leeres Tastenfeld bearbeiten, wählen Sie **Neue Taste erstellen**.
- Wollen Sie ein bestehendes Tastenfeld bearbeiten, wählen Sie **Taste bearbeiten**.

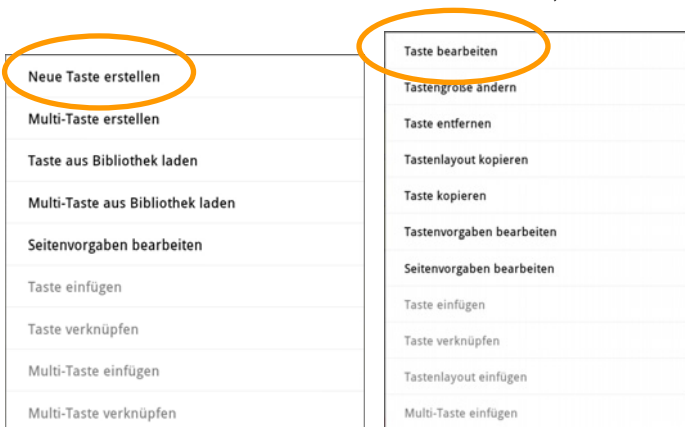


Der Dialog zum Gestalten von Tasten wird angezeigt.

# Tasteneigenschaften – Allgemein

## NovaChat-Editor

Wählen Sie den Reiter **Allgemein**.

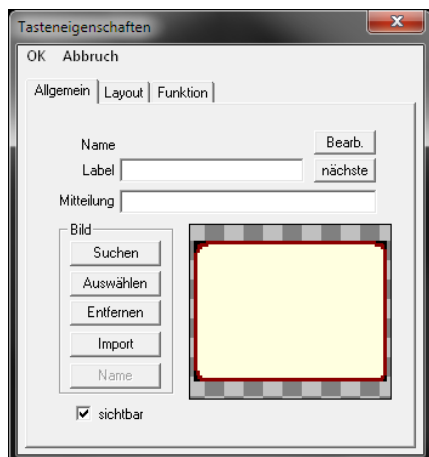

### **Name**

Der Name einer Taste dient dem Wiederfinden der Taste in der Bibliothek. Standardmäßig wird das beim ersten Gestalten der Taste eingegebene Label verwendet. Unter diesem Namen können Sie die Taste dann in der Bibliothek finden. Mit der Taste „Bearb.“ kann der Name geändert werden.

### **Label**


Geben Sie den Text ein, der ober- oder unterhalb des Bildes auf der Taste angezeigt werden soll. Das Label wird standardmäßig in das Feld „Mitteilung“ übertragen. Soll die Taste nur ein Bild anzeigen und keinen Text, lassen Sie das Feld Label leer.

### **Mitteilung**


Geben Sie den Text ein, den die Taste als Mitteilung wiedergeben soll. Soll die Taste keinen Text ausgeben, lassen Sie das Feld Mitteilung leer.

## Bild

- Wählen Sie **Bild – Suchen**, um ein Bild mit Hilfe der Suchfunktion auszuwählen. Das Tastenlabel wird automatisch als Suchbegriff übernommen, dieser kann aber auch manuell eingegeben werden. Jedes Vorkommen des gesuchten Begriffs wird angezeigt, d.h. suchen Sie nach „und“, werden auch Bilder angezeigt, die „Hund“ und „Mund“ heißen. Hinter jedem Symbol steht der Symbolsatz, aus dem es stammt. Wählen Sie **Auswahl**, um das aktuelle Symbol zu übernehmen.

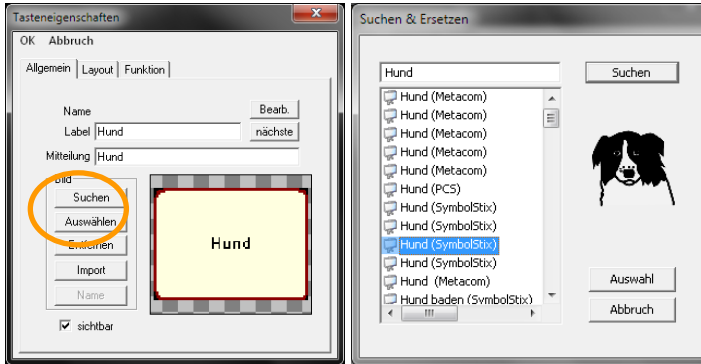


- Wählen Sie **Bild – Auswählen**, um ein Bild manuell auszuwählen.
- Wählen Sie den gewünschten Symbolsatz.
- Wählen Sie die Kategorie.
- Klicken Sie auf ein Symbol, um die Vorschau zu sehen
- Wählen Sie **Auswahl**, um das aktuelle Symbol auszuwählen.

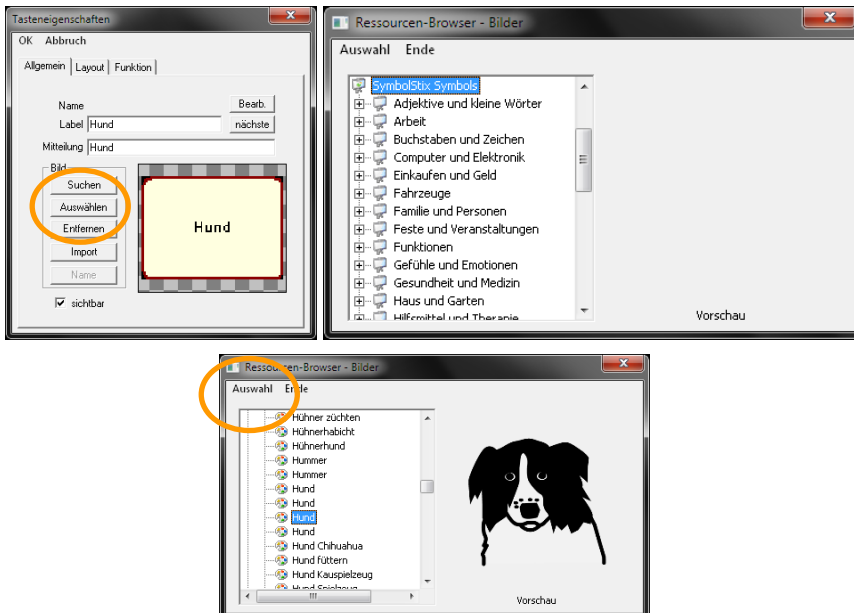




- Wählen Sie **Bild – Entfernen**, um das der Taste derzeit zugewiesene Bild zu entfernen.
- Wählen Sie **Bild – Import**, um ein auf dem PC vorhandenes Bild (Grafik, Symbol, Foto) zu importieren.

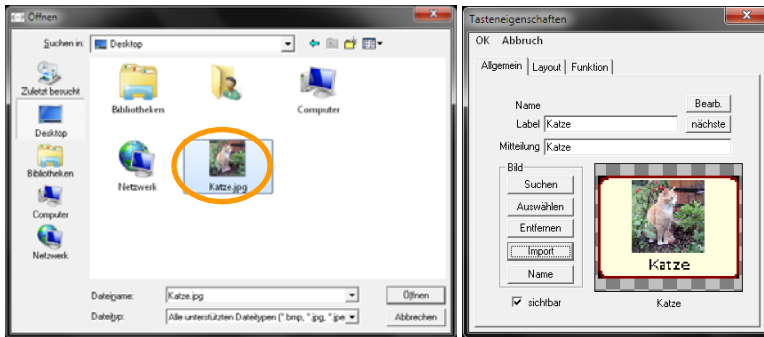

- Wählen Sie **Bild – Name**, um den Bildnamen zu ändern.

Weitere Optionen im Menü Tasteneigenschaften – Allgemein:

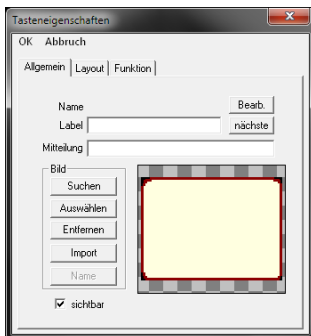

### sichtbar

Legen Sie fest, ob die Taste im Benutzermodus angezeigt wird.

### nächste

Öffnet die nächste Taste zum Bearbeiten.

## NovaChat-Gerät

Wählen Sie den Reiter **Allgemein**.



### Name

Der Name einer Taste dient dem Wiederfinden der Taste. Standardmäßig wird das beim ersten Gestalten der Taste eingegebene Label verwendet. Unter diesem Namen können Sie die Taste dann in den Ressourcen finden. Mittels „Taste bearbeiten“ kann der Name später geändert werden.

### Label



Geben Sie den Text ein, der ober- oder unterhalb des Bildes auf der Taste angezeigt werden soll. Das Label wird standardmäßig in das Feld „Mitteilung“ übertragen. Soll die Taste nur ein Bild anzeigen und keinen Text, lassen Sie das Feld Label leer.

### Mitteilung


Geben Sie den Text ein, den die Taste als Mitteilung wiederggeben soll. Soll die Taste keinen Text ausgeben, lassen Sie das Feld Mitteilung leer.

## Bild


- Wählen Sie **Bild – Laden**, um ein Bild manuell oder mit Hilfe der Suchfunktion auszuwählen. Das Tastenlabel wird automatisch als Suchbegriff übernommen, dieser kann aber auch manuell eingegeben werden.

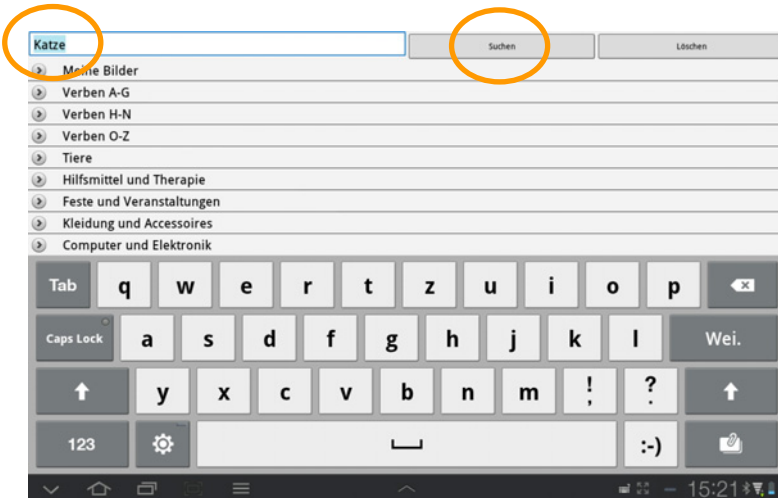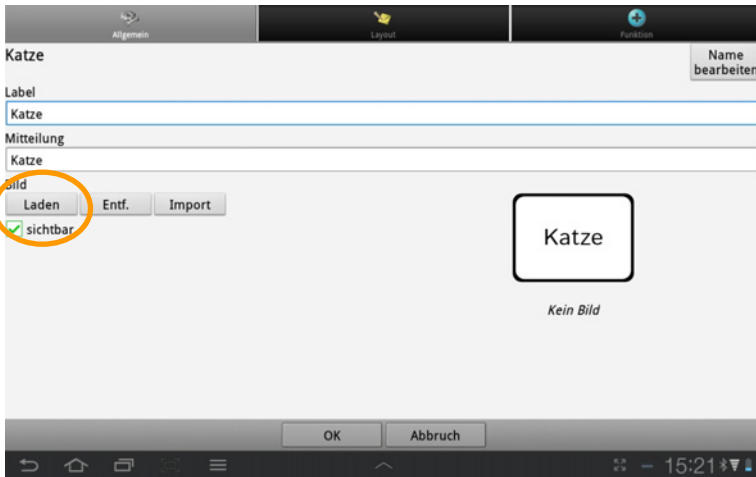

- Wählen Sie **Suchen**, um die Suche über den Namen zu starten. Jedes Vorkommen des gesuchten Begriffs wird angezeigt, d.h. suchen Sie nach „und“, werden auch Bilder angezeigt, die „Hund“ und „Mund“ heißen.

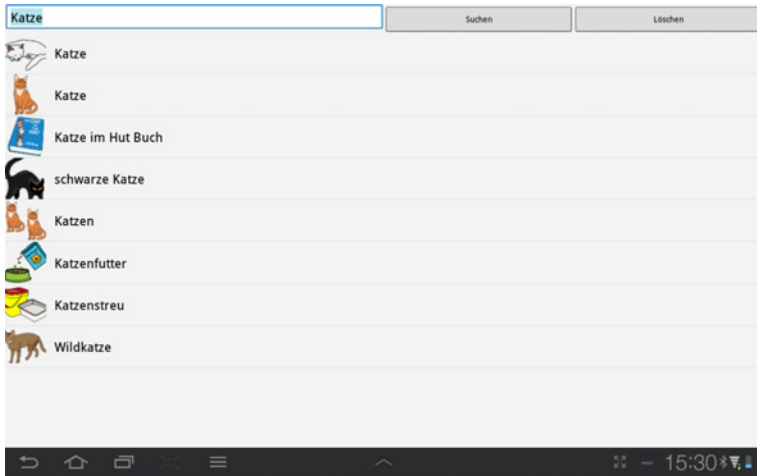


- Alternativ wählen Sie die Kategorie. Wischen Sie nach oben bzw. unten, um in der Liste der Bilder zu scrollen.

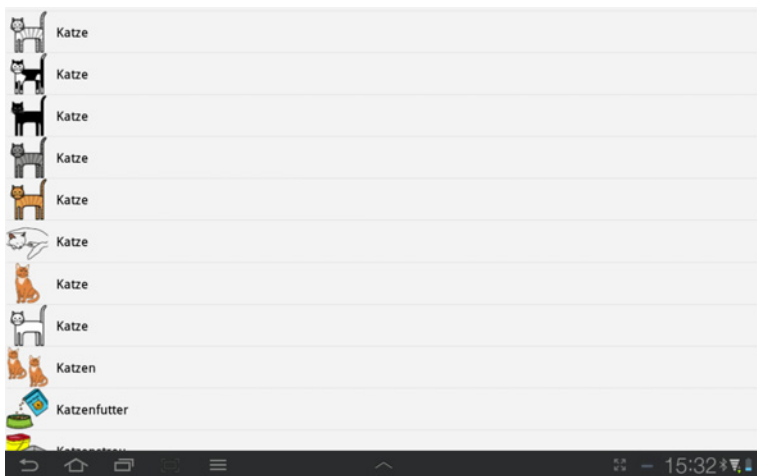


- Tippen Sie auf ein Symbol, um es auszuwählen.


- Tippen Sie auf **Entf.**, um das der Taste derzeit zugewiesene Bild zu entfernen.

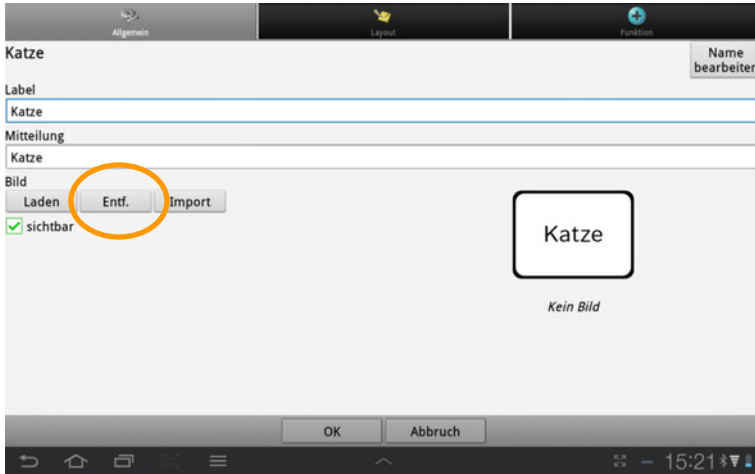

- Wählen Sie **Import**, um ein auf dem Tablet vorhandenes Bild zu importieren.

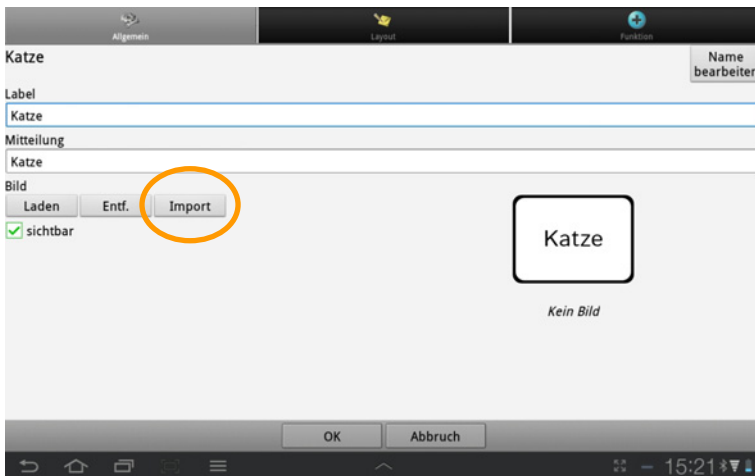


· Auf dem Tablet vorhandene Bilder werden angezeigt:

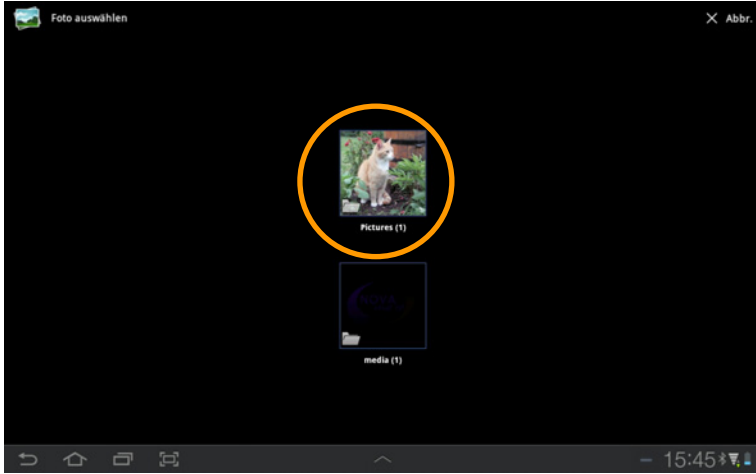


· Tippen Sie auf das Bild, um es auszuwählen

· Geben Sie dem Bild einen Namen:

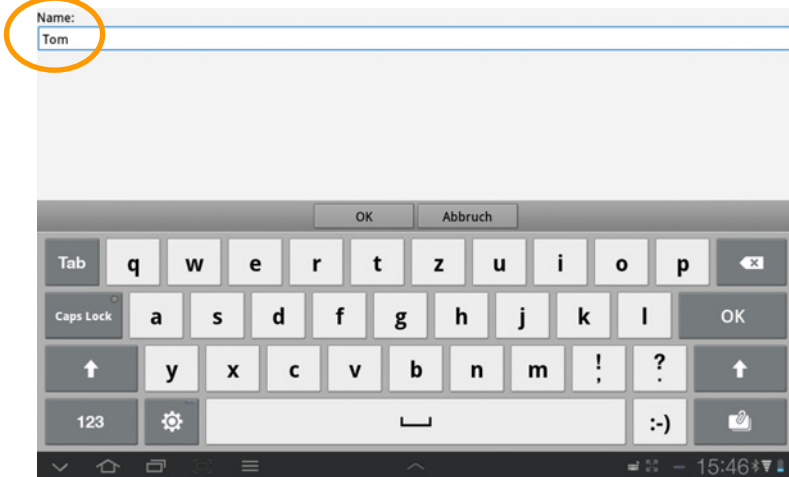

- Das Bild wird auf der Taste angezeigt.

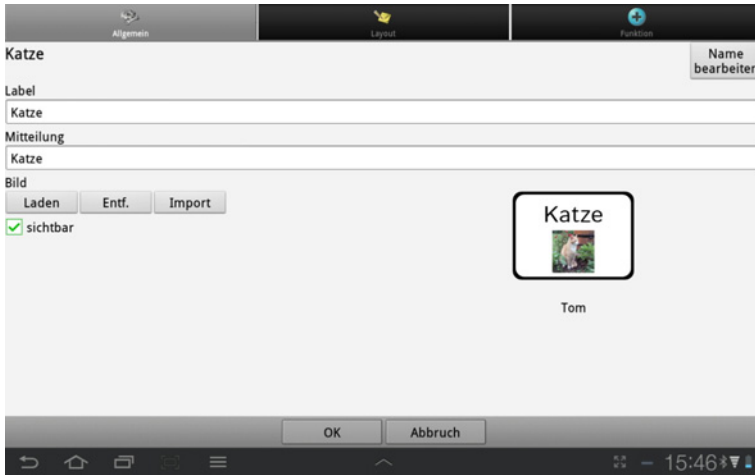

Weitere Optionen im Menü Tasteneigenschaften – Allgemein:


**sichtbar**

Legen Sie fest, ob die Taste im Benutzermodus angezeigt wird.

# Tasteneigenschaften – Layout


## NovaChat-Editor

Wählen Sie den Reiter **Layout**.

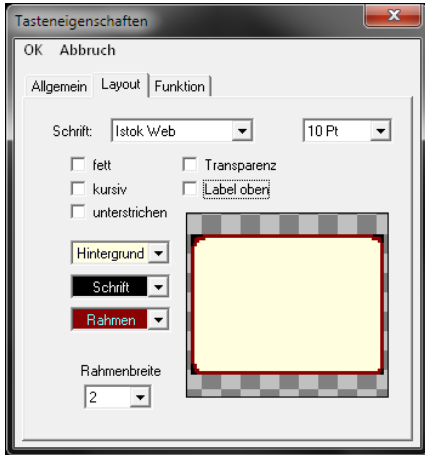


### Schrift

- Wählen Sie Schriftart und Schriftgröße für das Tastenlabel. Je größer die Schrift, desto kleiner wird das Bild angezeigt.

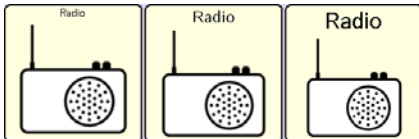

### fett, kursiv, unterstrichen

- Wählen Sie Schriftattribute für das Tastenlabel.

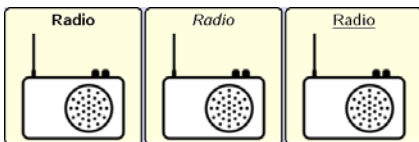

### Transparenz


- Das Bild wird vor leerem Hintergrund angezeigt.






### Label oben

- Das Tastenlabel wird oberhalb des Bildes angezeigt.

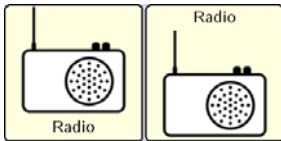


### Hintergrundfarbe

- Wählen Sie eine Farbe für den Hintergrund (entfällt bei transparenter Taste).

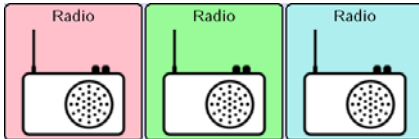


### Schriftfarbe

- Wählen Sie eine Farbe für das Tastenlabel.

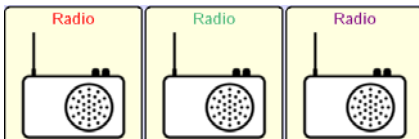


### Rahmenfarbe

- Wählen Sie eine Farbe für den Rahmen um die Taste (entfällt bei transparenter Taste und bei Rahmenbreite 0 Pt).

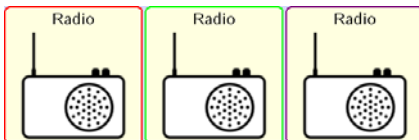

### Rahmenbreite

- Wählen Sie eine Stärke für den Tastenrahmen (0 - 7 Pt).

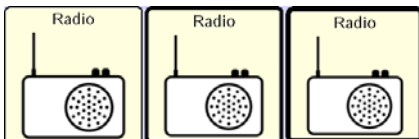


## NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf den Reiter **Layout**.




### Schrift

- Wählen Sie Schriftart und Schriftgröße für das Tastenlabel.

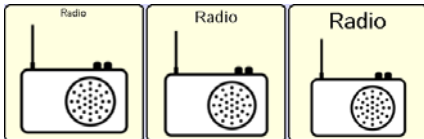


### fett, kursiv, unterstrichen

- Wählen Sie Schriftattribute für das Tastenlabel.

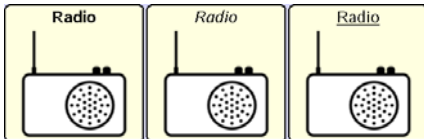


### Farbe – Hintergrund

- Wählen Sie eine Farbe für den Hintergrund (entfällt bei transparenter Taste).

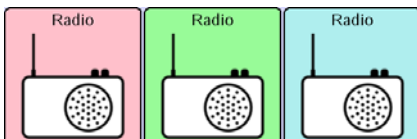


### Farbe – Schrift

- Wählen Sie eine Farbe für das Tastenlabel.

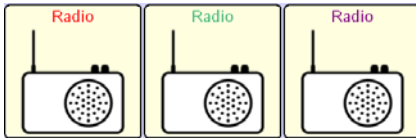


### Farbe – Rahmenfarbe

- Wählen Sie eine Farbe für den Rahmen um die Taste (entfällt bei transparenter Taste und bei Rahmenbreite 0 Pt).

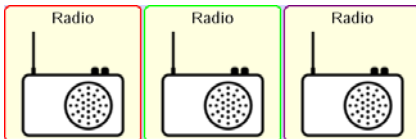


### Rahmenbreite

- Wählen Sie eine Stärke für den Tastenrahmen (0 - 7 Pt).

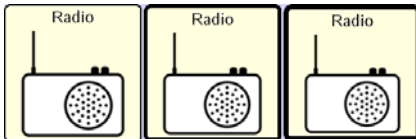


### Transparenz

- Das Bild wird vor leerem Hintergrund angezeigt.

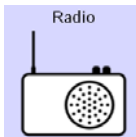

### Label oben


- Das Tastenlabel wird oberhalb des Bilds angezeigt.

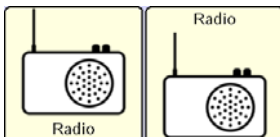



# Tasteneigenschaften – Funktion

## NovaChat-Editor

Hier können Sie der Taste eine oder mehrere Funktionen zuweisen. Alle einer Taste zugewiesenen Funktionen werden ausgeführt, sobald die Taste aktiviert wird. Eine Übersicht über die Funktionen finden Sie auf Seite 70.

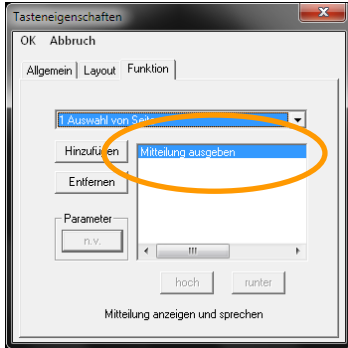

Standardmäßig ist die Funktion „Mitteilung ausgeben“ enthalten. Sie sorgt dafür, dass die der Taste zugewiesene Mitteilung im Textfenster angezeigt und gesprochen wird. Wollen Sie eine andere Funktion ausführen oder weitere Funktionen hinzufügen, so öffnen Sie die Auswahlliste:

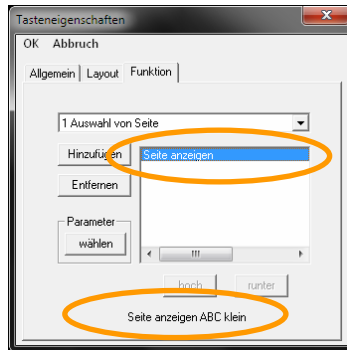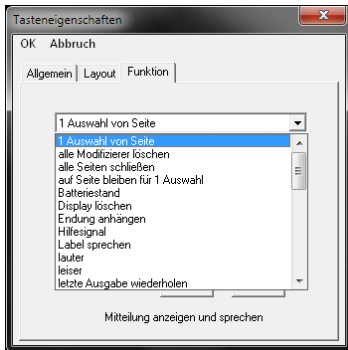

Klicken Sie auf die gewünschte Funktion und klicken Sie auf **Hinzufügen**.


Haben Sie der Taste mehr als eine Funktion zugewiesen, so können Sie mit Hilfe der Tasten **hoch** und **runter** die Reihenfolge ändern, in der die Funktionen abgearbeitet werden.

Wollen Sie eine Funktion entfernen, markieren Sie sie und wählen Sie dann **Entfernen**.



Manche Funktionen haben zusätzliche Parameter, z.B. die anzuzeigende Seite bei der Funktion „Seite anzeigen“. Wollen Sie beispielsweise eine andere Seite anzeigen, so brauchen Sie die Funktion nicht zu löschen. Markieren Sie sie einfach und klicken Sie auf **Parameter wählen**, um eine andere Seite auszuwählen.

## NovaChat-Gerät

Tippen Sie auf den Reiter „Funktion“. Hier können Sie der Taste eine oder mehrere Funktionen zuweisen. Alle einer Taste zugewiesenen Funktionen werden ausgeführt, sobald die Taste aktiviert wird.

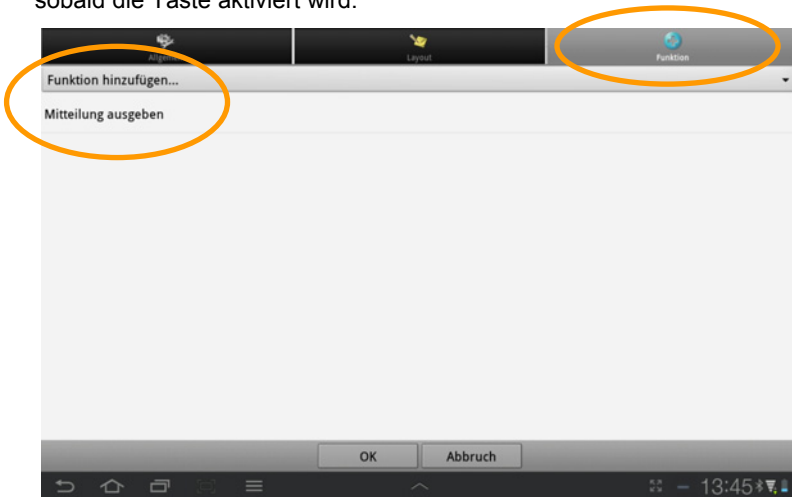

Standardmäßig ist die Funktion „Mitteilung ausgeben“ enthalten. Sie sorgt dafür, dass die der Taste zugewiesene Mitteilung im Textfenster angezeigt und gesprochen wird. Wollen Sie eine andere Funktion ausführen oder weitere Funktionen hinzufügen, so öffnen Sie die Auswahlliste:

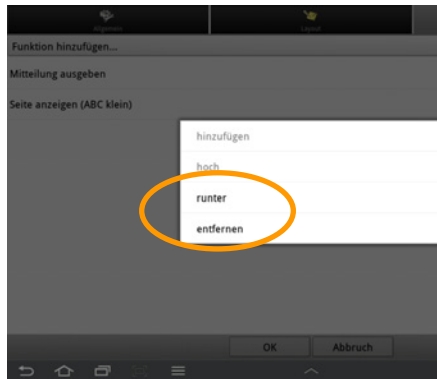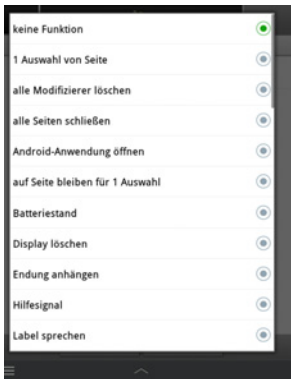

Wählen Sie die gewünschte Funktion durch Tippen aus. Das Kontextmenü wird angezeigt. Wählen Sie **hinzufügen**. Eine Übersicht über die Funktionen finden Sie auf Seite 70.

Haben Sie der Taste mehr als eine Funktion zugewiesen, so können Sie die Reihenfolge ändern, in der die Funktionen abgearbeitet werden. Weiterhin können Sie Funktionen entfernen. Tippen und Halten Sie auf der Funktion, deren Reihenfolge Sie ändern oder die Sie entfernen wollen, bis das Kontextmenü angezeigt wird. Wählen Sie **hoch**, **runter** oder **entfernen**.

## Übersicht Tastenfunktionen

**1 Auswahl von Seite:** öffnet eine Seite für die Auswahl einer Taste, danach erfolgt automatisch der Rücksprung zur vorigen Seite (siehe S. 41).

**alle Modifizierer schließen:** schließt alle noch gesetzten Modifizierer (siehe Multi-Taste)

**alle Seiten schließen:** schließt alle über die Funktion „1 Auswahl von Seite“ geöffneten Seiten.

**auf Seite bleiben für 1 Auswahl:** verhindert den Rücksprung zur vorigen Seite von einer nur für eine Auswahl geöffneten Seite. Der Rücksprung erfolgt erst nach einer weiteren Auswahl.

**Batteriestand:** Anzeige der verbleibenden Kapazität der Akkus im Textfenster und per Sprachausgabe.

**Display löschen:** löscht den Inhalt des Textfensters

**Endung anhängen:** Erlaubt das Anhängen einer Endung (-er, -e, -es, -em, -en) zum Deklinieren von Adjektiven und Pronomen (siehe S. 105).

**Hilfssignal:** aktiviert einen Rufton, der genutzt werden kann, um um Hilfe zu rufen

**Label sprechen:** das Tastelabel wird gesprochen

**lauter:** erhöht die Lautstärke um eine Stufe

**leiser:** verringert die Lautstärke um eine Stufe

**letzte Ausgabe wiederholen:** wiederholt die letzte Sprachausgabe

**letzte Eingabe sprechen:** wiederholt die zur letzten Eingabe gehörende Mitteilung

**Mitteilung anzeigen:** die zur Taste gehörende Mitteilung wird nur im Textfenster angezeigt, nicht gesprochen

**Mitteilung ausgeben:** die zur Taste gehörende Mitteilung wird angezeigt und gesprochen

**Mitteilung sprechen:** die zur Taste gehörende Mitteilung wird nur gesprochen, aber nicht im Textfenster angezeigt

**Modifizierer anwenden:** Setzt einen der 20 Modifizierer (siehe S. 84)

**Profil laden:** ermöglicht das Auswählen eines Benutzer-Profiles (siehe S. 146)

**Seite anzeigen:** wechselt zu einer Seite (siehe S. 40)

**Sound aufnehmen:** ermöglicht die Aufnahme einer Sound-Datei (siehe S. 99)

**Sound wiedergeben:** ermöglicht die Wiedergabe einer Sound-Datei (siehe S. 95)

**Sprache ein/aus:** wechselt zwischen Sprachausgabe aus und voriger Lautstärke

**Sprechen:** spricht den aktuellen Inhalt des Textfensters

**Startseite anzeigen:** springt zur Startseite des aktuellen Vokabulars

**statische Wortvorhersage:** macht die Taste zum Vorschlagsfeld für die statische Wortvorhersage. Wählen Sie, welcher Vorschlag angezeigt werden soll (1-10) (siehe S. 141).

**statische Zeichenvorhersage:** macht die Taste zum Vorschlagsfeld für die statische Zeichenvorhersage. Wählen Sie, welcher Vorschlag angezeigt werden soll (1-10) (siehe S. 141).

**Stopp:** bricht die aktuelle Sprachausgabe ab

**Text auf Taste speichern:** ermöglicht das Speichern des aktuellen Inhalts des Textfenster auf einer Taste (siehe S. 119)

**Textfenster – Text einfügen:** der in der Zwischenablage vorhandene Text wird in das Textfenster eingefügt (siehe S. 122)

**Textfenster – Text freigeben:** der im Textfenster vorhandene Text wird an eine der im NovaChat-Gerät für „Freigabe“ konzipierten Anwendungen geschickt (siehe S. 122)

**Textfenster – Text kopieren:** der im Textfenster vorhandene Text wird in die Zwischenablage kopiert (siehe S. 122)

**Textfenster laden:** ermöglicht das Laden eines Textes aus einer Datei zur direkten Anzeige im Textfenster (siehe S. 121)

**Textfenster speichern:** ermöglicht das Speichern des aktuellen Inhalts des Textfensters in einer Datei (siehe S. 119)

**vorige Seite anzeigen:** springt zur vorigen Seite zurück

**Wort löschen:** löscht das Wort links vom Cursor

**Zeichen löschen:** löscht das Zeichen links vom Cursor

**Zeit/Datum anzeigen:** Zeit und Datum werden im Textfenster angezeigt und gesprochen

## Tastenmakro (mehrere Funktionen ausführen)


Der NovaChat bietet die Möglichkeit, einer Taste mehrere Funktionen zuzuweisen. Sämtliche zugewiesene Funktionen werden beim Betätigen der Taste nacheinander abgearbeitet. Man spricht von einem „Tastenmakro“.

Eine Taste könnte z. B. folgende 3 Funktionen enthalten:

- 1) Das Textfenster wird gelöscht.
- 2) Die Aussage „Was möchten Sie zu trinken haben? Ich hätte...“ wird gesprochen.
- 3) Es wird auf die Seite „Getränke“ gewechselt, um dort weitere Wörter abzurufen.

### Einer Taste ein Makro zuweisen

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die das Makro enthalten soll.
- Wählen Sie **Taste bearbeiten**.
- Geben Sie die gewünschte Mitteilung ein, z.B.: „Was möchten Sie zu trinken haben? Ich hätte“.
- Gestalten Sie die Taste nach Ihren Wünschen (Reiter *Allgemein* und *Layout*).
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Die Funktion **Mitteilung ausgeben** ist bereits hinterlegt. Öffnen Sie die Auswahlliste und wählen Sie die Funktion **Display löschen**. Klicken Sie auf **hinzufügen**.
- Öffnen Sie die Auswahlliste und wählen Sie die Funktion **Seite anzeigen**. Klicken Sie auf **hinzufügen**.
- Der Ressourcen-Browser zeigt die vorhandenen Seiten an. Wählen Sie die Seite (z.B. **TRINKEN**) und bestätigen Sie mit **Auswahl**.
- Um die Reihenfolge der Funktionen zu ändern, markieren Sie eine Funktion und wählen Sie dann **hoch** oder **runter**. Platzieren Sie „Display löschen“ ganz oben.
- Um eine Funktion zu löschen, markieren Sie die Funktion und wählen Sie dann **Entfernen**.
- Manche Funktionen haben weitere Parameter (z.B. gehört zu **Seite anzeigen** die anzuzeigende Seite). Markieren Sie eine Funktion, um die zugehörigen Parameter anzuzeigen zu bekommen. Wählen Sie **Parameter**, um den Parameter zu ändern.

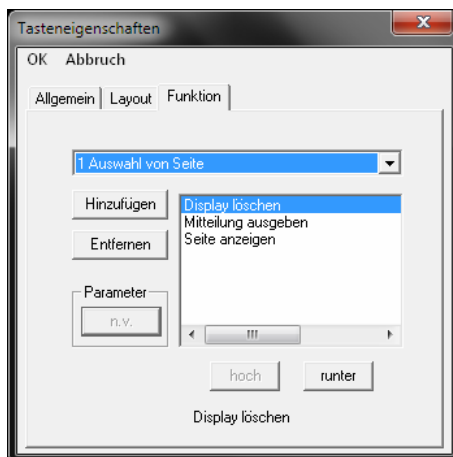

- Wählen Sie OK, wenn Sie alle Funktionen des Makros eingegeben haben.



# Tasten mehrfach verwenden


Eine einmal erstellte Taste kann mehrfach auf derselben oder auf anderen Seiten verwendet werden. Der NovaChat verfügt über mehrere Arten, eine Taste mehrfach zu verwenden.

## Taste aus Bibliothek laden


Alle existierenden Tasten sind in der Bibliothek vorhanden.

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der zu belegenden Taste.
- Wählen Sie **Taste aus Bibliothek laden**. Der Ressourcen-Browser öffnet sich.

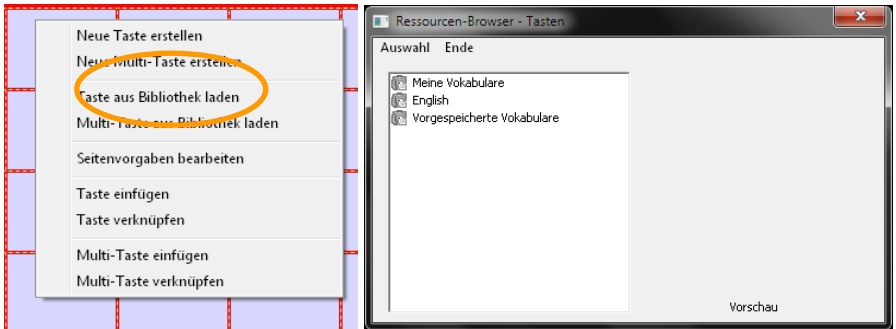

- Wählen Sie im Ressourcen-Browser das Vokabular und die Seite aus, die die Taste enthält, die Sie kopieren wollen

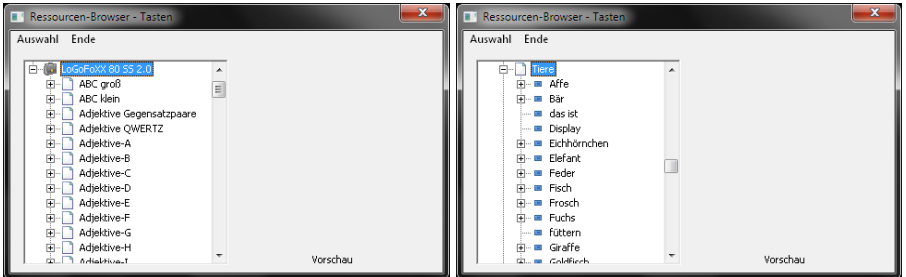


- Wählen Sie die gewünschte Taste aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Auswahl**.


Die neue Taste ist lediglich eine Kopie der ursprünglichen Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste.
- Wählen Sie **Taste aus Bibliothek laden**

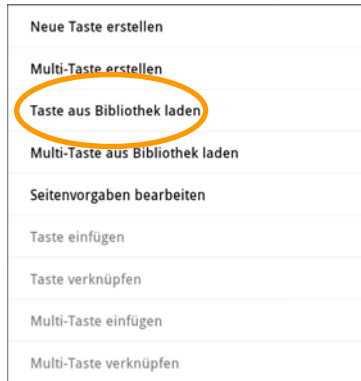

- Der Ressourcen-Browser öffnet sich.
- Wählen Sie im Ressourcen-Browser das Vokabular und die Seite aus, die die Taste enthält, die Sie kopieren wollen:

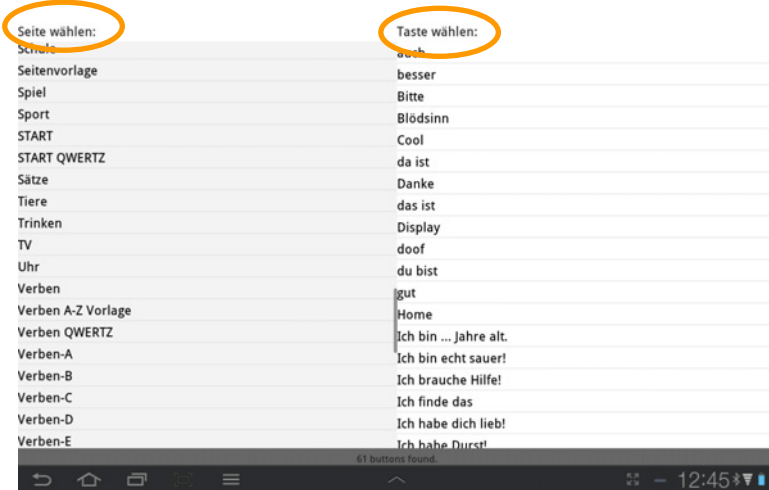

- Wählen Sie die gewünschte Taste durch Tippen aus.


Die neue Taste ist lediglich eine Kopie der ursprünglichen Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

## Taste kopieren


Sie können jede Taste kopieren und an einer anderen Stelle einfügen.

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.

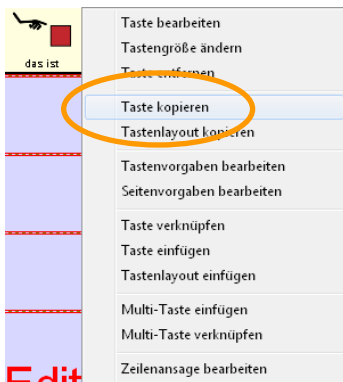


- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste eingefügt werden soll.
- Rechtsklicken Sie auf das Tastenfeld, auf dem die Taste eingefügt werden soll.
- Wählen Sie **Taste einfügen**.

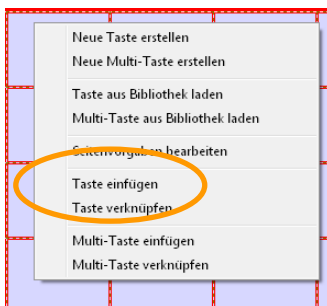


Die neue Taste ist lediglich eine Kopie der ursprünglichen Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.

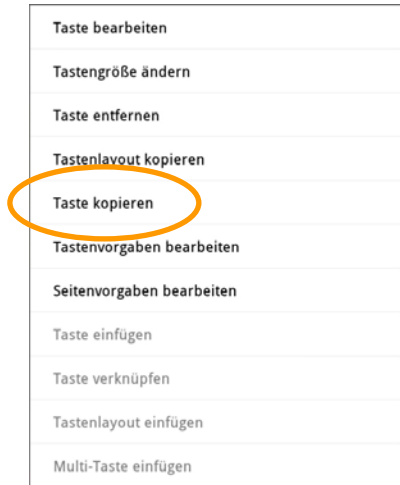

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste eringefügt werden soll.
- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, auf dem die Taste eingefügt werden soll.
- Wählen Sie **Taste einfügen**.

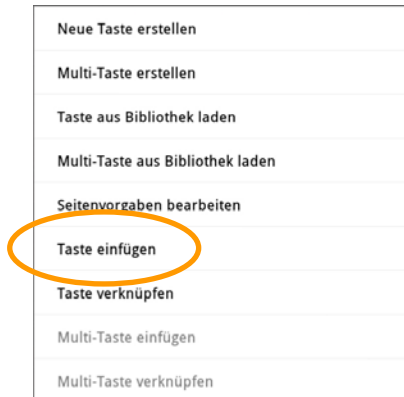


Die neue Taste ist lediglich eine Kopie der ursprünglichen Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

## Taste verknüpfen


Während über „Taste einfügen“ eine Kopie einer Taste erzeugt wird, ermöglicht die Funktion „Taste verknüpfen“ das mehrfache Nutzen derselben Taste. Ändern Sie das Original, ändern sich alle verknüpften Kopien entsprechend. Dies ist z. B. sinnvoll, wenn Sie eine Taste mehrfach verwenden und möchten, dass diese Taste stets gleich aussieht. Ändern Sie die Taste, so ändern sich alle verknüpften Kopien automatisch mit.

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.

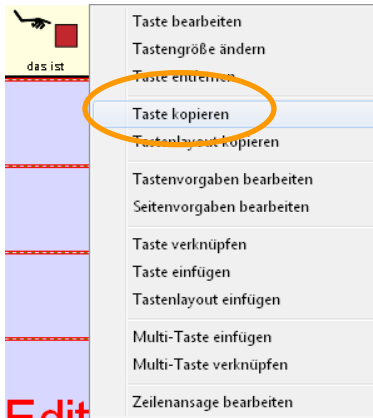

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste eingefügt werden soll.
- Rechtsklicken Sie auf das Tastenfeld, auf dem die Taste eingefügt werden soll.
- Wählen Sie **Taste verknüpfen**.

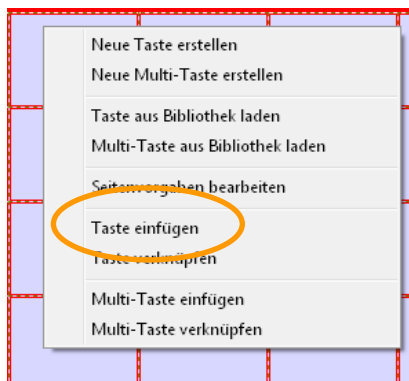


Die neue Taste ist direkt mit der ursprünglichen verknüpft. Ändern Sie die Taste, ändern sich alle verknüpften Kopien automatisch mit.

## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.



- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste eringefügt werden soll.
- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, auf dem die Taste eingefügt werden soll.
- Wählen Sie **Taste verknüpfen**.

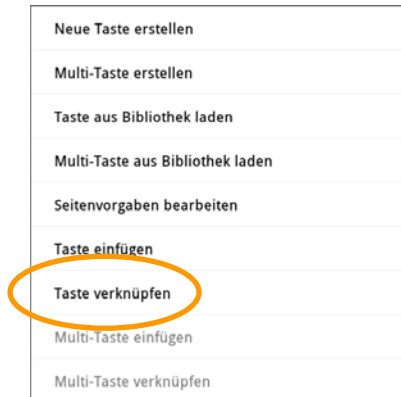


Die neue Taste ist direkt mit der ursprünglichen verknüpft. Ändern Sie die Taste, ändern sich alle verknüpften Kopien automatisch mit.

## Tastenlayout übertragen


Sie können das Erscheinungsbild (Hintergrundfarbe, Labelschriftart, -größe, -farbe, Rahmenfarbe und -stärke) einer Taste ganz einfach auf eine andere übertragen. Der Inhalt der Taste (Mitteilung, Label, Bild, Funktion) wird dabei nicht berücksichtigt.

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, deren Layout Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Tastenlayout kopieren**.

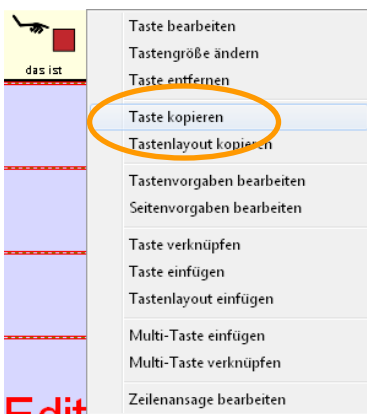

- Rechtsklicken Sie auf das Tastenfeld, das das Tastenlayout erhalten soll.
- Wählen Sie **Tastenlayout einfügen**.

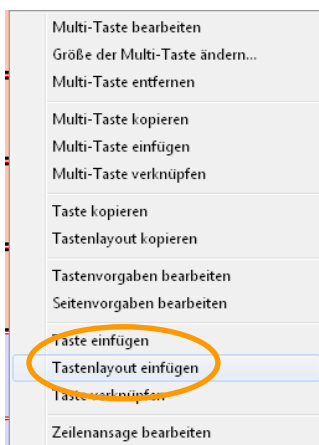


- Das Layout wird übertragen.


Das Tastenlayout bleibt gespeichert und kann daher auf weitere Tasten übertragen werden, ohne dass Sie es erneut kopieren müssen.

## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, deren Layout Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Tastenlayout kopieren**.

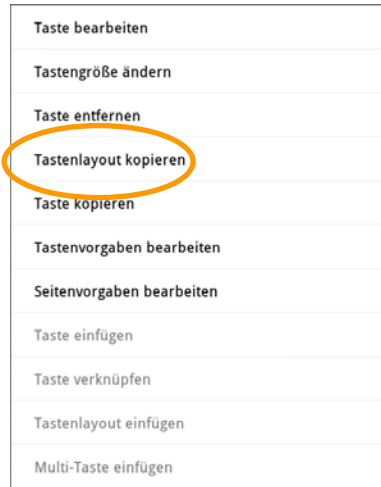

- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, das das Tastenlayout erhalten soll.
- Wählen Sie **Tastenlayout einfügen**.

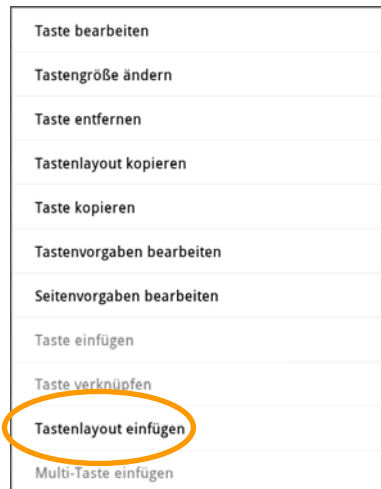

- Das Layout wird übertragen.

Das Tastenlayout bleibt gespeichert und kann daher auf weitere Tasten übertragen werden, ohne dass Sie es erneut kopieren müssen.




# Tastengröße ändern



Sie können die Größe von Tasten ändern. Eine Taste kann sich über mehrere Zeilen und Spalten erstrecken. Darunter liegende Tasten werden ausgeblendet und sind nicht erreichbar, bleiben aber mit ihren Definitionen erhalten. Tasten werden nach grundsätzlich rechts und nach unten vergrößert, d. h. Tasten in der ganz rechten Spalte können nicht in der Breite und Tasten in der untersten Zeile nicht in der Höhe verändert werden.

## NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, deren Größe Sie ändern wollen.
- Wählen Sie **Tastengröße ändern**.

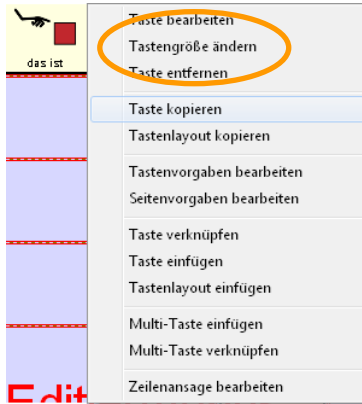

- Geben Sie ein, über wie viele Spalten (Wert: **Horizontal**) und Zeilen (Wert: **Vertikal**) sich die Taste erstrecken soll.

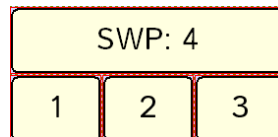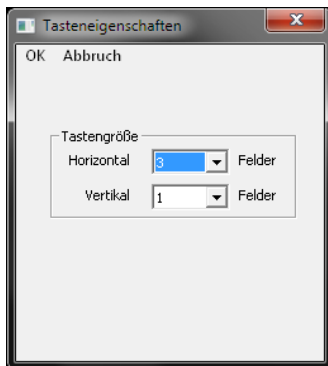


- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.


Wenn Sie die Größe der Taste wieder auf die ursprüngliche Größe reduzieren (1 Feld breit und 1 Feld hoch), werden die darunter liegenden Felder wieder sicht- und benutzbar.

## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Tippen und halten Sie auf der Taste, deren Größe Sie ändern wollen.
- Wählen Sie **Tastengröße ändern**.

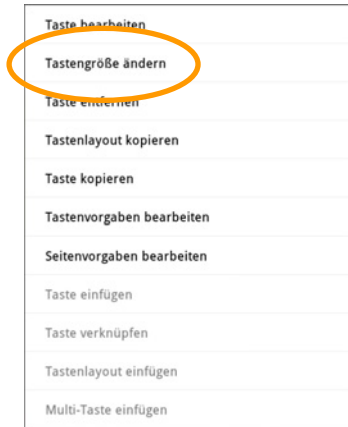

Geben Sie ein, über wie viele Zeilen (Wert: **Vertikale Zellen**) und Spalten (Wert: **Horizontale Zellen**) und sich die Taste erstrecken soll:

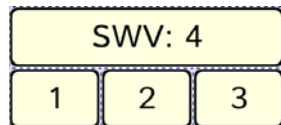A dialog box for configuring a grid. It has two input fields: 'Vertikale Zellen' with the value '1' and 'Horizontale Zellen' with the value '3'. At the bottom, there are 'OK' and 'Abbruch' buttons.

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.



Wenn Sie die Größe der Taste wieder auf die ursprüngliche Größe reduzieren (1 Feld breit und 1 Feld hoch), werden die darunter liegenden Felder wieder sicht- und benutzbar.

## Taste entfernen

Die Funktion **Taste entfernen** entfernt die ausgewählte Taste von der aktuellen Seite. Die Taste bleibt jedoch in der Bibliothek erhalten.

### NovaChat-Editor


- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die Sie löschen möchten.
- Wählen Sie **Taste entfernen**.

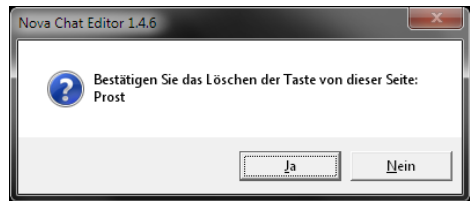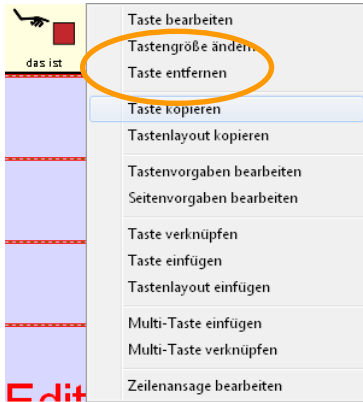

- Bestätigen Sie den Löschvorgang.

### NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, die Sie löschen möchten. Das Kontextmenü öffnet sich.
- Wählen Sie **Taste entfernen**.

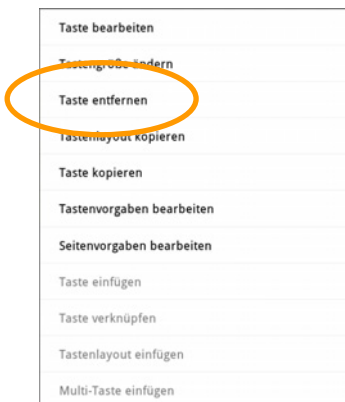

- Bestätigen Sie den Löschvorgang.

## Multi-Tasten

Multi-Tasten sind Tasten mit bis zu 20 Belegungen. Die jeweils aktive Belegung hängt davon ab, welcher Modifizierer gesetzt ist.

Es gibt folgende 20 Modifizierer:

- |             |        |         |         |
|-------------|--------|---------|---------|
| · kein      | · Fn 1 | · Fn 6  | · Fn 11 |
| · Groß      | · Fn 2 | · Fn 7  | · Fn 12 |
| · Strg      | · Fn 3 | · Fn 8  | · Fn 13 |
| · Groß fest | · Fn 4 | · Fn 9  | · Fn 14 |
| · Num fest  | · Fn 5 | · Fn 10 | · Fn 15 |

Die Modifizierer *Groß*, *Strg*, *Groß fest* und *Num fest* sind für das Gestalten von Schriftseiten vorgesehen.

Die Modifizierer *Groß fest* und *Num fest* bleiben bestehen und müssen manuell zurückgesetzt werden. Alle anderen Modifizierer werden mit der nächsten Taste automatisch zurückgesetzt.

Multi-Tasten können neu oder von einer Vorlage erstellt oder kopiert werden.

Hinweis: in Vokabularen wie *LoGoFoXX* werden Modifizierer zum Bilden der Grammatik verwendet.


## Multi-Tasten benutzen

- Ist kein Modifizierer gesetzt, zeigt eine Multi-Taste die Grundbelegung (die für „kein Modifizierer“ definierte Belegung) an.
- Speichern Sie auf einer Taste den Befehl **Modifizierer anwenden** mit dem gewünschten Modifizierer, um die entsprechende Belegung einer Multi-Tasten sichtbar zu machen.
- Setzen Sie den Modifizierer, indem Sie Taste auswählen.
- Die Seite zeigt die zugehörige Belegung der Multi-Taste(n) an. Hat eine Multi-Taste für den gewählten Modifizierer keine Belegung, bleibt das Tastenfeld leer.
- Wählen Sie eine Taste. Der Modifizierer wird zurückgesetzt, die Seite zeigt wieder die Grundbelegungen aller Multi-Tasten an.
- Die Modifizierer *Groß fest* und *Num fest* setzen sich nicht automatisch nach der Auswahl der nächsten Taste wieder zurück, sondern müssen manuell zurückgesetzt werden.

## Eine Multi-Taste erstellen

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf dem Tastenfeld.
- Wählen Sie **Neue Multi-Taste erstellen**.


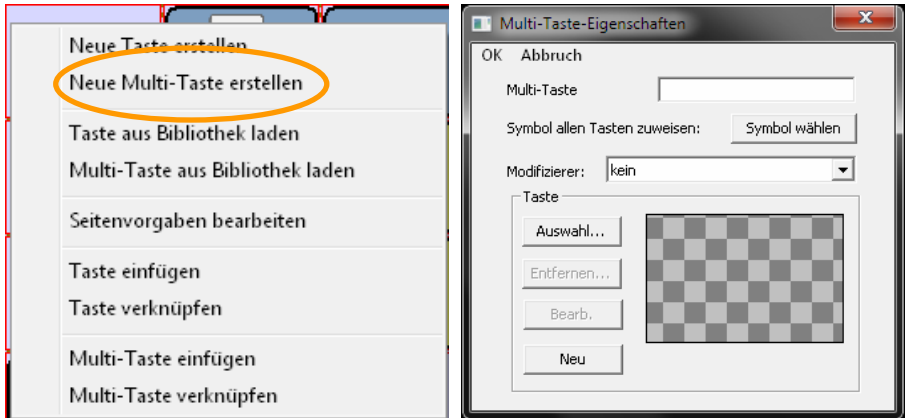


- Geben Sie der Multi-Taste einen Namen.
- Wählen Sie den Modifizierer.
- Gestalten Sie die Multi-Taste für den gewählten Modifizierer. Die Gestaltung der Belegungen erfolgt analog zur Gestaltung einer normalen Taste.
- Fahren Sie mit der Gestaltung der Multi-Taste fort, bis Sie alle gewünschten Modifizierer belegt haben.

Mit der Funktion **Symbol allen Tasten zuweisen** können Sie allen belegten Ebenen einer Multi-Taste das gleiche Bild zuweisen.

## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der zu belegenden Taste, bis sich das Kontextmenü öffnet.
- Wählen Sie **Neue Multi-Taste erstellen**.

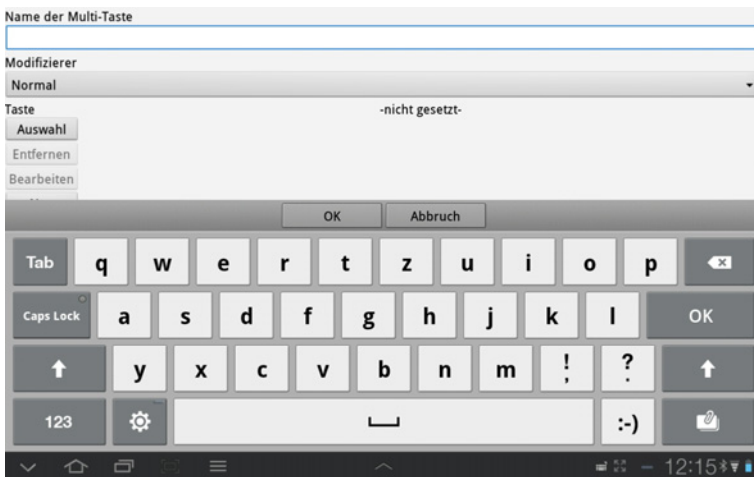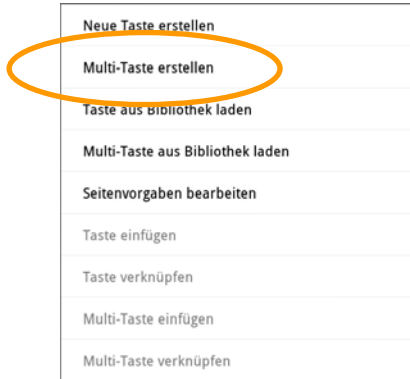

- Geben Sie der Multi-Taste einen Namen
- Wählen Sie den Modifizierer.
- Gestalten Sie die Multi-Taste für den gewählten Modifizierer. Die Gestaltung der Belegungen erfolgt analog zur Gestaltung einer normalen Taste.
- Fahren Sie mit der Gestaltung der Multi-Taste fort, bis Sie alle gewünschten Modifizierer belegt haben.


## Multi-Taste aus Bibliothek laden

Jede einmal definierte Multi-Taste steht als ladbare Ressource in der Bibliothek zur Verfügung.

Für die Nutzung in LoGoFoXX gibt es weiterhin vorbereitete Multi-Tasten für Verben, Verbphrasen und Nomen. Die Multi-Tasten enthalten alle Formen des jeweiligen Wortes auf unterschiedlichen Modifizierern.

## NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste.
- Wählen Sie **Multi-Taste aus Bibliothek laden**.

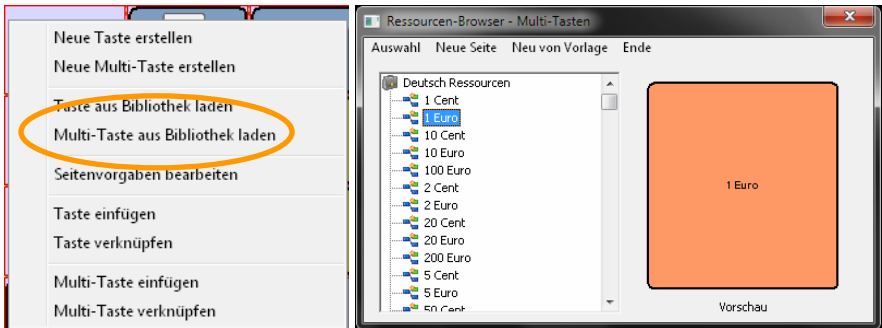


- Öffnen Sie den Pfad **Deutsche Ressourcen** im Ressourcen-Browser.
- Wählen Sie die Multi-Taste.
- Weisen Sie der Multi-Taste ein Bild zu.

Mit der Funktion **Symbol allen Tasten zuweisen** können Sie allen belegten Ebenen einer Multi-Taste das gleiche Bild zuweisen. Diese Funktion steht nur im NovaChat-Editor zur Verfügung.

## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der zu belegenden Taste, bis sich das Kontextmenü öffnet.
- Wählen Sie **Multi-Taste aus Bibliothek laden**.

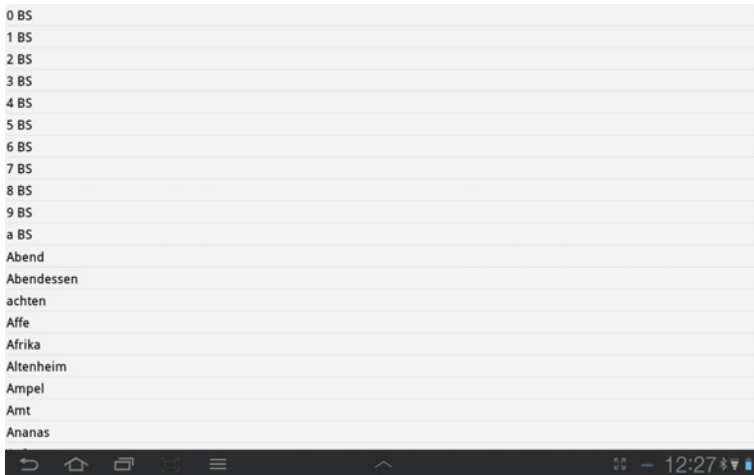

- Wählen Sie die Multi-Taste.
- Weisen Sie der Multi-Taste ein Bild zu.




## Multi-Taste kopieren


Sie können eine einmal erstellte Multi-Taste kopieren und an anderer Position einfügen.

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Multi-Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Multi-Taste kopieren**.

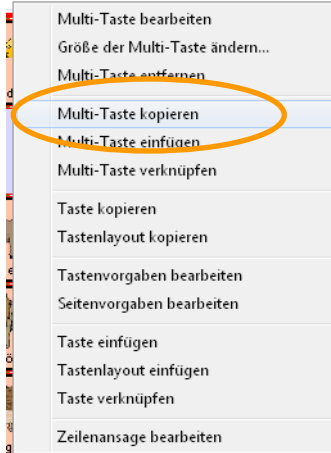


- Öffnen Sie die Seite, auf der die Multi-Taste eingefügt werden soll.
- Rechtsklicken Sie auf dem Tastenfeld, das die Multi-Taste enthalten soll.
- Wählen Sie **Multi-Taste einfügen**.

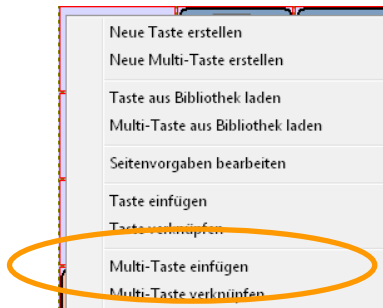

Die neue Multi-Taste ist lediglich eine Kopie der ursprünglichen Multi-Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Multi-Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Multi-Taste kopieren**.

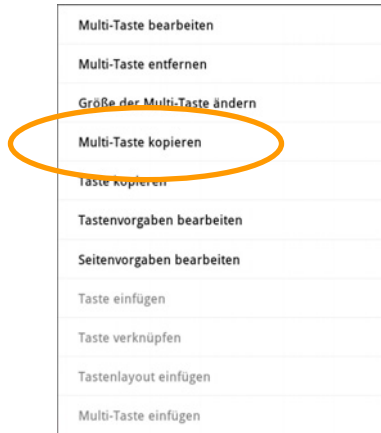

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Multi-Taste eingefügt werden soll.
- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, das die Multi-Taste enthalten soll.
- Wählen Sie **Multi-Taste einfügen**.




Die neue Multi-Taste ist lediglich eine Kopie der ursprünglichen Multi-Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

## Multi-Taste verknüpfen


Sie können eine einmal erstellte Multi-Taste mehrfach benutzen, indem Sie an anderer Position eine Verknüpfung einfügen. Ändern Sie das Original, ändert sich auch die Verknüpfung.

### NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Multi-Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Multi-Taste kopieren**.

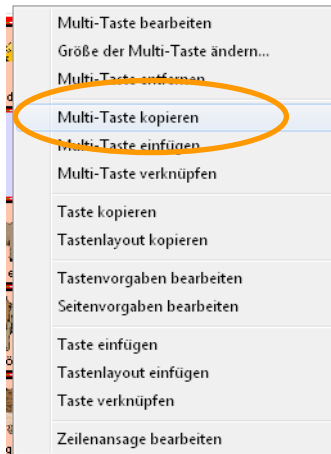

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Multi-Taste eingefügt werden soll.
- Rechtsklicken Sie auf dem Tastenfeld, das die Multi-Taste enthalten soll.
- Wählen Sie **Multi-Taste verknüpfen**.

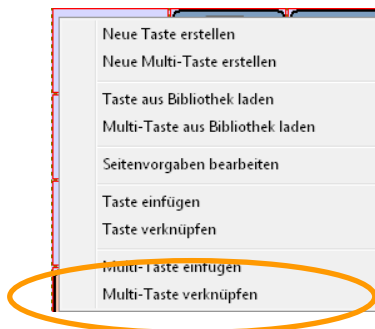


Die neue Multi-Taste ist direkt mit der ursprünglichen verknüpft. Ändern Sie das Original, ändern sich alle verknüpften Kopien automatisch mit.

## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Multi-Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Multi-Taste kopieren**.



- Öffnen Sie die Seite, auf der die Multi-Taste eingefügt werden soll.
- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, das die Multi-Taste enthalten soll.
- Wählen Sie **Multi-Taste verknüpfen**.

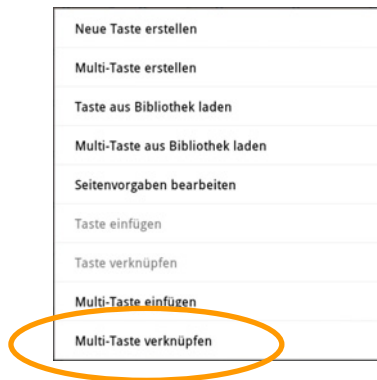

Die neue Multi-Taste ist direkt mit der ursprünglichen verknüpft. Ändern Sie das Original, ändern sich alle verknüpften Kopien automatisch mit.

## Eine Multi-Taste bearbeiten

### NovaChat-Editor



- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Multi-Taste.
- Wählen Sie **Multi-Taste bearbeiten**. Die aktuelle Belegung der Multi-Taste wird angezeigt.



- Wählen Sie den Modifizierer, dessen Belegung Sie ändern möchten.
- Die Gestaltung der jeweiligen Belegung erfolgt analog zur Gestaltung von Tasten.
- Wählen Sie „OK“, wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben.


## NovaChat-Gerät

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Multi-Taste.
- Wählen Sie **Multi-Taste bearbeiten**. Die aktuelle Belegung der Multi-Taste wird angezeigt. Multi-Taste bearbeiten

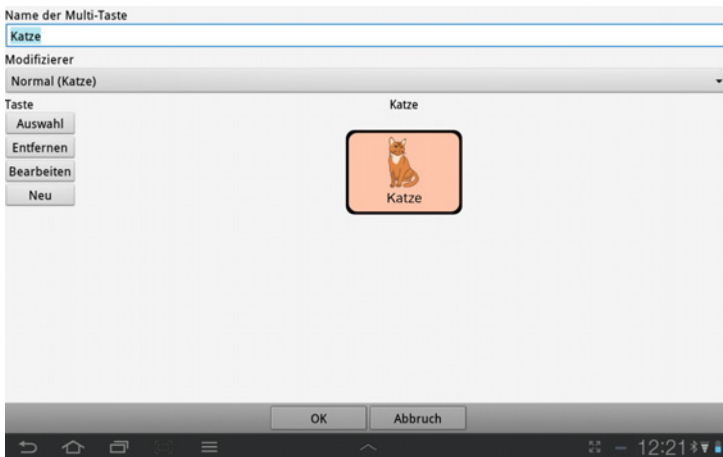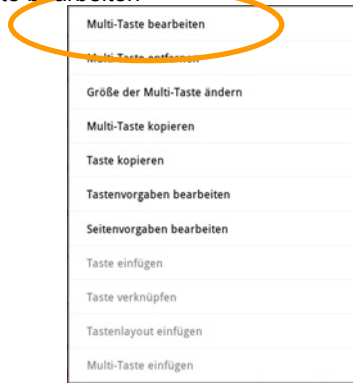

- Wählen Sie den Modifizierer, dessen Belegung Sie ändern möchten.
- Die Gestaltung der jeweiligen Belegung erfolgt analog zur Gestaltung von Tasten.
- Wählen Sie **OK**, wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben.

Tipp: Zum Ausblenden der Bildschirmtastatur tippen sie auf das Pfeil-Symbol: 

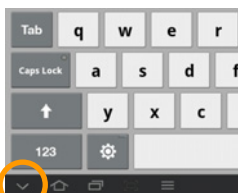


## Sound wiedergeben

Sie können auch digitalisierte Sprache für Mitteilungen verwenden. Neben Aussagen in einer Fremdsprache können Sie so auch Geräusche, Klänge und Musik wiedergeben.

### NovaChat-Editor:


- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die einen Sound wiedergeben soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Sound wiedergeben**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Das Fenster "Sound-Eigenschaften" erscheint

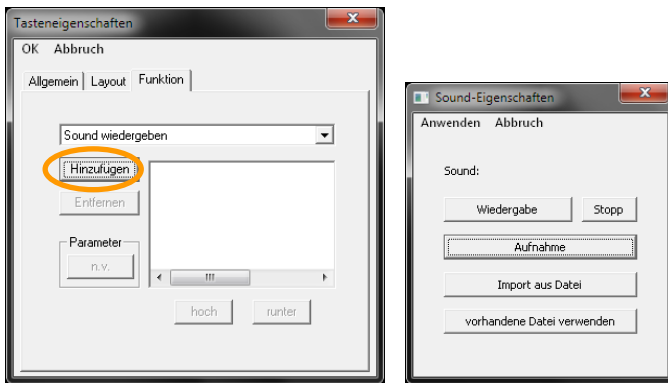

- Wählen Sie die wiederzugebende Sounddatei aus:
  - **Aufnahme**: Machen Sie eine Aufnahme mit dem NovaChat-Editor. An Ihren PC muss ein Mikrofon angeschlossen sein (siehe nächste Seite für das Durchführen einer Aufnahme).
  - **Import aus Datei**: Importieren Sie eine wav- oder mp3-Datei. Wählen Sie die Datei aus.
  - **vorhandene Datei verwenden**: verwenden Sie einen bereits im NovaChat vorhandenen Sound. Wählen Sie das Vokabular und den Sound.

## Aufnahme machen

Wählen Sie Aufnahme im Fenster Sound-Eigenschaften. Das Fenster „Sound aufnehmen“ wird angezeigt.

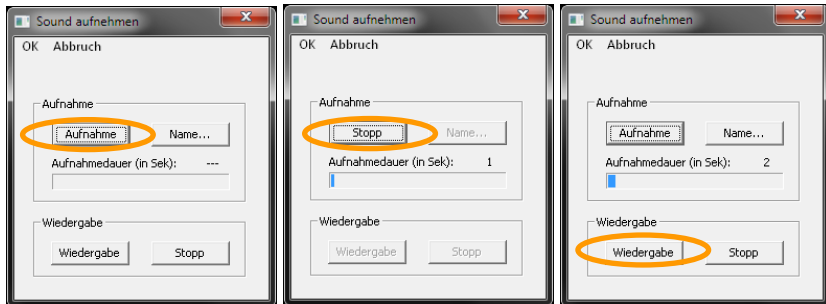


- Klicken Sie auf **Aufnahme**. Die Aufnahme beginnt zu laufen. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Klicken Sie auf **Stopp**, sobald die Sie Mitteilung beendet haben.
- Klicken Sie auf **Wiedergabe**, um die Aufnahme zu kontrollieren.
- Wiederholen Sie die Aufnahme, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind
- Klicken Sie auf **Name**, um der Aufnahme einen Namen zu geben.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Der Sound steht ab jetzt mit dem von Ihnen eingegebenem Namen in der Bibliothek zur Verfügung.




## NovaChat-Gerät:

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die einen Sound wiedergeben soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Sound wiedergeben**.

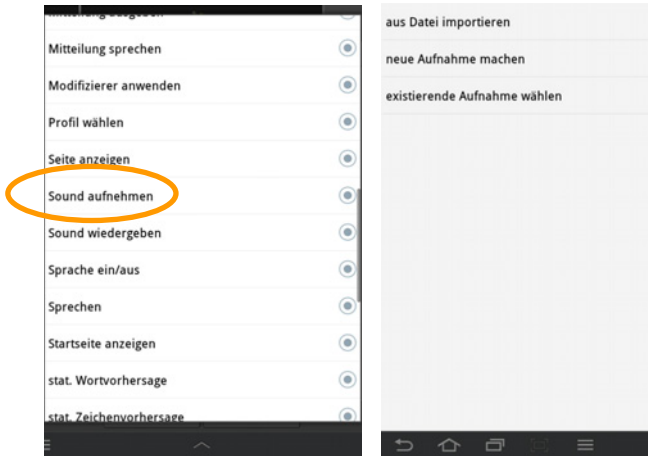


- Wählen Sie die wiederzugebende Sounddatei aus:
  - **aus Datei importieren**: Importieren Sie eine wav- oder mp3-Datei. Die Datei muss sich auf dem Tablet befinden. Wählen Sie die Datei aus.
  - **neue Aufnahme machen**: Machen Sie eine Aufnahme direkt mit dem NovaChat-Gerät (siehe nächste Seite für das Durchführen einer Aufnahme).
  - **existierende Aufnahme wählen**: verwenden Sie einen bereits im NovaChat vorhandenen Sound. Wählen Sie das Vokabular und den Sound.

## Aufnahme machen

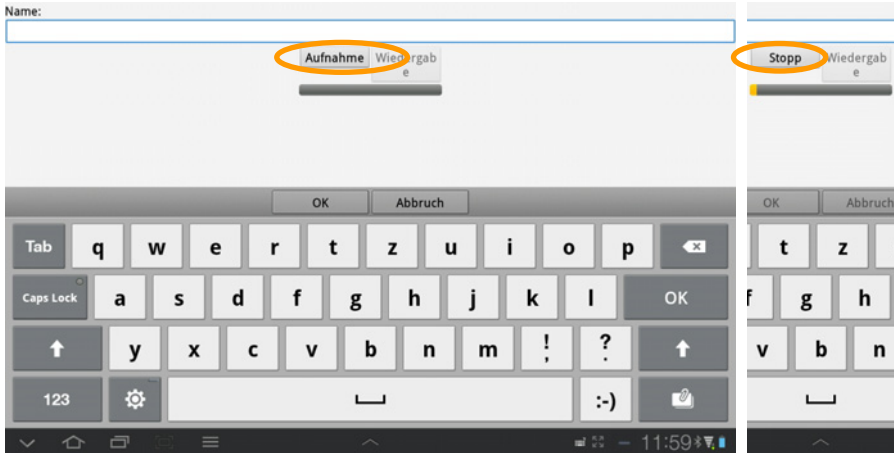

- Tippen Sie auf **Aufnahme**. Die Aufnahme beginnt zu laufen. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Tippen Sie auf **Stopp**, sobald die Sie Mitteilung beendet haben.
- Tippen Sie auf **Wiedergabe**, um die Aufnahme zu kontrollieren.
- Wiederholen Sie die Aufnahme, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind
- Tippen Sie auf **Name**, um der Aufnahme einen Namen zu geben.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Der Sound steht ab jetzt mit dem von Ihnen eingegebenem Namen in der Bibliothek zur Verfügung.

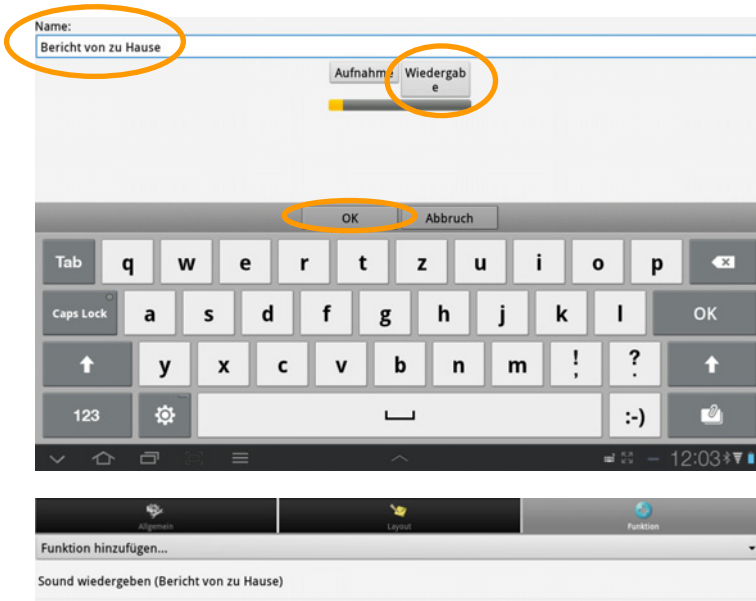


## Sound aufnehmen

Sie können Tasten zum Aufnehmen einer digitalisierten Mitteilung gestalten.


### NovaChat-Editor:

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die den Sound aufnehmen soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Sound aufnehmen**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Der Sound hat noch keinen Namen.

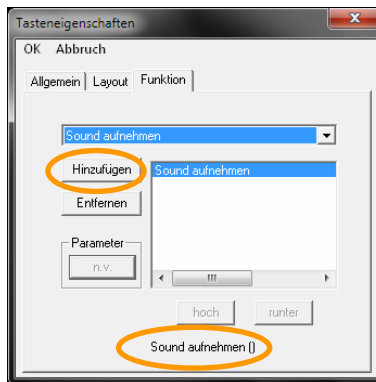

### Sound zuweisen

Aktivieren Sie die mit der Funktion **Mitteilung ausgeben** belegte Taste. Das Fenster „Sound aufnehmen“ wird angezeigt.

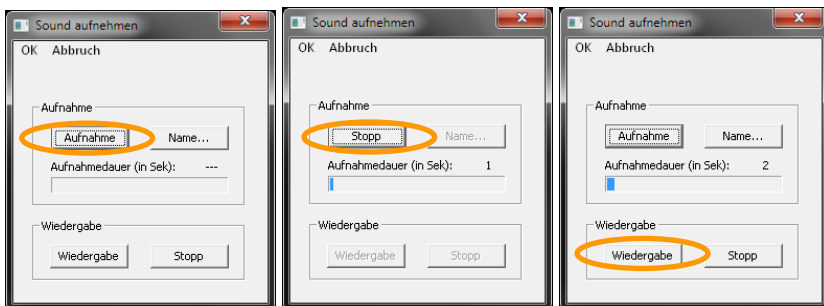

- Klicken Sie auf **Aufnahme**. Die Aufnahme beginnt zu laufen. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Klicken Sie auf **Stopp**, sobald die Sie Mitteilung beendet haben
- Klicken Sie auf **Wiedergabe**, um die Aufnahme zu kontrollieren.
- Wiederholen Sie die Aufnahme, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind
- Klicken Sie auf **Name**, um der Aufnahme einen Namen zu geben.


- Klicken Sie auf **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Der Sound steht ab jetzt mit dem von Ihnen eingegebenem Namen in der Bibliothek zur Verfügung.



Jedes Mal, wenn Sie die Taste aktivieren und eine neue Aufnahme anfertigen, überschreiben sie die unter diesem Namen existierende Aufnahme..


## NovaChat-Gerät:

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die einen Sound wiedergeben soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Sound aufnehmen**.

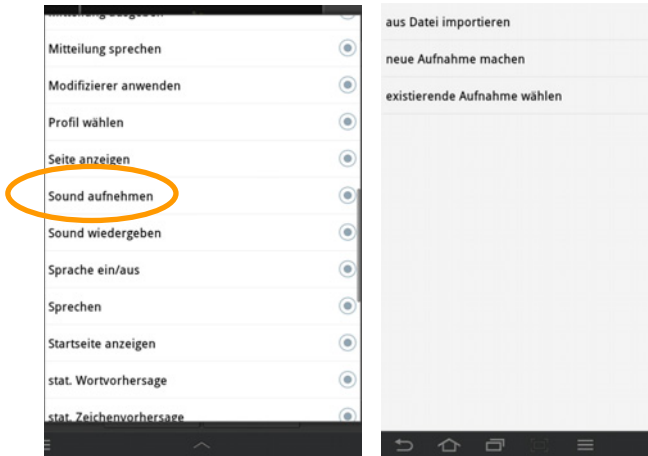


- Wählen Sie die aufzunehmende Sounddatei aus:
  - **aus Datei importieren**: die Aufnahme überschreibt eine vorhandene wav- oder mp3-Datei. Die Datei muss sich auf dem Tablet befinden. Wählen Sie die Datei aus.
  - **neue Aufnahme machen**: Machen Sie eine Aufnahme direkt mit dem Nova-Chat-Gerät (siehe nächste Seite für das Durchführen einer Aufnahme).
  - **existierende Aufnahme wählen**: verwenden Sie einen bereits im NovaChat vorhandenen Sound. Wählen Sie den Sound aus.

## Aufnahme machen

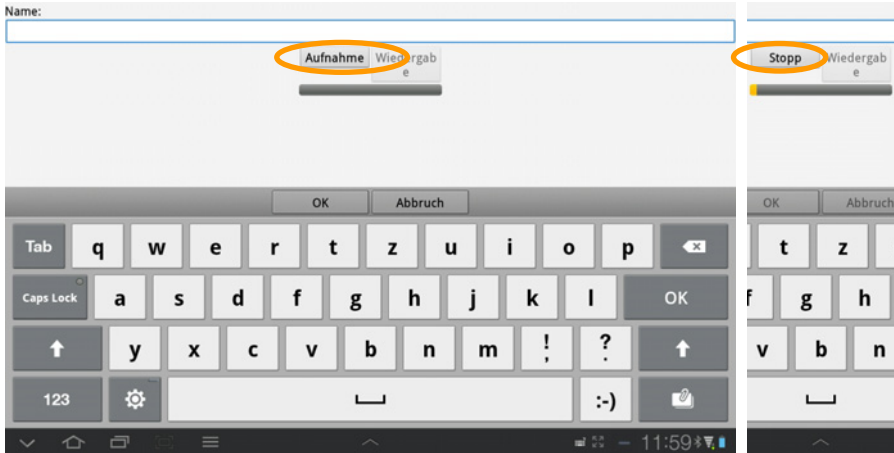

- Tippen Sie auf **Aufnahme**. Die Aufnahme beginnt zu laufen. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Tippen Sie auf **Stopp**, sobald die Sie Mitteilung beendet haben.
- Tippen Sie auf **Wiedergabe**, um die Aufnahme zu kontrollieren.
- Wiederholen Sie die Aufnahme, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind
- Tippen Sie auf **Name**, um der Aufnahme einen Namen zu geben.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Der Sound steht ab jetzt mit dem von Ihnen eingegebenem Namen in der Bibliothek zur Verfügung.

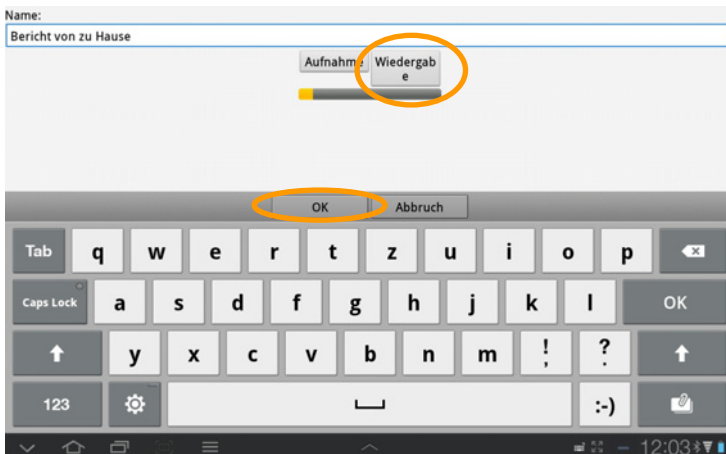


Jedes Mal, wenn Sie die Taste aktivieren und eine neue Aufnahme anfertigen, überschreiben sie die unter diesem Namen existierende Aufnahme.

# Android-Anwendung öffnen


Die Funktion steht nur auf dem NovaChat-Gerät zur Verfügung.  
Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden, wenn das NovaChat-Gerät als geschlossene Anlage konfiguriert oder der Kiosk-Modus aktiviert ist.

## NovaChat-Gerät:

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die eine Android-Anwendung öffnen soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Android-Anwendung öffnen**.

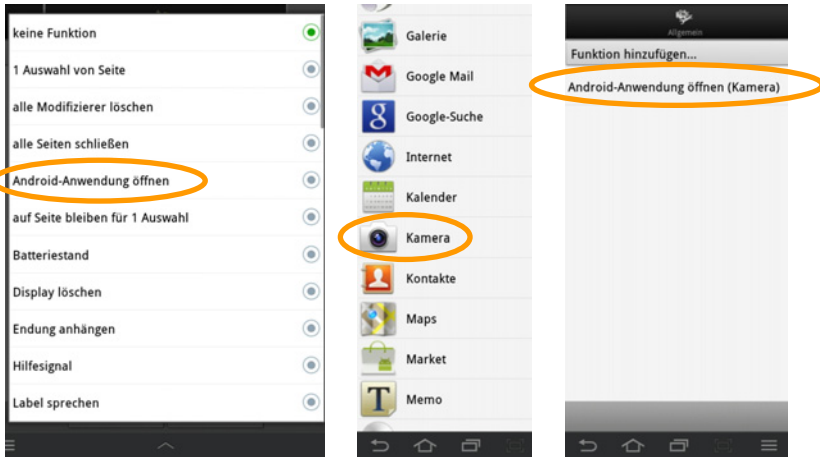

- Wählen Sie die Anwendung aus, z.B. „Kamera“.

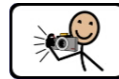

- Gestalten Sie die Taste nach Ihren Wünschen
- Aktivieren Sie die Taste. Die Kamera-App des Tablets wird gestartet:



- Machen Sie ein Foto.
- Beenden Sie die Kamera-App. Das System kehrt automatisch zur ChatPC-App zurück.
- Das Foto wird im Tablet gespeichert und kann z.B. als Symbol auf einer Taste verwendet werden.




# Endung anhängen

Diese Funktion dient dem Deklinieren von Adjektiven.


## NovaChat-Editor:

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die die Endung erhalten soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Endung anhängen**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Wählen Sie die gewünschte Endung aus.

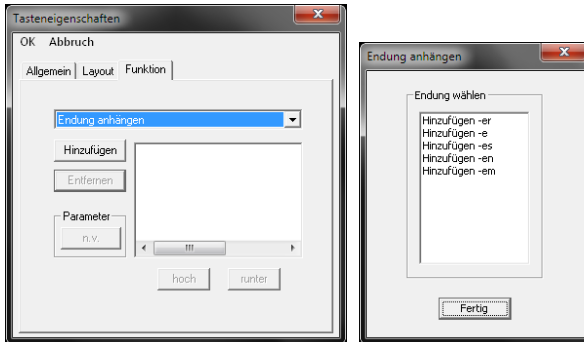

## NovaChat-Gerät:

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, Taste, die die Endung erhalten soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Endung anhängen**.

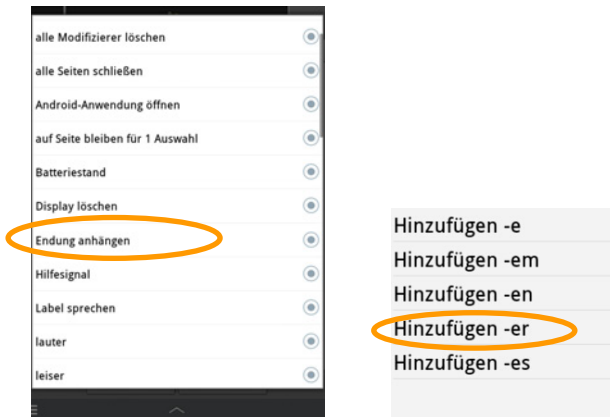

- Wählen Sie die Endung aus, z.B. „er“.



# VORGABEN


# Vorgaben

Wenn Sie das Erscheinungsbild eines Vokabulars global verändern möchten (z.B. Labelschriftgröße, Seitenhintergrundfarbe etc.), brauchen sie nicht jede Taste auf jeder Seite einzeln zu ändern. Mittels „Vorgaben“ können Sie das Erscheinungsbild global anpassen.

## Vokabularvorgaben

Im NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten** oder **Seitenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Vokabular**.
- Wählen Sie das Objekt, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

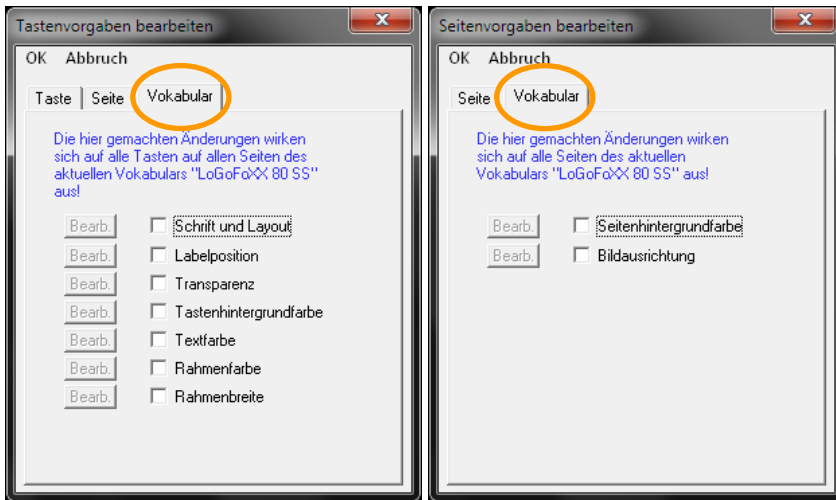

Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht die den Seiten und Tastenfeldern individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Sollen einzelne Seiten oder Tasten des Vokabulars ein anderes Erscheinungsbild benötigen, so können Sie die hier gemachten Vokabularvorgaben durch Seiten- bzw. Tastenvorgaben überschreiben.


### Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

# Seitenvorgaben

Im NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten** oder **Seitenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Seite**.
- Wählen Sie das Objekt, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

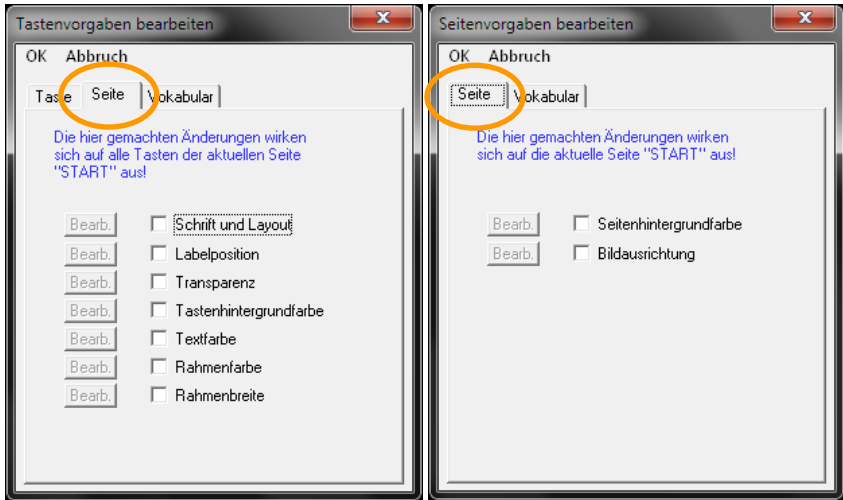

Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht die den Seiten und Tastenfeldern individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Sollen einzelne Tasten ein anderes Erscheinungsbild benötigen, so können Sie die hier gemachten Vokabularvorgaben durch Tastenvorgaben überschreiben.


## Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

# Tastenvorgaben

Im NovaChat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Seite**.
- Wählen Sie das Objekt, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

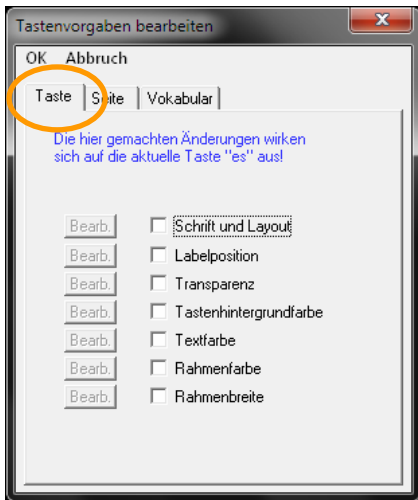

Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht dem Tastenfeld individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

## Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.


# DATENÜBERTRAGUNG

## Vokabular zwischen NovaChat und PC übertragen



Das Übertragen von Daten (Vokabulare, Seiten, Tasten, Bilder) zwischen NovaChat-Gerät und NovaChat-Editor erfolgt mit dem mitgelieferten USB-Sync-Kabel.

### Vokabular vom NovaChat-Editor auf den NovaChat übertragen

- Stellen Sie sicher, dass das NovaChat-Gerät eingeschaltet ist und auf dem PC der NovaChat-Editor ausgeführt wird.
- Verbinden Sie NovaChat-Gerät und PC mit dem mitgelieferten USB-Sync-Kabel.
- Öffnen Sie auf dem NovaChat-Editor das Menü **Bibliothek**.

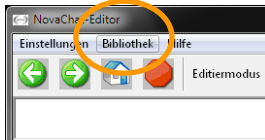

- Wählen Sie die Option **Übertragen – Vokabular von/zum Gerät**.

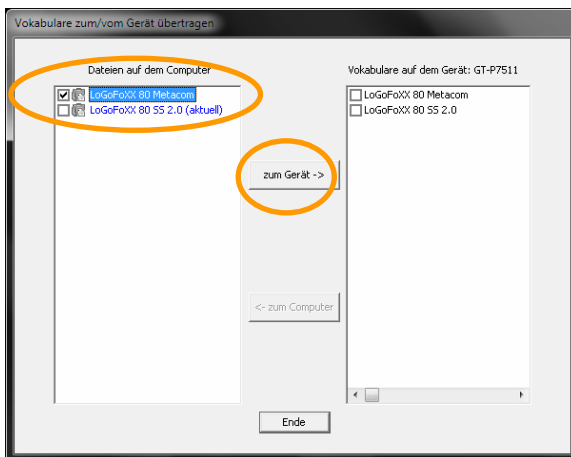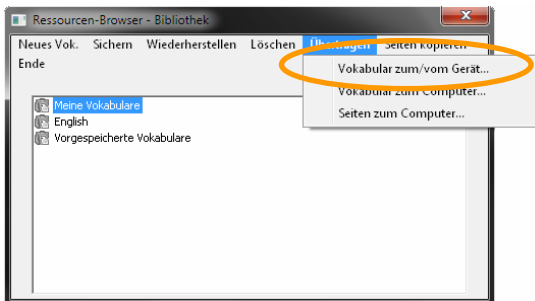


- Markieren Sie alle Vokabulare, die Sie auf das Gerät übertragen wollen.
- Klicken Sie anschließend auf die Taste **zum Gerät ->**.





## Vokabular vom NovaChat-Gerät zum NovaChat-Editor übertragen

- Stellen Sie sicher, dass das NovaChat-Gerät eingeschaltet ist und auf dem PC der NovaChat-Editor ausgeführt wird.
- Verbinden Sie NovaChat-Gerät und PC mit dem mitgelieferten USB-Sync-Kabel.
- Öffnen Sie auf dem NovaChat-Editor das Menü **Bibliothek**.

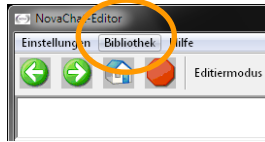

- Wählen Sie die Option **Übertragen – Vokabular von/zum Gerät**.

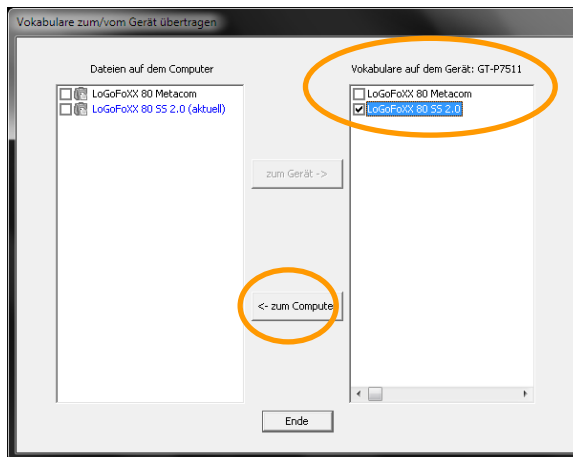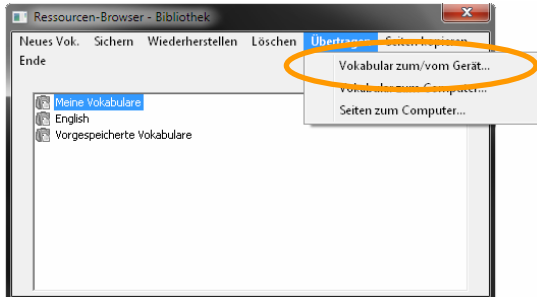


- Markieren Sie alle Vokabulare, die Sie zum NovaChat-Editor übertragen wollen.
- Klicken Sie anschließend auf die Taste **<- zum Computer**.




**Achtung:** wie bei jedem mobilen Gerät besteht auch beim NovaChat die Gefahr eines Datenverlustes. Sie sollten daher immer eine Sicherheitskopie Ihres Vokabulars auf einem PC anlegen.

## Vokabular vom NovaChat-Editor als Datei exportieren


- Öffnen Sie das Menü **Bibliothek**.

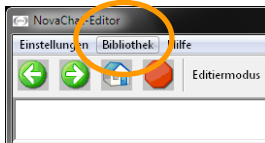


- Wählen Sie die Option **Übertragen – Vokabular zum Computer**.

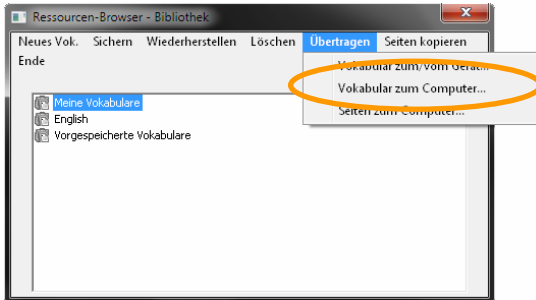

- Wählen Sie das zu übertragende Vokabular aus. Klicken Sie auf **Übertragen**.

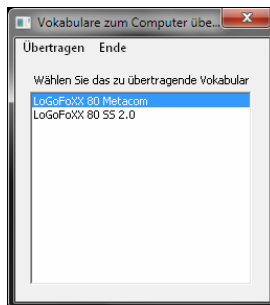


- Geben Sie einen Dateinamen ein und wählen Sie **Speichern**.

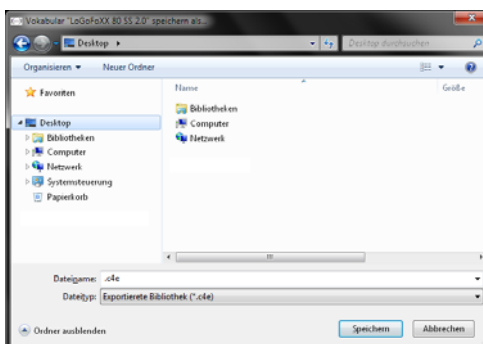


## Vokabulardatei in den NovaChat-Editor importieren

Bei der Installation hat der NovaChat-Editor eine Verknüpfung mit dem Ordner **NovaChat Import** auf dem Desktop angelegt.

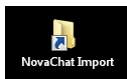


Sollte die Verknüpfung nicht mehr auf Ihrem Desktop sein, so finden Sie den Ordner für Importe unter *C:\Benutzer\USERNAME\AppData\Roaming\Salttillo Corporation\Nova Chat Editor\Import*, wobei *USERNAME* der Name des gerade aktuell an Windows angemeldeten Benutzers ist.

- Ziehen Sie die Vokabulardatei (\*.c4e) mit der Maus auf den Ordner und lassen Sie die Maustaste los (Ziehen & Ablegen).

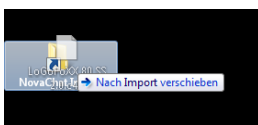

- Der NovaChat-Editor erkennt die Datei nach einem kurzen Moment und importiert sie automatisch. Sollte ein Vokabular mit der gleichen Kennung bereits vorhanden sein, werden Sie gefragt, ob Sie das Vokabular überschreiben wollen.

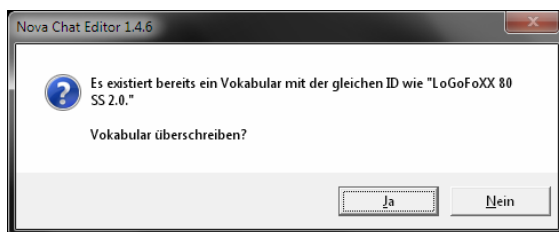

- Der Importvorgang wird durchgeführt.





**TEXTFENSTER**

# Das Textfenster

Im Textfenster werden alle abgerufenen Mitteilungen in Textform gesammelt.


## NovaChat-Editor

- Linksklicken Sie auf das Textfenster, um den gesamten im Textfenster enthaltenen Text erneut zu sprechen.
- Rechtsklicken Sie auf dem Textfenster, um das Kontextmenü anzuzeigen.



## NovaChat-Gerät

- Durch einfaches Tippen auf das Textfenster wird der gesamte im Textfenster enthaltene Text gesprochen.
- Tippen und Halten Sie auf dem Textfenster, um das Kontextmenü anzuzeigen.

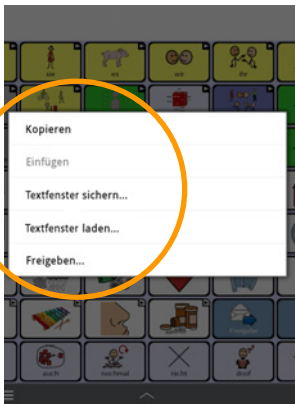

- Es stehen die Optionen *Kopieren*, *Einfügen*, *Textfenster sichern...*, *Textfenster laden...* zur Verfügung. Auf dem NovaChat-Gerät gibt es weiterhin die Option *Freigeben*.
- Die Textfenster-Funktionen *Sprechen*, *Stopp*, *letzte Eingabe sprechen*, *Zeichen löschen*, *Wort löschen*, *Display löschen*, *Text auf Taste speichern*, *Textfenster – Text einfügen*, *Textfenster – Text freigeben*, *Textfenster – Text kopieren*, *Textfenster speichern* und *Textfenster laden* können auf Tasten gelegt werden.

## Text auf Taste speichern

Mit dieser Funktion wird der gesamte Text im Textfenster auf der nächsten von Ihnen gewählten Taste gespeichert.

**Wichtig:** Legen Sie sich eine extra Seite für solche Aussage (z. B. „Sprüche“) an, die Sie zusammen mit dem Befehl auswählen.


Da es nicht möglich ist, leere (nicht definierte) Tastenfelder zum Speichern zu verwenden, definieren Sie alle Tastenfelder auf der Seite, auf der diese Texte gespeichert werden sollen, über „Neue Taste erstellen“ – OK.

Gestalten Sie eine Taste mit den Funktionen **Seite anzeigen (Sprüche)** und **Text auf Taste speichern** (siehe S. 54ff für das Gestalten von Tasten).

Haben Sie eine Aussage formuliert, die Sie gerne aufheben möchten, so aktivieren Sie die mit „Text auf Taste speichern“ belegte Taste.

Das NovaChat-Gerät wechselt auf die Seite „Sprüche“.

Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bzw. **OK**:

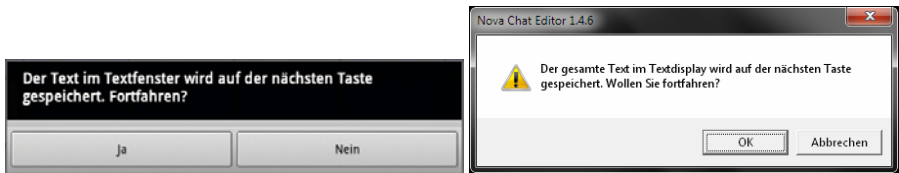

Wählen Sie eine Taste aus. Die Aussage wird dort gespeichert.

**Vorsicht:** ein eventuell bestehender Inhalt der Taste geht verloren!


## Textfenster speichern

Mit dieser Funktion wird der gesamte Text im Textfenster als Textdatei im NovaChat-Gerät gespeichert.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster speichern** (siehe S. 54ff für das Gestalten von Tasten).

Haben Sie eine Aussage formuliert, die Sie gerne speichern möchten, so aktivieren Sie die mit „Textfenster speichern“ belegte Taste.

Ein Fenster mit der Eingabemöglichkeit für einen Dateinamen wird angezeigt:

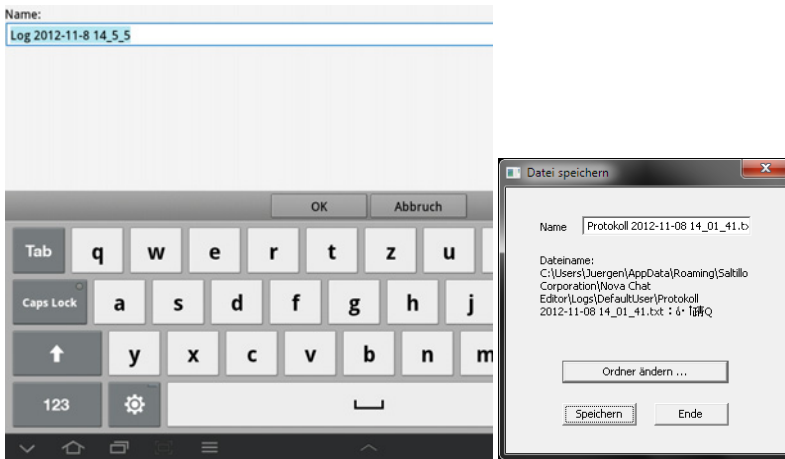

Übernehmen sie den vorgeschlagenen Dateinamen oder geben Sie einen eigenen ein.




## Textfenster laden

Mit dieser Funktion wird ein vorher mittels „Textfenster speichern“ gespeicherter Text geladen und im Textfenster angezeigt.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster laden** (siehe S. 54ff für das Gestalten von Tasten).

Möchten Sie eine als Textdatei gespeicherte Aussage laden und anzeigen, so aktivieren Sie die mit „Textfenster speichern“ belegte Taste.

Ein Fenster mit der Eingabemöglichkeit für einen Dateinamen wird angezeigt:

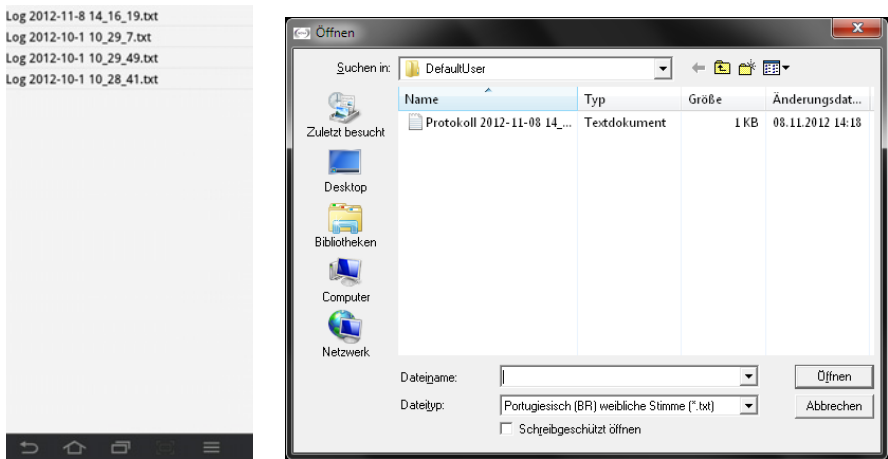

Wählen Sie die Datei aus, die Sie laden und anzeigen möchten.

## Textfenster – Text kopieren

Mit dieser Funktion wird der Text im Textfenster in die Zwischenablage kopiert.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster – Text kopieren** (siehe S. 54ff für das Gestalten von Tasten).

Aktivieren Sie die mit „Textfenster – Text kopieren“ belegte Taste, um den aktuell im Textfenster befindlichen Text in die Zwischenablage zu kopieren.

## Textfenster – Text einfügen

Mit dieser Funktion wird der Text in der Zwischenablage ins Textfenster kopiert.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster – Text einfügen** (siehe S. 54ff für das Gestalten von Tasten).

Aktivieren Sie die mit „Textfenster – Text einfügen“ belegte Taste, um den aktuell in der Zwischenablage befindlichen Text ins Textfenster zu kopieren.

## Textfenster – Text freigeben

Die Funktion steht nur auf dem NovaChat-Gerät zur Verfügung.

Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden, wenn das NovaChat-Gerät als geschlossene Anlage konfiguriert oder der Kiosk-Modus aktiviert ist.

Mit dieser Funktion wird der Text in der Zwischenablage für die Verwendung in anderen Android-Anwendungen freigegeben, d.h. an die gewählte Anwendung geschickt.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster – Text freigeben** (siehe S. 54ff für das Gestalten von Tasten).

Aktivieren Sie die mit „Textfenster – Text freigeben“ belegte Taste, um den aktuell in der Zwischenablage befindlichen Text an eine andere Android-Anwendung zu schicken, die dieses Protokoll unterstützt.



Wählen Sie die gewünschte Android -Anwendung aus. Die Anwendung wird geöffnet und Ihr Text steht dort zur Verfügung.

# EINSTELLUNGEN

**Hinweis:** Viele der im Menü *Einstellungen* wählbaren Parameter können Sie auch auf dem NovaChat-Editor bearbeiten. Da die Einstellungen aber hauptsächlich nur auf dem NovaChat-Gerät vorgenommen werden (einige Einstellungen stehen überhaupt nur auf dem NovaChat-Gerät zur Verfügung), erfolgt die Beschreibung der meisten Einstellungen nur für das NovaChat-Gerät.

## Ansteuerung

Sie können die Ansteuerung des NovaChat-Geräts an die motorischen Fähigkeiten des Benutzers anpassen.

### Verzögerungszeiten

Mit Hilfe von einstellbaren Verzögerungszeiten können Sie die Empfindlichkeit des Touchscreens anpassen.


Legen Sie die Zeit fest, wie lange eine Taste gedrückt werden muss, damit der NovaChat sie als gedrückt akzeptiert (Drückdauer).

Legen Sie eine Zeit fest, wie lange die Taste losgelassen werden muss, bevor der NovaChat neue Eingaben akzeptiert (Loslassdauer).



- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.




- Wählen Sie **Ansteuerung**.

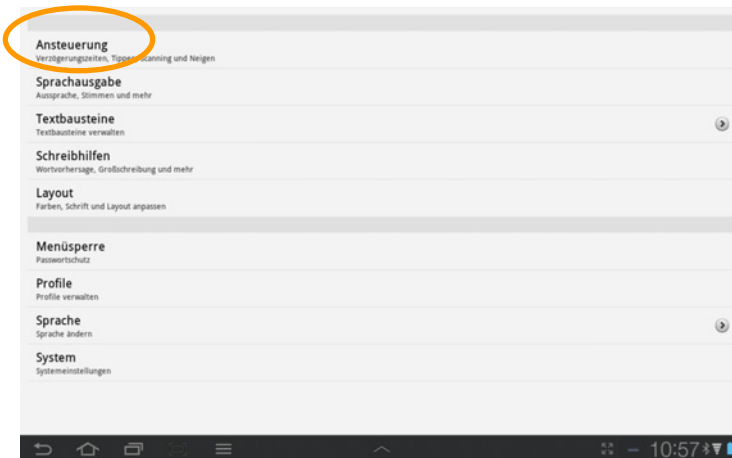

- Wählen Sie **Verzögerungszeiten**.

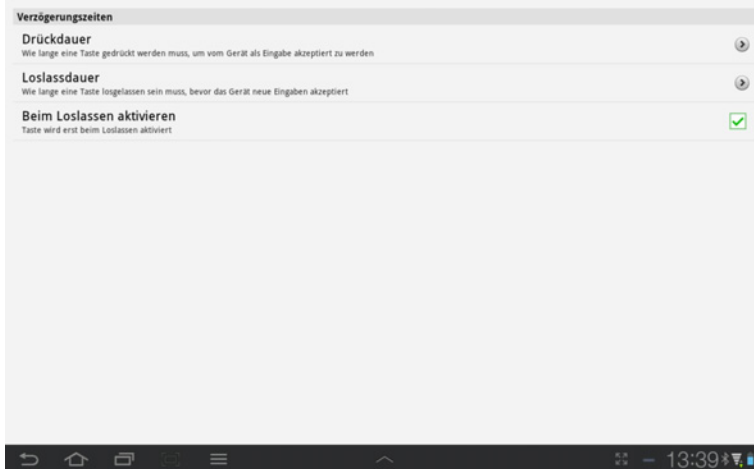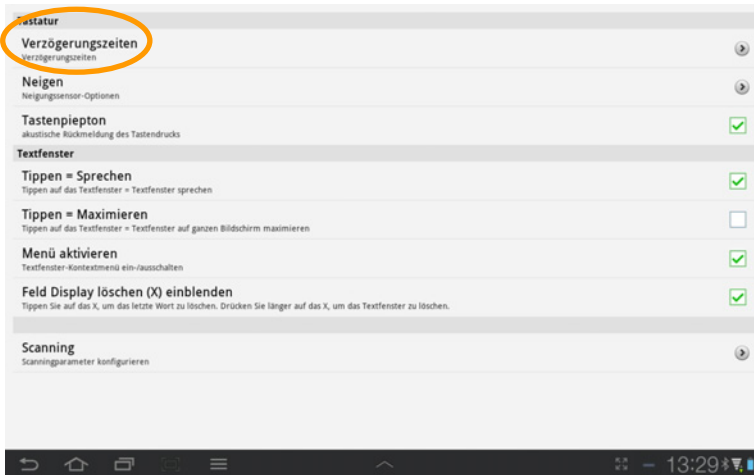

- Wählen Sie **Drückdauer**, wenn Sie eine Drückdauer einstellen wollen.
  - Setzen Sie den Haken bei **Aktivieren**. Tippen Sie auf **Verzögerungszeit**.
  - Stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Zur Auswahl stehen Zeiten von 0,1 bis 3,0 Sekunden.
- Wählen Sie **Loslasssdauer**, wenn Sie eine Loslassdauer einstellen wollen.
  - Setzen Sie den Haken bei **Aktivieren**. Tippen Sie auf **Verzögerungszeit**.
  - Stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Zur Auswahl stehen Zeiten von 0,1 bis 3,0 Sekunden.
- Markieren Sie die Option **Beim Loslassen aktivieren**, wenn Sie möchten, dass ein Tastenfeld erst beim Loslassen aktiviert wird.
- Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück .

## Neigen


- Legen Sie fest, was passiert, wenn Sie das NovaChat-Gerät drehen bzw. neigen. Diese Einstellung können Sie nur auf dem NovaChat-Gerät vornehmen.


### NovaChat-Gerät

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.



- Wählen Sie **Ansteuerung – Neigen**.

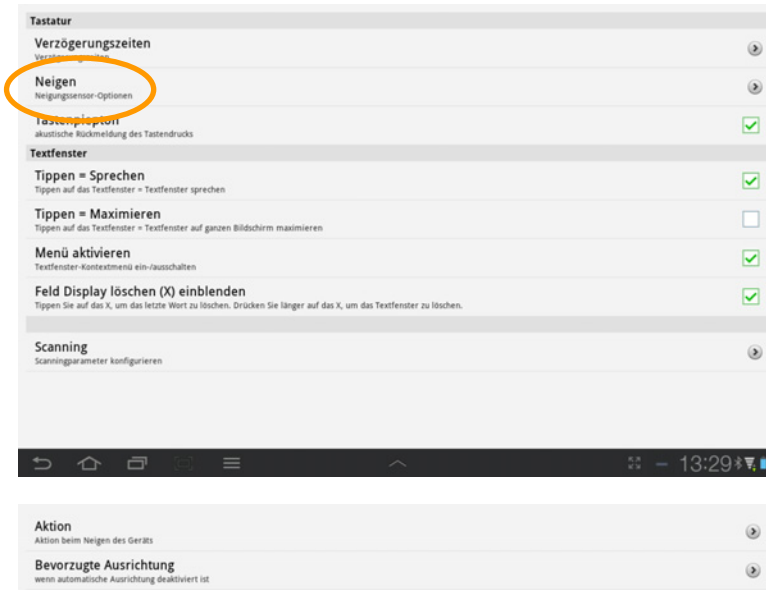

- Legen Sie fest, welche **Aktion** beim Neigen des Gerätes ausgeführt soll. Mögliche Optionen sind:
  - **Maximieren und Sprechen** (Text im Textfenster wird auf Displaygröße vergrößert und über die Sprachausgabe wiedergegeben).
  - **nur Maximieren** (Text im Textfenster wird auf Displaygröße vergrößert).
  - **automatische Ausrichtung** (die Anzeige der Seite wechselt von Querformat auf Hochformat und zurück).
  - **keine Aktivität**.
- Wählen Sie **Bevorzugte Ausrichtung**.
  - Legen Sie fest, ob das NovaChat-Gerät im **Hochformat** oder im **Querformat** genutzt werden soll.
- Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück .



### Weitere Optionen

- Diese Einstellung können Sie nur auf dem NovaChat-Gerät vornehmen.

### Tastentippen

- Wenn aktiviert, wird jeder Tastendruck mit einem kurzen Pieton bestätigt.

### Textfensteroptionen

#### Tippen = Sprechen

- Wenn aktiviert, wird durch Tippen auf das Textfenster der gesamte Text im Textfenster gesprochen.

#### Tippen = Maximieren

- Wenn aktiviert, wird durch Tippen auf das Textfenster der gesamte Text im Textfenster auf Displaygröße vergrößert.

#### Menü aktivieren

- Wenn aktiviert, wird durch Tippen und Halten auf dem Textfenster das Textfenster-Kontextmenü geöffnet.



## **Feld Display löschen (X) einblenden**

- Wenn aktiviert, wird oben rechts im Textfenster das Symbol für Wort löschen / Display löschen eingeblendet.




- Durch Tippen auf das Symbol wird das letzte Wort gelöscht.
- Durch Tippen und Halten auf dem Symbol wird das gesamte Textfenster gelöscht.




# Scanning

- Diese Einstellungen können Sie nur auf dem NovaChat-Gerät vornehmen.
- Schließen Sie ggf. eine oder zwei Tasten an das NovaChat-Gerät an (schlagen Sie wenn nötig im Handbuch zum NovaChat-Gerät nach).
- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning**.
- Setzen Sie den Haken bei **Scanning aktivieren**, um Scanning als Ansteuerung zu aktivieren.

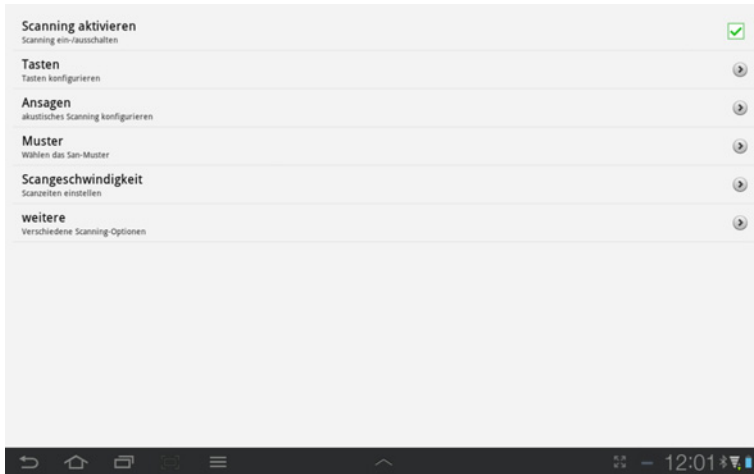



## Tasten konfigurieren

- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – Tasten**.
- Wählen Sie **Tasten konfigurieren**.
- Legen Sie fest, welche Tasten Sie verwenden wollen:
  - **nur Touchscreen**: der Touchscreen des NovaChat-Geräts dient als Taste.
  - **1 Taste** (schließen Sie eine Taste an das NovaChat-Gerät an).
  - **1 Taste und Touchscreen**: der Touchscreen des NovaChat-Geräts dient als eine Taste, eine externe Taste dient als zweite Taste.
  - **2 Tasten** (schließen Sie zwei Tasten an das NovaChat-Gerät an).
- Setzen Sie den Haken bei **Auto-Scan**, wenn die das Scanning (die Auswahl) automatisch weiterlaufen soll, solange keine Taste gedrückt ist.
- Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück .

## Ansagen


- Ansagen ermöglichen Menschen mit visuellen Problemen eine bessere Orientierung auf dem Gerät.
- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – Ansagen**.

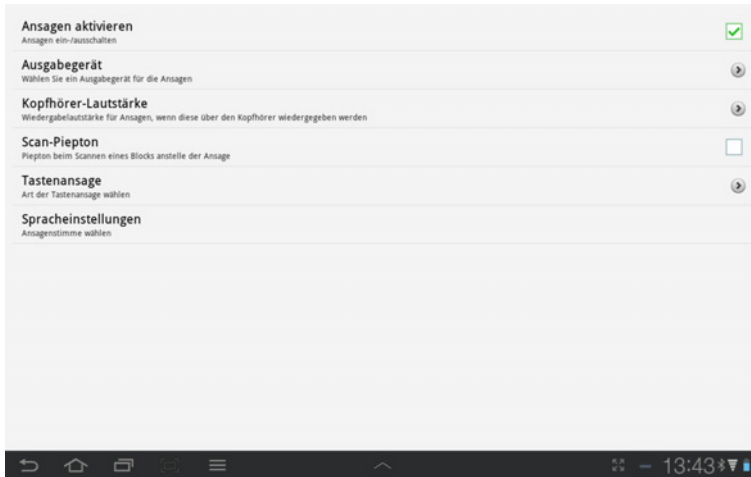

- Setzen Sie den Haken bei **Ansagen aktivieren**, um Ansagen zu aktivieren.
- Wählen Sie **Ausgabegerät**.
- Legen Sie fest, worüber die Ansagen ausgegeben werden sollen:
  - **Lautsprecher**: die Ansagen werden über den externen Lautsprecher wiedergegeben.
  - **Kopfhörer**: die Ansagen werden über einen Kopfhörer wiedergegeben. Schließen Sie einen Kopfhörer an das NovaChat-Gerät an.
- Wählen Sie **Kopfhörer-Lautstärke** und stellen sie die Lautstärke ein.
- Setzen Sie den Haken bei **Scan-Piepton**, wenn beim Scannen eines Blocks anstelle einer Ansage ein Piepton ertönen soll.
- Wählen Sie die **Tastensansage**:
  - **Label sprechen**: das Tastenlabel wird gesprochen.
  - **Mitteilung sprechen**: die Mitteilung wird gesprochen.
- Wählen Sie **Spracheinstellungen**.
- Wählen Sie die synthetische Stimme, die für Ansagen verwendet werden soll.
- Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück .

## Muster


- Stellen Sie hier ein, in welchem Muster die Seiten durchlaufen werden sollen.
- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – Muster**.

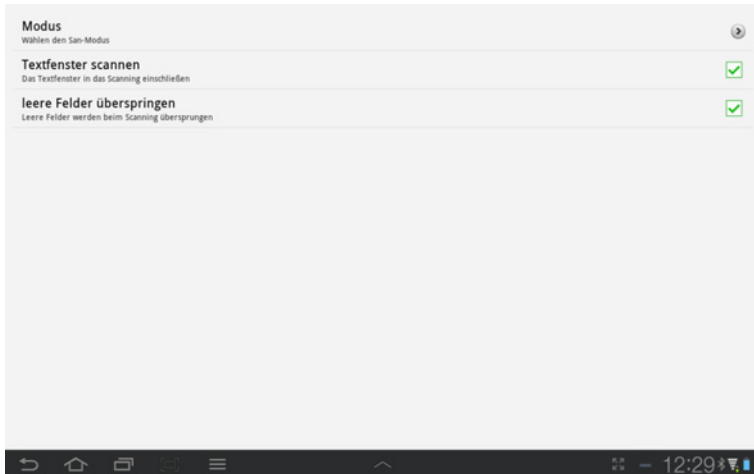

- Wählen Sie **Modus..**
- Legen Sie den Scanmodus fest:
  - **linear**: die Felder einer Seite werden nacheinander Feld für Feld von links nach rechts und von oben nach unten durchlaufen.
  - **Zeile/Spalte**: die Felder einer Seite werden zuerst zeilenweise und nach Auswahl einer Zeile von links nach rechts durchlaufen.
- Setzen Sie den Haken bei **Textfenster scannen**, wenn auch das Textfenster durchlaufen werden soll.
- Setzen Sie den Haken bei **leere Felder überspringen**, wenn beim Scanning leere Felder übersprungen werden werden sollen.

## Scangeschwindigkeit


- Stellen Sie hier ein, in welcher Geschwindigkeit die Auswahl über die Seite laufen soll.
- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – Scangeschwindigkeit**.

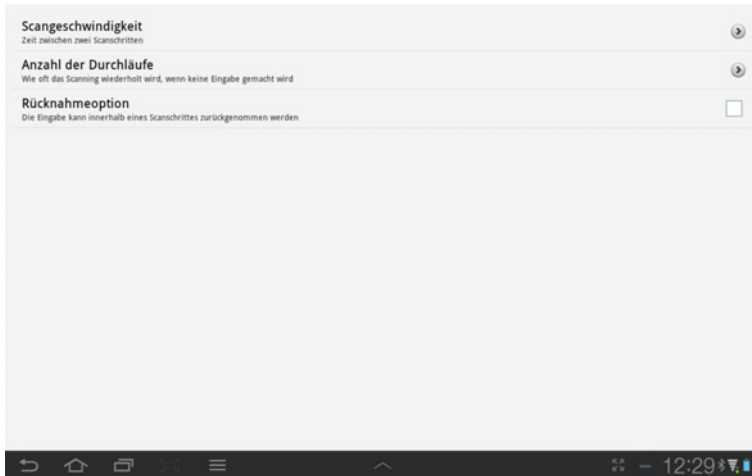

- Wählen Sie **Scangeschwindigkeit**.
  - Wählen Sie die Zeit zwischen zwei Scanschritten. Mögliche Werte sind 0,1 Sek. bis 10,0 Sek..
- Wählen Sie **Anzahl der Durchläufe**.
  - Wählen Sie, wie oft die Seite durchlaufen wird, wenn keine Eingaben gemacht werden. Mögliche Werte sind 0 bis 10 Durchläufe.
- Setzen Sie den Haken bei **Rücknahmeoption**, wenn die Rücknahmeoption aktiviert werden soll. Dann haben Sie die Möglichkeit, eine beim Scanning gemachte Eingabe innerhalb eines Scanschrittes wieder zurückzunehmen, indem Sie die Taste erneut betätigen.

## weitere


- Stellen Sie hier ein, welche Farbe der Cursor (die Hervorhebung) beim Scannen haben soll.
- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – weitere**.

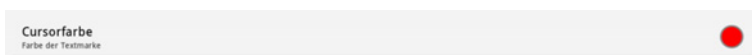


# Sprachausgabe

Das Menü Sprachausgabe können Sie festlegen, welche Synthese und und Stimme verwendet werden und wann eine Sprachausgabe erfolgen soll.

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen – Sprachausgabe**.

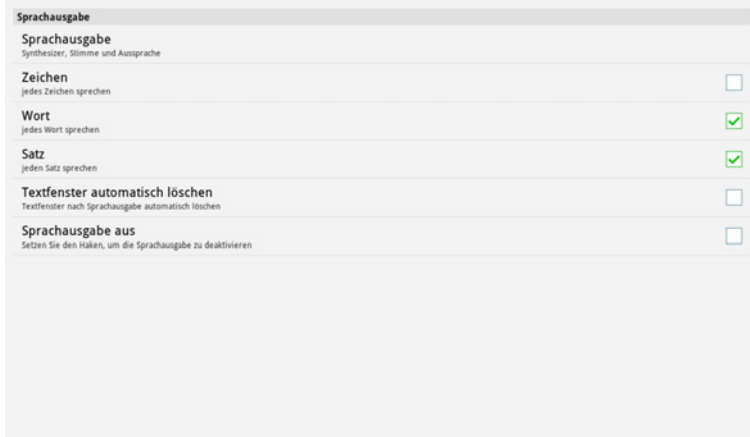


- Wählen Sie **Sprachausgabe**.

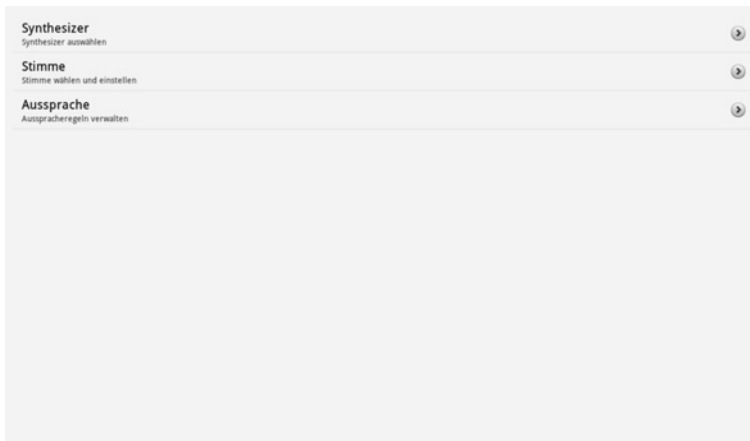


- Öffnen Sie das Menü **Synthesizer** und wählen Sie eine Sprachsynthese.
- Öffnen Sie das Menü **Stimme**, wählen Sie eine Stimme und stellen Sie die Sprechgeschwindigkeit ein.
- Öffnen Sie das Menü **Aussprache**, bearbeiten Sie Ausspracheregeln und fügen Sie neue hinzu. Ausspracheregeln werden benötigt, um die Aussprache zu korrigieren, sollte die gewählte Synthese ein bestimmtes Wort nicht korrekt aussprechen können.

## Ein Wort zum Aussprachlexikon hinzufügen


- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

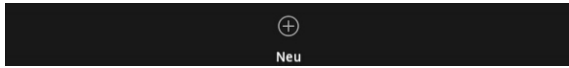

- Drücken Sie die Taste **Neu**
- Geben Sie im Feld **Wort** das Wort in der korrekten Schreibweise ein.
- Geben Sie im Feld **Aussprache** das Wort in einer phonetischen Schreibweise ein.
- Drücken Sie die Taste **Test**, um die Aussprache zu prüfen.
- Korrigieren Sie die Eingabe im Feld **Aussprache** gegebenenfalls.
- Drücken Sie OK, wenn Sie mit der Aussprache zufrieden sind.
- Das Wort wird im Aussprachelexikon gespeichert.

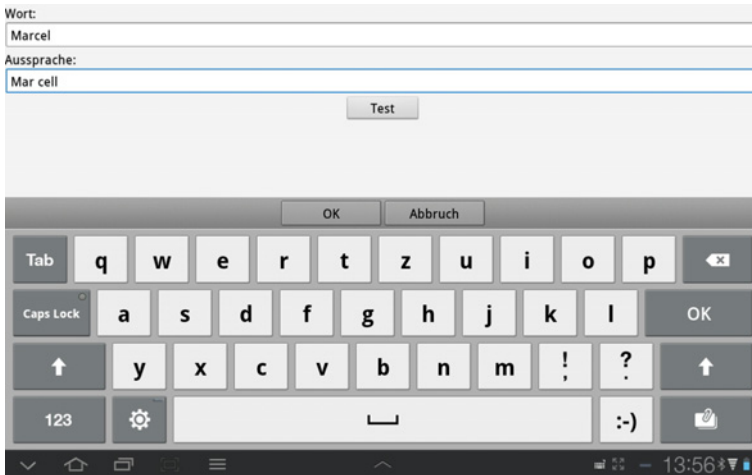

## Weiter Optionen des Menüs Sprachausgabe:

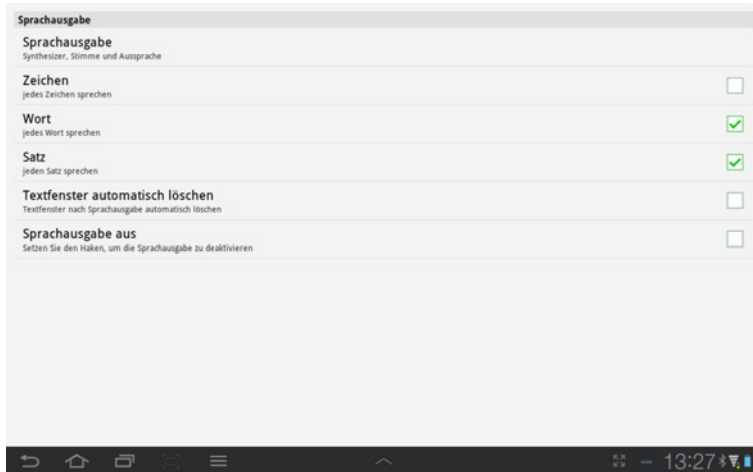

### Zeichen

- Wenn aktiviert, wird jedes Zeichen (Buchstabe, Zahl) während der Eingabe gesprochen.

### Wort

- Wenn aktiviert, wird jedes Wort während der Eingabe gesprochen. Ein Wort gilt als abgeschlossen, wenn ein Leer- oder ein Satzzeichen (,;:!? ) eingegeben wird.

### Satz

- Wenn aktiviert, wird jeder Satz während der Eingabe gesprochen. Ein Satz gilt als abgeschlossen, wenn ein Satzendezeichen (.!?) eingegeben wird.

### Textfenster automatisch löschen

- Wenn aktiviert, wird das Textfenster automatisch gelöscht, nachdem man darauf getippt und somit den ganzen Text im Textfenster zusammenhängend ausgegeben hat. Das Löschen erfolgt erst bei der nächsten Eingabe einer Mitteilung.

### Sprachausgabe aus

- Wenn der Haken gesetzt ist, ist die Sprachausgabe deaktiviert.

## Textbausteine

Textbausteine sind Wörter oder Sätze, die durch eine Abkürzung repräsentiert sind. Wird die Abkürzung und danach ein Punkt eingegeben, ersetzt der NovaChat sie mit dem zugehörigen Text.

- Wählen Sie **Einstellungen – Textbausteine**.
- Die Liste der Textbausteine wird angezeigt.






## Einen Textbaustein hinzufügen

· Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

· Drücken Sie die Taste **Neu**



- Geben Sie im Feld **Textbaustein:** die Abkürzung ein.
- Geben Sie im Feld **Erweitern zu:** den gesamten Text ein.
- Drücken Sie **OK**.

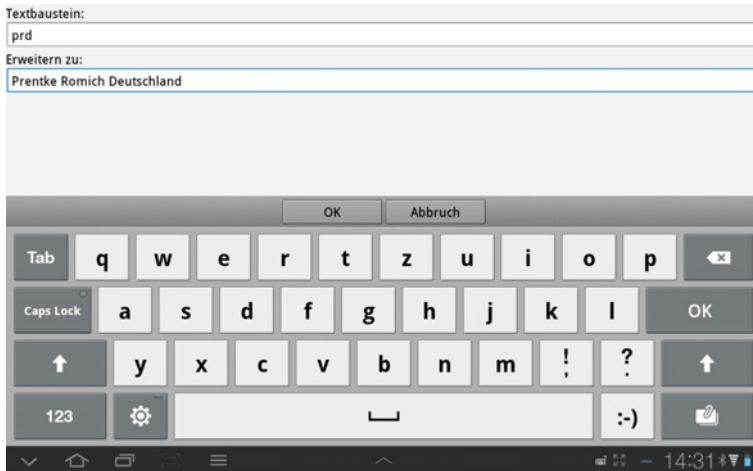

The screenshot shows the NovaChat interface. At the top, there are two input fields. The first field, labeled "Textbaustein:", contains the text "prd". The second field, labeled "Erweitern zu:", contains the text "Prentke Romich Deutschland". Below the fields, there are two buttons: "OK" and "Abbruch". A virtual keyboard is overlaid on the bottom half of the screen, showing keys for letters, numbers, and symbols. The time 14:31 is visible in the bottom right corner.

## Einen Textbaustein bearbeiten

- Wählen Sie **Einstellungen – Textbausteine**.
- Die Liste der Textbausteine wird angezeigt.



- Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Textbaustein
- Wählen Sie **Bearbeiten** aus dem Menü.
- Bearbeiten Sie den Textbaustein.
- Drücken Sie **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern.

## Einen Textbaustein löschen

- Wählen Sie **Einstellungen – Textbausteine**.
- Die Liste der Textbausteine wird angezeigt.




- Tippen Sie auf den zu löschenden Textbaustein
- Wählen Sie **Löschen** aus dem Menü.
- Bestätigen Sie die Löschanfrage.

## Schreibhilfen

Zur Beschleunigung der Schreibgeschwindigkeit können Sie die Wortvorhersage aktivieren und einstellen, dass der NovaChat jedes Wort am Anfang eines Satzes groß schreibt.

### Wortvorhersage

- Wählen Sie **Einstellungen – Schreibhilfen**
- Wählen Sie **Wortvorhersage**.

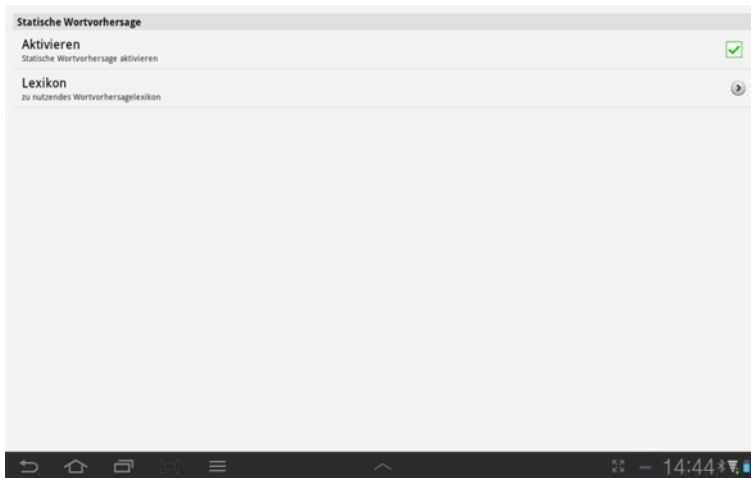


- Setzen Sie den Haken bei **Aktivieren**, um die Wortvorhersage einzuschalten.
- Wählen Sie **Lexikon**, um die Wortvorhersagesprache umzuschalten.
- Wählen Sie unter den angebotenen Lexika eines aus.

## Wortvorschlagsfelder definieren


Um die Wortvorschage in einem Vokabular nutzen zu können, müssen Sie eines oder mehrere Felder einer Seite mit der Funktion **stat. Wortvorhersage** belegen (siehe S. 68 zum Gestalten von Tasten).

Geben Sie an, welchen Vorschlag Sie auf dem Feld angezeigt haben möchten. Zur Auswahl stehen Positionen 1 bis 10.

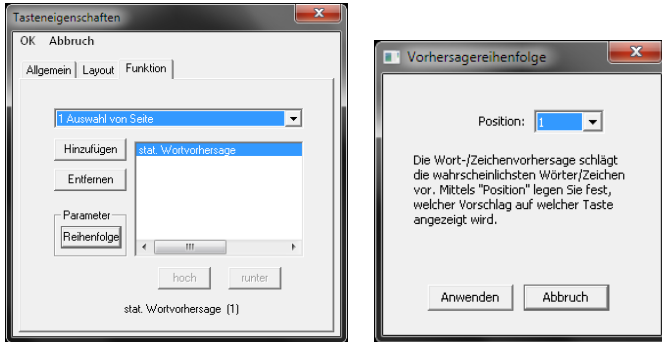

Wenn Sie beispielsweise 6 Vorschlagsfelder einrichten wollen, sollten diese die Positionen 1 - 6 erhalten, d.h. die 6 besten Vorschläge anzeigen. Stellen Sie sicher, dass jedes Vorschlagsfeld eine andere Position aus der Liste anzeigt.

Um lange Wörter besser anzeigen zu können, sollten Sie Ihre Wortvorschlagsfelder ggf. breiter machen als die übrigen Felder der Seite (siehe S. 81 zum Ändern der Größe einer Taste). Über *Taste bearbeiten – Layout – Schrift* wählen Sie Schriftart und -größe für die Wortvorschläge.

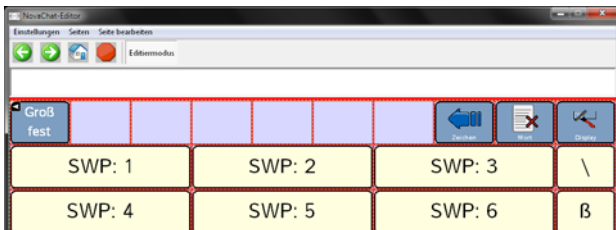

*In diesem Beispiel wurden jeweils 3 Felder horizontal zusammengelegt für ein Wortvorschlagsfeld. Den 6 Wortvorschlagsfeldern wurden die Vorschläge 1...6 zugewiesen.*

**Hinweis:** Wort- und Zeichenvorschlagsfeldern zugewiesene Bilder oder Label werden nicht angezeigt!


## automatische Großschreibung

- Setzen Sie den Haken, damit der NovaChat jeden neuen Satz automatisch mit einem Großbuchstaben beginnt.

# Layout

Hier können Sie das Erscheinungsbild des Textfensters ändern, wählen, ob Bilder flächendeckend auf Tasten angezeigt werden, die Größe des Seitenindikators einstellen sowie die Tastenoption *Farbverlauf* einstellen.

- Wählen Sie **Einstellungen – Layout**

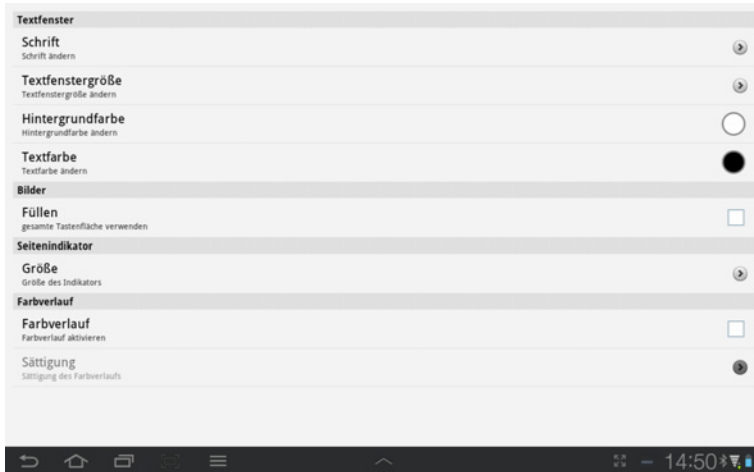


## Textfenster

- Wählen Sie die zur Anzeige von Text im Textfenster verwendete **Schrift**.
  - Wählen Sie **Schrift** und wählen Sie unter den angebotenen Schriftarten.
  - Wählen Sie **Schriftgröße** und stellen Sie die Schriftgröße ein. Mögliche Werte sind 8 Pt bis 72 Pt.
  - Setzen Sie den Haken bei **fett**, um das Attribut fett auf die Schrift anzuwenden
  - Setzen Sie den Haken bei **kursiv**, um das Attribut kursiv auf die Schrift anzuwenden.
- Wählen Sie die **Textfenstergröße**.
  - Mögliche Werte sind **ausgeblendet**, **1 Zeile**, **2 Zeilen**, **3 Zeilen** und **4 Zeilen**.
- Wählen Sie die **Hintergrundfarbe** des Textfensters.
- Wählen Sie die **Textfarbe**.

**Hinweis:** Die Schriftgröße beeinflusst die Höhe des Textfensters.

## Bilder

- Setzen Sie den Haken bei **Füllen**, damit Symbole/Bilder auf den Tasten die gesamte Tastenfläche nutzen (Abb. linke Taste) und nicht nur den Platz über/unter dem Tastenlabel (Abb. rechte Taste).

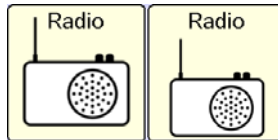

Achtung: es kann sein, dass Teile des Tastenlabels nicht mehr lesbar sind, wenn das Symbol die gesamte Taste einnimmt!

## Seitenindikator


Der Seitenindikator zeigt an, dass eine Taste einen Sprungbefehl zu einer anderen Seite enthält. Sie können die Größe des Indikators einstellen.

- Mögliche Werte sind **ausgeblendet**, **kleinste**, **klein**, **mittel**, **groß** und **größte**.



## Farbverlauf

- Setzen Sie den Haken bei **Farbverlauf**, damit die Tasten einen 3D-Effekt erhalten. Die Hintergrundfarbe der Tasten wird dabei dynamisch nach unten abgedunkelt.
- Wählen Sie die **Sättigung des Farbverlaufs**.
  - Mögliche Werte sind **20%** (starke Kontraste) bis **80%** (geringe Kontraste).

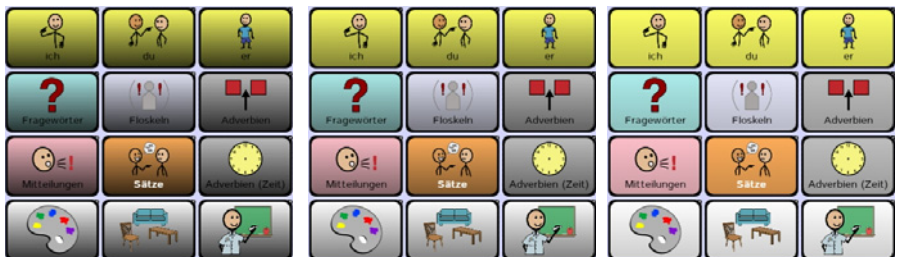

20% Farbverlauf


40% Farbverlauf

80% Farbverlauf


# Menüsperre

Sie können alle Menüs sperren, so dass der Benutzer des NovaChat-Geräts keine Änderungen an den Einstellungen sowie am Vokabular durchführen kann.

- Wählen Sie **Einstellungen – Menüsperre**.

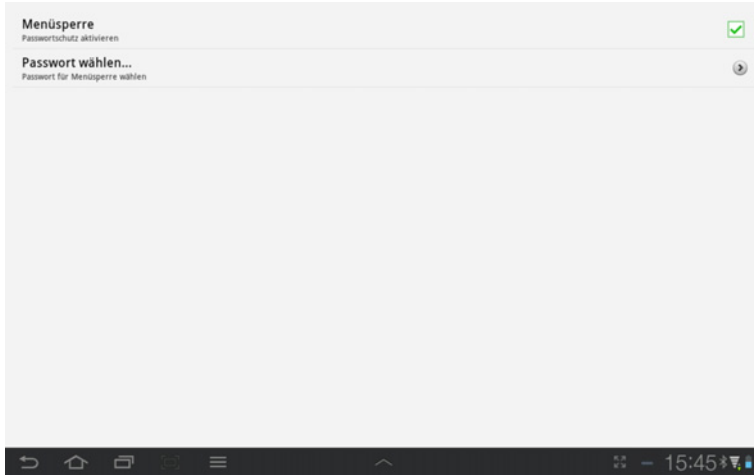

- Setzen Sie den Haken bei Menüsperre.
- Das Fenster zur Eingabe eines Passwortes öffnet sich.

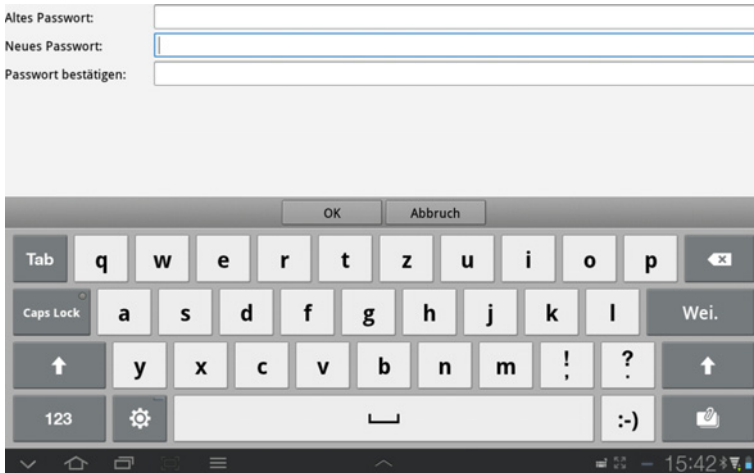

- Geben Sie im Feld **Neues Passwort** ein Passwort ein.
- Wiederholen Sie die Eingabe im Feld **Passwort bestätigen**.
- Tippen Sie auf **OK**.



## Menüsperre einschalten

Die Menüsperre muss eingeschaltet werden, damit sie wirksam wird.

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet 

- Wählen Sie die Option **Sperren**



## Menüsperre ausschalten

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet 

- Wählen Sie die Option **Entsperren**
- Geben Sie das Passwort ein.



**Falls Sie das Passwort vergessen haben, geben Sie BOSCO ein!**

## Passwort für Menüsperre ändern


- Wählen Sie **Einstellungen – Menüsperre**.
- Wählen Sie **Passwort wählen...**
- Das Fenster zur Eingabe eines Passwortes öffnet sich.

Altes Passwort:



Neues Passwort:





Passwort bestätigen:


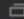



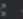
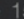
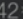


OK Abbruch

Tab q w e r t z u i o p 

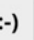Caps Lock a s d f g h j k l Wei.

 y x c v b n m ! ? 

123    

       15:42   

- Geben Sie im Feld **Altes Passwort** das alte Passwort ein.
- Geben Sie im Feld **Neues Passwort** das neue Passwort ein.
- Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Passwortes im Feld **Passwort bestätigen**.
- Tippen Sie auf **OK**.

# Profile


Ein Profil enthält das Vokabular, die gewählte Sprache sowie alle ansteuerungsspezifischen Parameter eines Benutzers. Über *Einstellungen - Profile* können Sie Profile verwalten.

## Neues Profil erstellen


Speichern Sie die aktuellen Einstellungen in einem Profil.

### NovaChat-Editor

- Öffnen Sie das Menü *Einstellungen – Profile*.

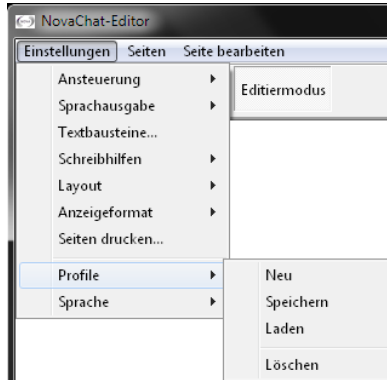

- Wählen Sie **Neu**. Ein Hinweis erscheint. Wählen Sie **Weiter**.

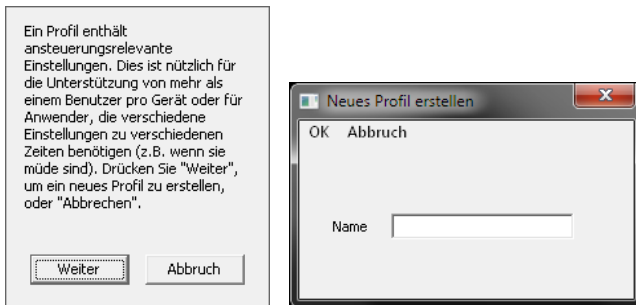


- Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
- Wählen Sie **OK**.
- Das Profil wurde erstellt.

## NovaChat-Gerät


- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.



- Wählen Sie **Profile**.
- Wählen Sie **Neu...**

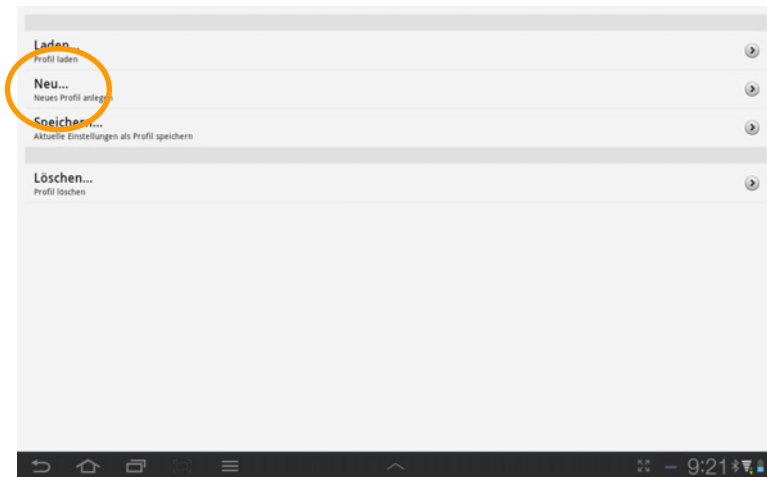

- Geben Sie einen Namen für das Profil ein.

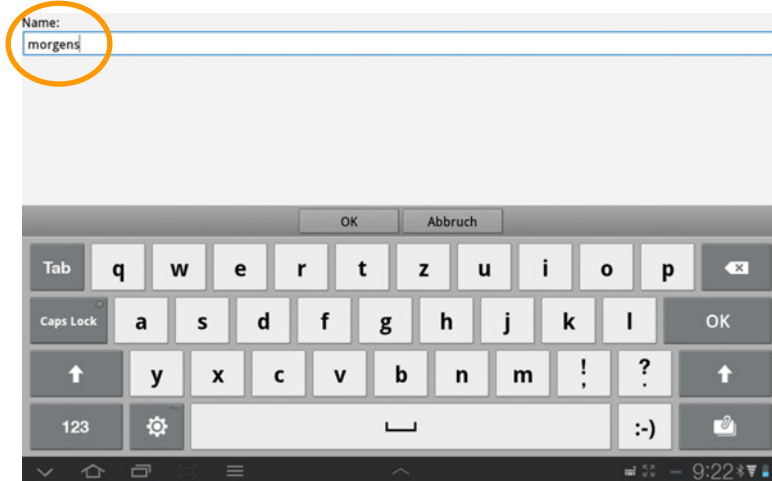


- Wählen Sie **OK**.
- Das Profil wurde erstellt.

## Profil speichern

Überschreiben Sie ein bereits angelegtes Profil mit den aktuellen Einstellungen.

### NovaChat-Editor

- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Profile**.
- Wählen Sie **Speichern**.
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie überschreiben wollen.

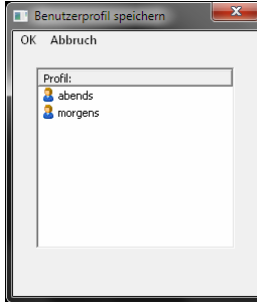

- Wählen Sie **OK**.

### NovaChat-Gerät

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.



- Wählen Sie **Profile**.
- Wählen Sie **Speichern...**
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie überschreiben wollen.



## Profil laden

Laden Sie Profil, um die darin gespeicherten Einstellungen zu verwenden.

### NovaChat-Editor

- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Profile**.
- Wählen Sie **Laden**.
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie laden wollen.



- Wählen Sie **OK**.

### NovaChat-Gerät

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.



- Wählen Sie **Profile**.
- Wählen Sie **Laden...**
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie laden wollen.




**Tipp:** Sie können die Funktion *Profil laden* über die Tastenfunktion „Profil laden“ direkt einer Taste des Vokabular zuweisen (siehe S. 68). So kann der Benutzer selbständig zwischen Profilen wechseln, ohne den Wechsel der Einstellungen manuell vornehmen zu müssen.

## Standardprofil laden

### NovaChat-Editor

- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Profile**.
- Wählen Sie **Laden**.

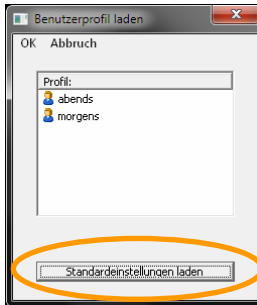


- Wählen Sie **Standardeinstellungen laden**.

### NovaChat-Gerät

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.



- Wählen Sie **Profile**.
- Wählen Sie **Laden...**

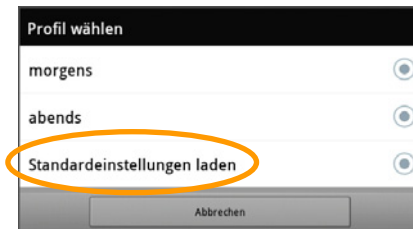


- Wählen Sie **Standardeinstellungen laden**.

## Profil löschen

### NovaChat-Editor

- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Profile**.
- Wählen Sie **Löschen**.
- Wählen Sie das zu löschende Profil.

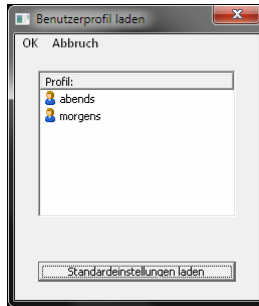

- Wählen Sie **OK**.
- Das Profil wurde gelöscht.

### NovaChat-Gerät

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.



- Wählen Sie **Profile**.
- Wählen Sie **Löschen...**
- Wählen Sie das zu löschende Profil.



- Das Profil wurde gelöscht.

# Sprache


Das Menü Sprache schaltet die Sprache der Benutzeroberfläche sowie die der Wortvorhersage um. Die Sprachsynthese lädt eine zur gewählten Sprache passende Stimme.

Die Anzahl der angebotenen Sprachen ist abhängig von der Konfiguration des NovaChat-Geräts.


## Sprache wechseln

### NovaChat-Editor

- Öffnen Sie das Menü **Sprache**.

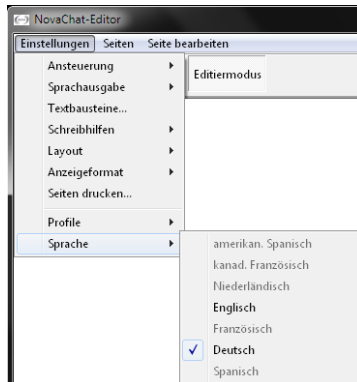

- Wählen Sie die Sprache aus.
- Die Menüs des Editors erscheinen in der gewählten Sprache (hier: Englisch):

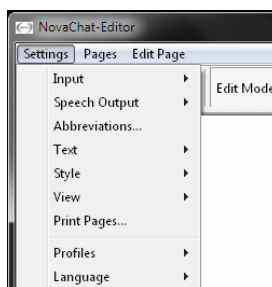

- Öffnen Sie das Menü **Language** und wählen Sie **German** aus, um die Menüs wieder in Deutsch zu sehen.



## NovaChat-Gerät


- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.



- Wählen Sie **Sprache**.
- Wählen Sie die Sprache aus.



- Die Menüs im NovaChat-Gerät erscheinen in der gewählten Sprache (hier: Englisch):

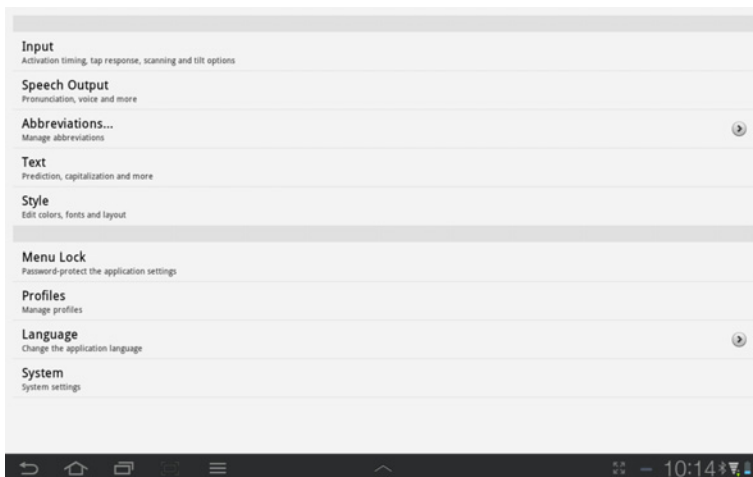

- Öffnen Sie das Menü **Language** und wählen Sie **German** aus, um die Menüs wieder in Deutsch zu sehen.


# System

Das Menü System gibt es nur auf dem NovaChat-Gerät. Es ermöglicht das Einstellen gerätespezifischer Parameter.

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.




- Wählen Sie **System**.

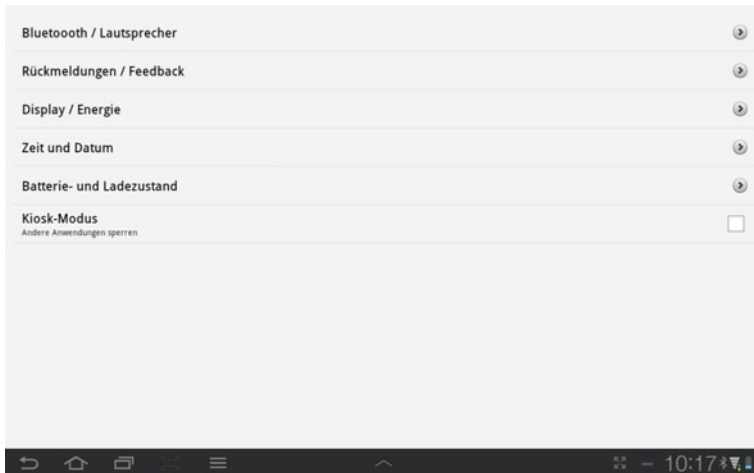

## Bluetooth / Lautsprecher

Dieses Menü dient zum Koppeln und Verbinden des auf der Rückseite des Nova-Chat-Gerät befindlichen Lautsprechers mit dem Tablet über Bluetooth.

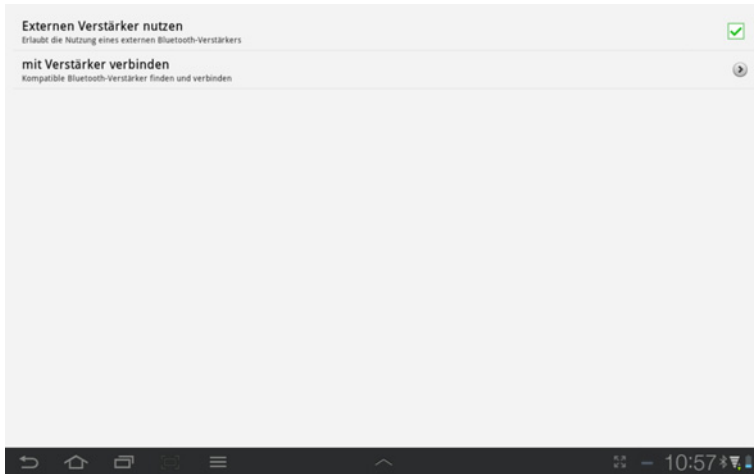

### Externen Verstärker benutzen

- Entfernen Sie den Haken nur, wenn Sie das Tablet ohne den Verstärker nutzen wollen. Da die erreichbare Lautstärke der internen Lautsprecher stark reduziert ist gegenüber der Nutzung mit externem Verstärker, wird von dieser Option abgeraten.

### mit Verstärker verbinden


- Tippen Sie „auf mit Verstärker verbinden“, um den Verstärker mit dem Tablet zu verbinden.
- Wurde der Verstärker gefunden, erscheint ein Eintrag „NOVA AMP“ im Display

NOVA AMP (00:07:80:53:3D:35)

- Tippen Sie auf den Eintrag „NOVA AMP“, um Tablet und Verstärker zu verbinden.
- Das Tablet zeigt eine erfolgreiche Verbindung durch das Wort „VERBUNDEN“ an.
- Schließen Sie das Menü wieder.

## Rückmeldungen / Feedback

Hier können Sie einstellen, ob Sie akustische und taktile Rückmeldungen vom NovaChat-Gerät erhalten, wenn Sie auf andere Android-Programme zugreifen. Diese Einstellungen sind nur für Benutzer von offenen Systemen relevant.

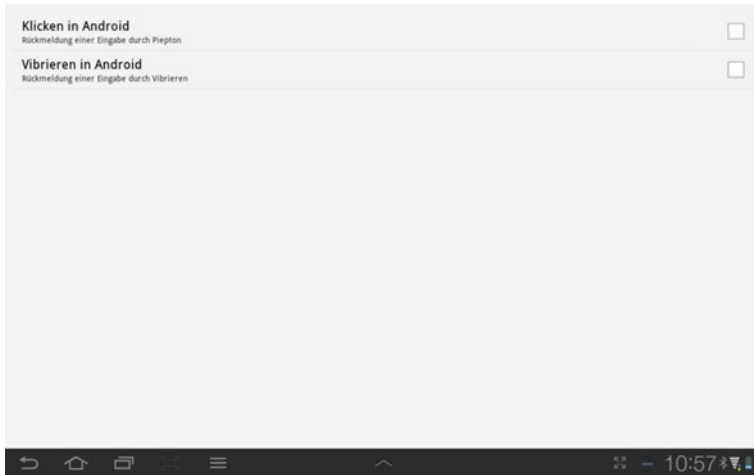

### Klicken in Android


- Setzen Sie den Haken, um akustische Rückmeldungen vom NovaChat-Gerät zu erhalten, wenn Sie eine andere Android-Anwendung nutzen.

### Vibrieren in Android


- Setzen Sie den Haken, um taktile Rückmeldungen vom NovaChat-Gerät zu erhalten, wenn Sie eine andere Android-Anwendung nutzen.

## Display / Energie

Hier können Sie die Helligkeit des Display einstellen, wählen, ob die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht angepasst werden soll sowie die Zeit einstellen, wann das Display sich automatisch abschaltet, um Energie zu sparen. Weiterhin können Sie den Neigungssensor kalibrieren.

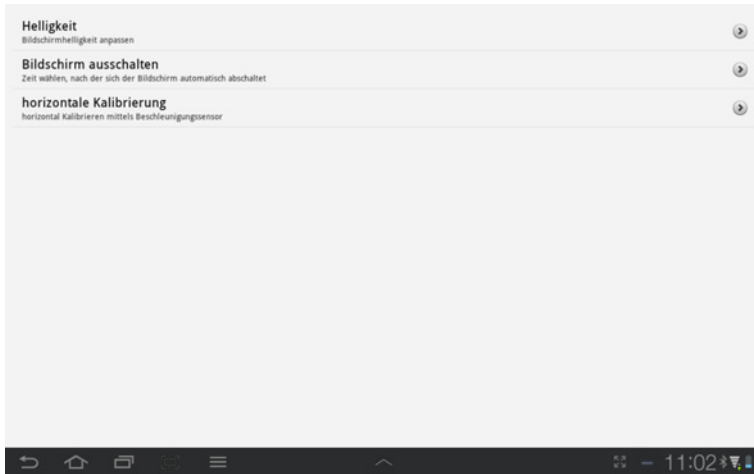


## Helligkeit

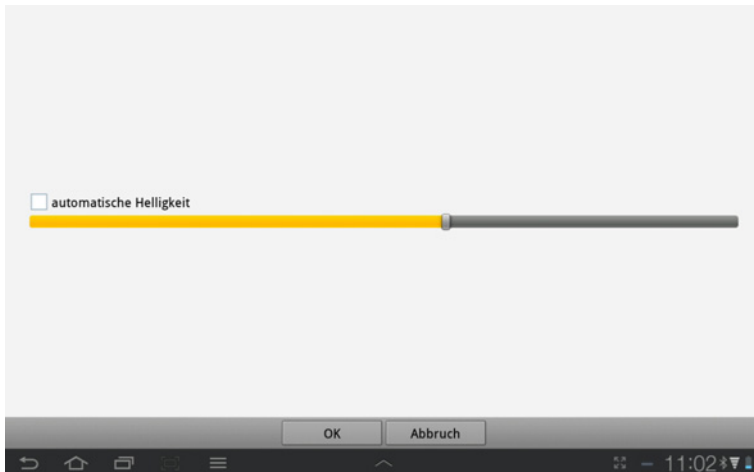


- Stellen Sie die Displaybeleuchtung mit dem Regler auf den gewünschten Wert.
- Setzen Sie den Haken **automatische Helligkeit**, damit die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht angepasst wird.

## Bildschirm ausschalten

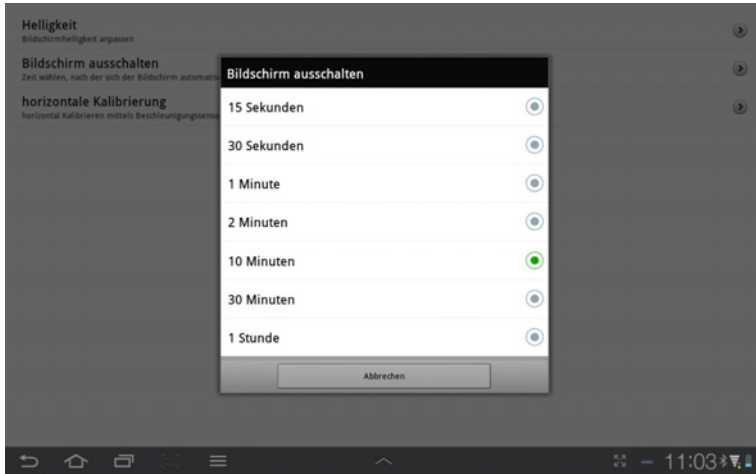

- Wählen Sie, wann das Display sich automatisch abschalten soll, zum Energie zu sparen.


## horizontale Kalibrierung

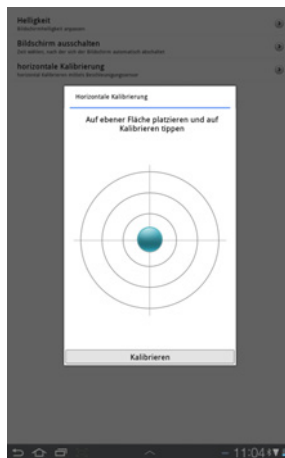

- Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Gefühl haben, dass der Neigungssensor nicht mehr korrekt arbeitet.

## Zeit und Datum

Hier können Sie die interne Uhr stellen sowie das Anzeigeformat von Uhrzeit und Datum wählen.

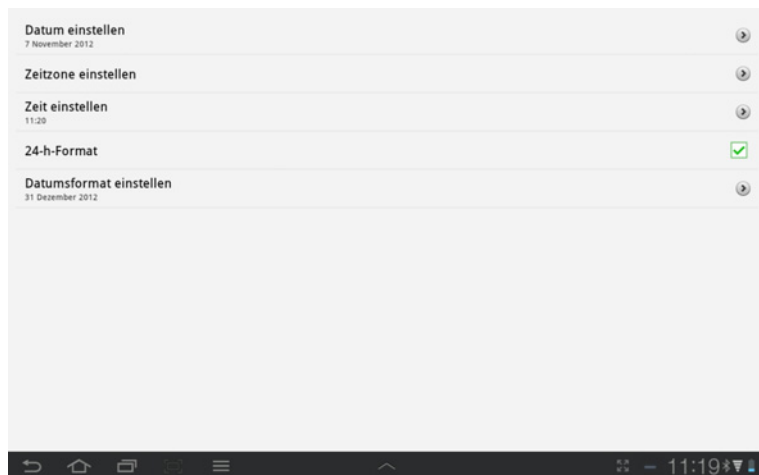

### Datum einstellen

- Geben Sie das aktuelle Datum ein.

### Zeitzone einstellen

- Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich befinden.

### Zeit einstellen

- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

### 24-h-Format

- Setzen Sie den Haken, um die Uhrzeit im in Deutschland üblichen 24-h-Format angezeigt zu bekommen.

### Datumsformat einstellen

- Wählen Sie, in welcher Form das Datum angezeigt werden soll.



## Batterie- und Ladezustand

Hier können Sie Kapazität der im Tablet und im Verstärker eingebauten Akkus kontrollieren und prüfen, ob das Ladegerät korrekt arbeitet.

<b>Batteriestatus (Gerät)</b> Lädt
<b>Batteriekapazität (Gerät)</b> 46%
<b>Batteriestatus (Verstärker)</b> Lädt
<b>Batteriekapazität (Verstärker)</b> 46%

## Kiosk-Modus

- Setzen Sie den Haken, um zu verhindern, dass die ChatPC-Anwendung beendet oder verlassen werden kann.
- Entfernen Sie den Haken, um auf andere Android-Anwendungen zugreifen zu können.
- Sollten Sie ein NovaChat-Gerät als geschlossene Anlage erhalten haben, kann der Kiosk-Modus nicht deaktiviert werden.



# BIBLIOTHEK


## Bibliothek

Die Bibliothek ist die Gesamtheit aller im NovaChat enthaltenen Vokabulare, Seiten, Tasten, Bilder und Sounds. Das Menü Bibliothek ermöglicht das Sichern und Wiederherstellen der Bibliothek.


### Bibliothek sichern

#### NovaChat-Editor

- Wählen Sie das Menü **Bibliothek**.

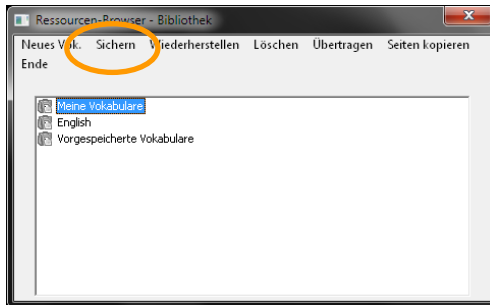

- Wählen Sie **Sichern**, um die Bibliothek zu sichern. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:

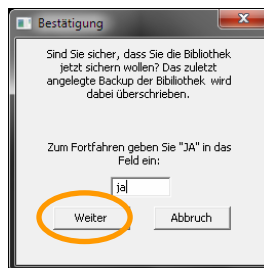


- Geben Sie **ja** in das Feld ein und wählen Sie **Weiter**.
- Die Bibliothek wird gesichert.

## NovaChat-Gerät

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .



- Wählen Sie das Menü **Bibliothek**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .



- Wählen Sie **Sichern**, um die Bibliothek zu sichern. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:




- Wählen Sie **Ja**.
- Die Bibliothek wird gesichert.


## Bibliothek wiederherstellen

### NovaChat-Editor

- Wählen Sie das Menü **Bibliothek**.

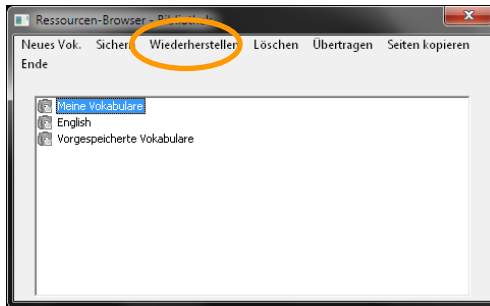

- Wählen Sie **Wiederherstellen**, um die Bibliothek aus der Sicherung wiederherzustellen. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:

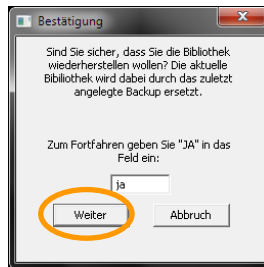

- Geben Sie **ja** in das Feld ein und wählen Sie **Weiter**.
- Die Bibliothek wird wiederhergestellt.

## NovaChat-Gerät


- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .




- Wählen Sie das Menü **Bibliothek**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .




- Wählen Sie **Wiederherstellen**, um die Bibliothek aus der Sicherung wiederherzustellen. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:

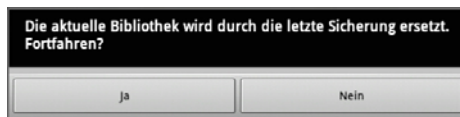

- Wählen Sie **Ja**. Eine Hinweismeldung erscheint:

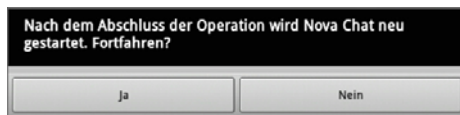

- Wählen Sie **Ja**. Eine weitere Hinweismeldung erscheint:

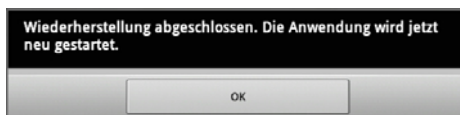


- Wählen Sie **OK**. Das NovaChat-Gerät wird neu gestartet.

## Seiten drucken

Sie können einmal angelegte Seiten ausdrucken, um z.B. eine Symbolmappe anzulegen, die als Talkersersatz dienen kann in Umgebungen, in denen der NovaChat nicht verwendet werden kann.

Das Ausdrucken von Seiten ist nur mit dem NovaChat-Editor möglich, nicht mit dem Gerät.

- Wählen Sie **Einstellungen – Seiten drucken....**
- Markieren Sie die zu druckenden Seiten.

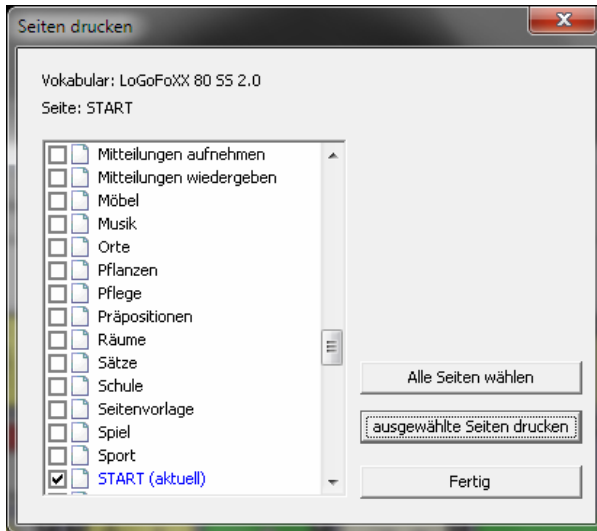

- Starten Sie die Druckausgabe durch Klicken auf **ausgewählte Seiten drucken**.
- Schließen Sie das Fenster durch Klicken auf **Fertig**.

# FEHLERSUCHE & PANNENHILFE

## Das NovaChat-Gerät spricht nicht mehr

- Prüfen Sie, ob im Menü **Einstellungen – Sprachausgabe** der Haken bei **Spracheausgabe aus** gesetzt ist, und entfernen Sie diesen.
- Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf Null reduziert wurde.
- Prüfen Sie, ob der externe Verstärker eingeschaltet und mit dem NovaChat-Gerät gekoppelt und verbunden ist.

## Benutzervokabular ist verschwunden

Zeigt der NovaChat ein anderes als das Benutzervokabular, so öffnen Sie das Menü **Bibliothek** und wählen Sie das gewünschte Vokabular aus. Ist das gewünschte Vokabular nicht auf dem NovaChat-Gerät, importieren Sie es zuerst.

## Der NovaChat reagiert nicht

Falls der NovaChat nicht mehr auf Eingaben reagiert, führen Sie einen Reset durch.

- Halten Sie dazu die I/O-Taste solange gedrückt, bis im Display ein Fenster mit den Optionen **Stumm-Modus**, **Offline-Modus** und **Ausschalten** angezeigt wird
- Tippen Sie auf **Ausschalten**. Das NovaChat-Gerät fährt herunter.
- Halten Sie die I/O-Taste solange gedrückt, bis das NovaChat-Gerät neu startet.

## Das Textfenster wird nicht angezeigt

- Prüfen Sie, ob im Menü **Einstellungen – Layout – Textfenstergröße** die Option **ausgeblendet** gewählt ist.

## Der NovaChat schaltet sich selber aus

Die Energie-Einstellungen des NovaChats sorgen dafür, dass sich das Gerät selbst ausschaltet, wenn es eine Weile nicht benutzt wurde.

- Prüfen Sie, welche Einstellungen im Menü **System – Display / Energie – Bildschirm ausschalten** gemacht wurden. Stellen Sie die Zeit bis zum Ausschalten des Displays auf 10 Minuten.

## Das Display ist zu dunkel

Die Hintergrundbeleuchtung kann verändert werden.

- Prüfen Sie, welche Einstellungen im Menü **System – Display / Energie – Helligkeit** gemacht wurden.

## Die Displayhelligkeit schwankt ständig

Die Hintergrundbeleuchtung kann sich automatisch an das Umgebungslicht anpassen. Das kann zu schwankender Displayhelligkeit führen.

- Deaktivieren Sie die Option **automatische Helligkeit** im Menü **System – Display / Energie – Helligkeit**.

## Die Tastenfelder lassen sich nicht auslösen

- Prüfen Sie, ob im Menü **Ansteuerung – Verzögerungszeiten – Drückdauer** eine Verzögerungszeit eingestellt wurde.

## Ein Bild füllt die Taste nicht aus

- Setzen Sie den Haken bei **Layout – Bilder - Füllen**, damit das Bild die ganze Tastenfläche einnehmen kann.



- Verkürzen Sie das Tastenlabel, damit für das Bild mehr Tastenfläche zur Verfügung steht.
- Entfernen Sie das Label, damit das Bild die ganze Tastenfläche einnehmen kann.

### **Bei x handelt es sich um eine Originaldatei, die nicht verändert werden kann**

Mitgelieferte Standardvokabulare können nicht bearbeitet werden. Erstellen Sie zunächst eine Kopie und bearbeiten Sie diese.

- Öffnen Sie das Menü **Bibliothek**, tippen und halten Sie auf dem Vokabular, das Sie nutzen wollen, und wählen Sie **Duplizieren** aus dem Menü. Geben Sie den Vokabular einen neuen Namen.

### **NovaChat zeigt englische Menüs an**

Sollte der NovaChat englische Menüs anzeigen, stellen Sie die Menüsprache wie folgt auf deutsch um:

- Öffnen Sie das Menü **Settings**
- Wählen Sie **Language**.
- Wählen Sie **German**.



# INDEX

**1**

1 Auswahl von Seite 41, 42  
 1 Auswahl von Seite (Tastenfunktion) 70  
 1 Taste 129  
 1 Taste und Touchscreen 129

**2**

2 Tasten 129  
 24-h-Format 159

**A**

alle Auswahlseiten schließen 42  
 alle Modifizierer schließen  
 (Tastenfunktion) 70  
 alle Seiten schließen (Tastenfunktion) 70  
 Allgemein (Tasteneigenschaften) 55  
 Allgemeine Informationen über den  
 NovaChat 9  
 Android-Anwendung öffnen 103, 105  
 Ansagen 130  
 Ansagenstimme 130  
 Ansteuerung 124  
 Anzahl der Durchläufe 132  
 auf Seite bleiben für 1 Auswahl 42  
 auf Seite bleiben für 1 Auswahl  
 (Tastenfunktion) 70  
 Ausgabegerät 130  
 ausgeblendet (Textfenster) 142  
 Aussprache 133  
 Auswählen (Bild) 56  
 automatische Ausrichtung 126  
 automatische Großschreibung 141  
 Auto-Scan 129

**B**

Batterie- und Ladezustand 160  
 Batteriestand (Tastenfunktion) 70  
 Bearbeiten einer Taste 54  
 Begriffserklärung 12  
 beim Loslassen aktivieren 125  
 Bevorzugte Ausrichtung 126  
 Bibliothek 12, 16, 17  
 Bibliothek (Menü) 161  
 Bibliothek (Menü) 162  
 Bibliothek sichern 162

Bibliothek wiederherstellen 164  
 Bild (Taste bearbeiten) 58  
 Bild auswählen 56  
 Bild entfernen 57, 61  
 Bild importieren 57, 61  
 Bild laden 59  
 Bild suchen 56, 59  
 Bildanzeige 143  
 Bildname 57, 62  
 Bildschirm 15  
 Bildschirm ausschalten 158  
 Bluetooth / Lautsprecher 155

**C**

CE-Konformitätserklärung 2  
 Cursorfarbe (Scanning) 132

**D**

Datum einstellen 159  
 Datumsformat einstellen 159  
 Dauerhaft auf eine andere Seite wechseln  
 40  
 Display 15  
 Display / Energie 157  
 Display löschen (Tastenfunktion) 70, 118  
 Drückdauer 125  
 Duplizieren 20

**E**

Editiermodus 12, 16, 17  
 Editier-Modus 18  
 Ein Wort zum Aussprachlexikon  
 hinzufügen 134  
 Einer Taste ein Makro zuweisen 72  
 Einstellungen 16, 17  
 einzelne Seite löschen 50  
 Endung anhängen (Tastenfunktion) 70  
 Entfernen (Bild) 57, 61  
 entfernen (Tastenfunktion) 69  
 Entfernen (Tastenfunktion) 68  
 Export eines Vokabulars aus dem  
 NovaChat-Editor 114  
 Externen Verstärker benutzen 155

**F**

Farbverlauf 143  
 Feld Display löschen (X) einblenden 128  
 fett (Taste bearbeiten) 64, 66  
 Funktion (Tasteigenschaften) 68  
 Für eine Auswahl auf eine andere Seite  
 wechseln 41

**G**

gedehnt 44

**H**

Hauptmenü 16  
 Helligkeit 157  
 Hilfe 16, 17  
 Hilfssignal (Tastenfunktion) 70  
 Hintergrundbild 38  
 Hintergrundbild auswählen 44  
 Hintergrundbild importieren 43  
 Hintergrundfarbe 38  
 Hintergrundfarbe (Taste bearbeiten) 65,  
 66  
 Hintergrundfarbe (Textfenster) 142  
 Hinweise 2  
 Hinzufügen (Tastenfunktion) 68, 69  
 hoch (Tastenfunktion) 68, 69  
 Hochformat 126  
 Horizontal (Tastengröße) 81  
 horizontale Kalibrierung 158

**I**

Implantierbare Medizinprodukte 4  
 Import einer Vokabulardatei in den  
 NovaChat-Editor 115  
 Importieren (Bild) 57, 61  
 Import-Ordner des NovaChat-Editors 115  
 Inhaltsverzeichnis 5

**K**

keine Aktivität 126  
 Kiosk-Modus 160  
 Klicken in Android 156  
 Kopfhörer 130  
 Kopfhörer-Lautstärke 130

kursiv (Taste bearbeiten) 64, 66

**L**

Label (Taste bearbeiten) 55, 58  
 Label oben (Taste bearbeiten) 65, 67  
 Label sprechen 130  
 Label sprechen (Tastenfunktion) 70  
 Laden (Bild) 59  
 lauter (Tastenfunktion) 70  
 Lautsprecher 130  
 Layout 142  
 Layout (Bilder) 143  
 Layout (Tasteigenschaften) 64  
 Layout (Textfenster) 142  
 leere Felder überspringen 131  
 leiser (Tastenfunktion) 70  
 letzte Ausgabe wiederholen  
 (Tastenfunktion) 70  
 letzte Eingabe sprechen (Tastenfunktion)  
 70  
 Letzte Eingabe sprechen (Tastenfunktion)  
 118  
 Lexikon (Wortvorhersage) 140  
 linear 131  
 Loslassdauer 125

**M**

Makro 72  
 Maximieren und Sprechen 126  
 mehrere Seiten löschen 51  
 Menü aktivieren 127  
 Menü Ansteuerung 124  
 Menü Bibliothek 162  
 Menü Layout 142  
 Menü Menüsperre 144  
 Menü Profile 146  
 Menü Schreibhilfen 140  
 Menü Sprachausgabe 133  
 Menü Sprache 152  
 Menü System 154  
 Menü Textbausteine 136  
 Menüs 16  
 Menüsperre 144  
 Menüsperre ausschalten 145  
 Menüsperre einschalten 145  
 mit Verstärker verbinden 155  
 Mitteilung (Taste bearbeiten) 55, 58  
 Mitteilung anzeigen (Tastenfunktion) 70  
 Mitteilung ausgeben 68, 69  
 Mitteilung ausgeben (Tastenfunktion) 70  
 Mitteilung sprechen 130

Mitteilung sprechen (Tastenfunktion) 70  
 Modifizierer 84  
 Modifizierer anwenden 84  
 Modifizierer anwenden (Tastenfunktion) 70  
 Modus 131  
 Multi-Taste aus Bibliothek laden 87  
 Multi-Taste bearbeiten 93  
 Multi-Taste benutzen 84  
 Multi-Taste einfügen 89, 90  
 Multi-Taste erstellen 85, 86  
 Multi-Taste kopieren 89, 90  
 Multi-Taste verknüpfen 91  
 Multi-Tasten 84  
 Muster 131

## N

nächste (Taste bearbeiten) 57  
 nächste Seite 17  
 Name (Bild) 57, 62  
 Name (Taste bearbeiten) 55, 58  
 Navigationstasten 17  
 Neigen 126  
 Neue Multi-Taste erstellen 85, 86  
 neue Multi-Taste kopieren 91, 92  
 neue Multi-Taste verknüpfen 91, 92  
 Neue Seite anlegen 30, 32  
 Neue Taste erstellen 54  
 Neues Profil erstellen 146  
 neues Vokabular erstellen 21  
 NovaChat-Editor 17  
 NovaChat-Editor Funktionsumfang 13  
 NovaChat-Editor installieren 13  
 NovaChat-Editor starten 13  
 NovaChat-Import-Ordner 115  
 nur Maximieren 126  
 nur Touchscreen 129

## O

Optionen des Textfensters 118

## P

Parameter wählen (Tastenfunktion) 68  
 Passwort (Menüsperre) 144  
 Passwort für Menüsperre ändern 145  
 Position (Vorhersagereihenfolge) 141  
 Profil laden 149  
 Profil laden (Tastenfunktion) 70

Profil löschen 151  
 Profil speichern 148  
 Profile 146

## Q

Querformat 126

## R

Rahmenbreite (Taste bearbeiten) 65, 67  
 Rahmenfarbe (Taste bearbeiten) 65, 67  
 Ressource 12  
 Rückmeldungen / Feedback 156  
 Rücknahmeoption 132  
 runter (Tastenfunktion) 68, 69

## S

Sättigung des Farbverlaufs 143  
 Satz sprechen 135  
 Scangeschwindigkeit 132  
 Scanmodus 131  
 Scanmuster 131  
 Scanning 129  
 Scan-Piepton 130  
 Schreibhilfen 140  
 Schrift (Taste bearbeiten) 64, 66  
 Schriftfarbe (Taste bearbeiten) 65, 67  
 Seite 12, 15  
 Seite als Vorlage speichern 34  
 Seite anzeigen 40, 42  
 Seite anzeigen (Tastenfunktion) 70, 71  
 Seite duplizieren 32  
 Seite importieren 45  
 Seite von Vorlage anlegen 36  
 Seite zur Startseite machen 48  
 Seiten drucken 166  
 Seiten erzeugen 30  
 Seiten kopieren 47  
 Seiten löschen 50  
 Seiten verknüpfen 40  
 Seiteneigenschaften bearbeiten 38  
 Seitenindikator 40, 41, 143  
 Seiten navigationsbefehle 42  
 Seitenvorgaben 109  
 Sicherheitshinweise 3  
 sichtbar (Taste bearbeiten) 57, 63  
 Situationsbild auswählen 44  
 Situationsbild importieren 43  
 Situationsbild verwenden 43

Situationsbilder 43  
 Sound aufnehmen 99  
 Sound aufnehmen (Tastenfunktion) 71  
 Sound wiedergeben 95  
 Sound wiedergeben (Tastenfunktion) 71  
 Sprachausgabe 133  
 Sprachausgabe aus 135  
 Sprache 152  
 Sprache ein/aus (Tastenfunktion) 71  
 Sprache wechseln 152  
 Spracheinstellungen 130  
 Sprechen (Tastenfunktion) 71, 118  
 Sprechgeschwindigkeit 133  
 Standardprofil laden 150  
 Startseite 17  
 Startseite anzeigen 42  
 Startseite anzeigen (Tastenfunktion) 71  
 Startseite festlegen 48  
 statische Wortvorhersage (Tastenfunktion) 71  
 statische Zeichenvorhersage (Tastenfunktion) 71  
 Stimme 133  
 Stimme für Ansagen 130  
 Stopp 17  
 Stopp (Tastenfunktion) 71, 118  
 Stylus 11  
 Suchen (Bild) 56, 59  
 Symbol allen Tasten zuweisen 85, 87  
 Synthesizer 133  
 System (Menü) 154

## T

Taste 12  
 Taste aus Bibliothek laden 73  
 Taste bearbeiten 54  
 Taste entfernen 83  
 Taste kopieren 75  
 Taste löschen 83  
 Taste mehrfach verwenden 73  
 Taste verknüpfen 77  
 Tasten konfigurieren 129  
 Tastenansage 130  
 Tastenbreite 81  
 Tasteneigenschaften – Allgemein 55  
 Tasteneigenschaften – Funktion 68  
 Tasteneigenschaften – Layout 64  
 Tastengröße ändern 81  
 Tastenhöhe 81  
 Tastenlayout übertragen 79  
 Tastenmakro 72  
 Tastenpiloten 127  
 Tastenvorgaben 110

Text auf Taste speichern 119  
 Text auf Taste speichern (Tastenfunktion) 71  
 Textbaustein bearbeiten 138  
 Textbaustein hinzufügen 137  
 Textbaustein löschen 139  
 Textbausteine 136  
 Textfarbe (Textfenster) 142  
 Textfenster 12, 15, 118  
 Textfenster – Text einfügen 122  
 Textfenster – Text freigeben 122  
 Textfenster – Text kopieren 122  
 Textfenster automatisch löschen 135  
 Textfenster Kontextmenü 118  
 Textfenster laden 121  
 Textfenster laden (Tastenfunktion) 71  
 Textfenster löschen 128  
 Textfenster scannen 131  
 Textfenster speichern 120  
 Textfenster speichern (Tastenfunktion) 71, 118  
 Textfenstergröße 142  
 Textfensterlayout 142  
 Textfenstermenü 118  
 Textfensteroptionen 127  
 Textfenster-Text einfügen (Tastenfunktion) 71  
 Textfenster-Text freigeben (Tastenfunktion) 71  
 Textfenster-Text kopieren (Tastenfunktion) 71  
 Tippen = Maximieren 127  
 Tippen = Sprechen 127  
 Touchscreen-Bildschirm 11  
 Transparenz (Taste bearbeiten) 64, 67

## U

Übertragen – Vokabular von/zum Gerät 112, 113  
 Übertragen – Vokabular zum Computer 114  
 Übertragen von Vokabular 112  
 Umgebungsbedingungen 2  
 Universalpasswort (Menüsperre) 145  
 unterstrichen (Taste bearbeiten) 64, 66

## V

Vertikal (Tastengröße) 81  
 Verzögerungszeiten 124  
 Vibrieren in Android 156  
 Vokabular duplizieren 23

Vokabular erstellen 21  
 Vokabular öffnen 22  
 Vokabular umbenennen 24  
 Vokabular vom NovaChat-Editor als Datei  
 exportieren 114  
 Vokabular vom NovaChat-Editor auf den  
 NovaChat übertragen 112  
 Vokabular vom NovaChat-Gerät zum  
 NovaChat-Editor übertragen 113  
 Vokabular wechseln 22  
 Vokabular zwischen NovaChat und PC  
 übertragen 112  
 Vokabulardatei 12  
 Vokabulardatei in den NovaChat-Editor  
 importieren 115  
 Vokabulare bearbeiten 19  
 Vokabulare löschen 25  
 Vokabularvorgaben 108  
 Vorgaben (Seiten) 109  
 Vorgaben (Tasten) 110  
 Vorgaben (Vokabular) 108  
 Vorgespeichertes Vokabular laden 20  
 Vorhersagereihenfolge (Position) 141  
 vorige Seite 17  
 vorige Seite anzeigen 42  
 vorige Seite anzeigen (Tastenfunktion) 71

## W

Wort löschen 128  
 Wort löschen (Tastenfunktion) 71, 118  
 Wort sprechen 135  
 Wortvorhersage 140  
 Wortvorhersagelexikon 140  
 Wortvorschlagsfelder definieren 141

## Z

Zeichen löschen (Tastenfunktion) 71, 118  
 Zeichen sprechen 135  
 Zeile/Spalte 131  
 Zeit einstellen 159  
 Zeit und Datum 159  
 Zeit/Datum anzeigen (Tastenfunktion) 71  
 Zeitzone einstellen 159  
 zentriert 44  
 zum Computer 113  
 zum Gerät 112  
 zurück 16